

Utilisation toile/civière de chute

RAPPEL :

- L'usager doit être évalué par l'infirmière
- Utiliser en cas de suspicion de fracture de la hanche ou lorsqu'un usager a une prothèse totale de hanche depuis moins de 3 mois

3 soignants minimum sont nécessaires au bon déroulement de la tâche


Matériels nécessaires : Toile/civière de chute, lève-personne au sol, couverture de flanelle, oreiller (facultatif)



- Tourner l'usager sur le côté fracturé;
- Installer la toile/civière sous l'usager;
- Installer la couverture de flanelle sur la toile/civière;
- Prévoir que la couverture devra être sous l'usager;
- Tourner légèrement l'usager de l'autre côté pour étendre la couverture.



- Identifier l'intervenant qui coordonne le mouvement;
- Glisser l'usager sur la toile/civière avec la collaboration de deux intervenants, en utilisant la couverture;
- Au même moment, le 3^e intervenant effectue une légère traction avec l'aide des ganses de la toile/civière pour éviter le déplacement de la toile/civière lors du glissement de l'usager.

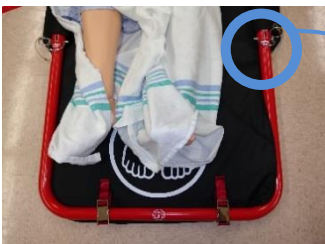

- Insérer les tubulures dans les pochettes noires de chaque côté de l'usager sur la toile/civière en commençant par les barres latérales;
- Insérer la partie des pieds sous la toile/civière; Insérer les clés pour fixer les tubulures ensemble; Fermer les attaches sur le câble au niveau inférieur de la toile/civière.



- Insérer la partie de la tête sous la toile; Insérer les clés pour fixer les tubulures ensemble; Fermer les attaches sur le câble au niveau supérieur de la toile/civière.



- Approcher le lève-personne au sol de la tête de l'usager;
- Appuyer le cadre sur la base du lève-personne au sol, puisque celle-ci s'articule (sauf en cas de suspicion de fracture cervicale, avoir préalablement mis un collet cervical), et appliquer les freins;
- Baisser le support et accrocher les 4 ganses de la toile/civière, toutes au même niveau.




En milieu hospitalier, selon l'évaluation clinique, placer une planche de transfert sur une civière. Cela facilitera le transfert pour les technologues sur la table de radiologie.



- Soulever l'usager à l'aide du lève-personne au sol; Un intervenant doit stabiliser la toile/civière tout en rassurant l'usager;
- Déposer l'usager sur une civière ou sur le lit et retirer les tubulures rouges;
- Au besoin, diriger l'usager en radiologie.

Nettoyage et désinfection MÉDICAUX

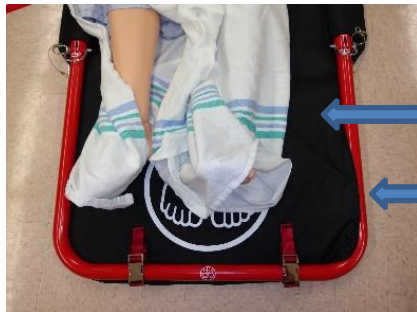

Toile

Tubulure rouge

SI LA TOILE EST VISIBLEMENT PROPRE :

- Procéder à l'hygiène des mains;
- Mettre les gants;
- Disposer la toile dans un sac à lingerie souillée (sac bleu jetable), en prévision de son envoi vers la buanderie;
- Retirer les gants;
- Procéder à l'hygiène des mains;
- Mettre les gants;
- Utiliser les lingettes de peroxyde d'hydrogène pour nettoyer/désinfecter les tubulures rouges;
- Si l'usager est en isolement, il faut revêtir l'ÉPI et respecter la technique d'entretien (A, B ou C) inscrite sur l'affichette à l'entrée de la chambre en isolement.

SI LA TOILE EST VISIBLEMENT SOUILLÉE :

- Procéder à l'hygiène des mains;
- Revêtir la blouse, les gants et le masque en cas d'éclaboussures (ÉPI);
- Prendre une/des serviettes propre(s) pour absorber au maximum le liquide biologique se trouvant sur la toile;
- Disposer la toile utilisée dans un sac à lingerie souillée (sac bleu jetable), en prévision de son envoi vers la buanderie;
- Retirer l'ÉPI;
- Procéder à l'hygiène des mains;
- Utiliser les lingettes de peroxyde d'hydrogène pour nettoyer/désinfecter les tubulures rouges;
- Si l'usager est en isolement, il faut revêtir l'ÉPI et respecter la technique d'entretien (A, B ou C) inscrite sur l'affichette à l'entrée de la chambre en isolement.

La toile se lave à la machine à laver à l'eau chaude n'excédant pas 60°C ou 140°F.
La toile doit être suspendue, afin de préserver son intégrité. Ne pas la repasser.

Références : ASSTSAS (2019). Installation de la toile civière \ Québec médical (2012). Toile civière QM-500			
Direction émettrice	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques	Entrée en vigueur :	2020-02-20
AMC-DSIEU-6035 (2020-02)		Révision :	