





Système de perfusion CADD-Solis^{MC} Pompe ambulatoire CADD-Solis VIP^{MC} Mode continu


Nouvelle programmation

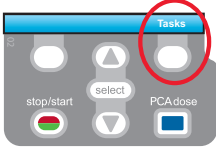

1. Pour lancer la programmation, sélectionner **Tâches**.
2. Utiliser la flèche pour mettre en surbrillance **Voir les tâches avancées** + sélection.

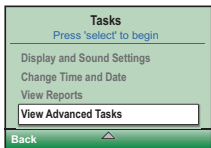


3. En utilisant la flèche mettre en surbrillance **Lancer une nouvelle programmation** + sélection, puis sélectionner **Continuer**.

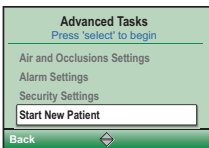

4. Entrer le code de sécurité à 3 chiffres en utilisant la flèche ou + sélection.
5. En utilisant la flèche ou , mettre en surbrillance **Continu** + sélection. Mettre en surbrillance **[Program. manuelle]** ou le critère qualificatif du protocole s'il existe + sélection. Si le protocole est choisi, mettre en surbrillance le nom du médicament + sélection.




6. Sélectionner **Oui** pour confirmer le choix. Sélectionner **Revoir** pour **revoir les paramètres de la pompe**.

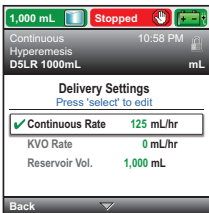

7. Ensuite, ajuster chaque paramètre. Mettre en surbrillance un paramètre, appuyer sur sélection, puis sur la flèche ou Sélectionner **Enregistrer**.
8. Confirmer les valeurs en sélectionnant **Valider**. Le symbole apparaît à gauche + **Suivant**.
9. Retirer la pince bleue et fixer la tubulure de perfusion ou la cassette. Les prochaines étapes à suivre jusqu'au démarrage de la pompe apparaîtront à l'écran.
10. Démarrer la pompe.

Changement rapide de consommable

Même volume à perfuser, même programmation

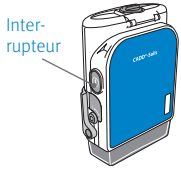

1. Mettre la pompe sous tension.
2. Retirer la pince bleue et fixer le nouveau consommable à la pompe.
3. La pompe demande Réinitialiser volume résiduel à xx mL?
Valider en sélectionnant OUI.
4. L'écran affiche Purger la tubulure?
Sélectionner OUI (si nécessaire). Sélectionner Non si la tubulure a été purgée au préalable.
5. Entrer le code de sécurité à 3 chiffres. Appuyer sur la flèche ▼ or ▲ + sélect si nécessaire.
6. Suivre les instructions pour purger la tubulure.
7. Démarrer la pompe.