

Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Août 2019

Remerciements

Ce document n'aurait pu voir le jour sans la précieuse implication et la participation du service de programmation en soins de plaies et stomathérapie. À tous, nous leur adressons nos remerciements pour leur contribution au développement des meilleures pratiques.

Le genre masculin utilisé dans le document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Les personnes ayant participé à l'élaboration de ce document sont identifiées dans la dernière section « Historique ».

© Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, août 2019.
Reproduction autorisée avec mention de la source.

Tables des matières

AVANT-PROPOS	6
BARRIERES CUTANEEES : LIQUIDES AVEC ALCOOL.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
All Kare	Erreur ! Signet non défini.
Skin Prep	7
BARRIERES CUTANEEES : LIQUIDES SANS ALCOOL.....	8
Cavilon.....	8
No-Sting Skin Prep	9
BARRIERES CUTANEEES : EN CREME, EN ONGUENT ET EN PATE	10
Critic-aid Clear	10
PANSEMENTS NON ADHERENTS : IMPREGNEES	11
Adaptic.....	11
Adaptic Touch.....	12
PANSEMENTS NON ADHERENTS : IMPREGNEES D'AGENTS ANTIMICROBIENS OU ANTISEPTIQUES.	13
Bactigras	13
PANSEMENTS NON ADHERENTS : NON IMPREGNEES.....	14
Telfa /Melolite / Compresse non adhérente	14
PANSEMENTS MULTICOUCHES AVEC BORDURE ADHESIVE	15
Alldress	15
PANSEMENTS AU CHARBON ACTIVE.....	16
Actisorb silver 220	16
PELLICULES TRANSPARENTES	17
Opsite/Tegaderm	17
HYDROCOLLOÏDES : MINCE.....	18
Duoderm Extra - Mince	18
HYDROCOLLOÏDES : ORDINAIRE.....	19
Comfeel Plus pour ulcère	19
PATE HYDROPHILE	20
Triad.....	20
HYDROGELS ISOTONIQUES	21

NU-GEL	21
AGENT DE DEBRIDEMENT ENZYMATIQUE	22
Santyl collagénase.....	22
PANSEMENT ABSORBANTS : ALGINATES.....	23
Pansement à l'alginate de calcium	23
PANSEMENTS ABSORBANTS : FIBRES GELIFIANTES.....	24
Aquacel Extra	24
PANSEMENTS ABSORBANTS : CHLORURE DE SODIUM HYPERTONIQUE	25
Mesalt	25
PANSEMENTS ABSORBANTS : MOUSSES HYDROCELLULAIRES	26
Biatain	26
Mepilex	27
Mepilex border	28
PANSEMENTS ABSORBANTS : PANSEMENTS EN ACRYLIQUE TRANSPARENT	29
Tegaderm Absorbent.....	29
PANSEMENTS ABSORBANTS : COUSSINETS ABSORBANTS	30
Mesorb.....	30
PANSEMENTS ANTIMICROBIENS : À BASE D'IODE.....	31
Inadine	31
Iodosorb.....	32
PANSEMENTS ANTIMICROBIENS : À BASE DE POLYHEXAMETHYLENE (PHMB).....	33
Mèche / compresse Curity PHMB	33
Mousse de transfert PHMB	34
Prontosan Wound gel	35
Prontosan solution nettoyage	36
PANSEMENTS ANTIMICROBIENS : À BASE D'ARGENT	37
Acticoat Flex 3	37
Aquacel AG Extra	38
Aquacel AG+ Extra	39
Flamazine	40
InterDry AG	41
Mepilex Ag	42
Prisma.....	43
Silvercel	44
PANSEMENTS ANTIMICROBIENS : À BASE DE MIEL.....	45
Medihoney	45

PANSEMENTS ANTIMICROBIENS : À BASE DE VIOLET DE GENTIANE ET DE BLEU DE METHYLENE....	46
Hydrofera Blue classic	46
PANSEMENTS ANTIMICROBIENS : PAR MICRO-ATTRACTION	48
Cutimed Sorbact	48
PANSEMENT BIOACTIFS : MATRICE A EFFET ANTI-PROTEASES	49
Promagran	49
PANSEMENTS BIOACTIFS : MATRICE EXTRACELLULAIRE	50
Oasis.....	50
PANSEMENT AVEC MEDICATION	51
Biatain IBU	51
PANSEMENTS POST-OP	52
Mepore.....	52
LISTE DES PANSEMENTS POUR LA THERAPIE PAR PRESSION NEGATIVE :	53
Thérapie VAC	53
Renasys EZ Plus et Renasys Go	Erreur ! Signet non défini.
PICO	55
VAC VIA.....	Erreur ! Signet non défini.
Nanova	57
Avelle	Erreur ! Signet non défini.
BANDAGES DE COMPRESSION :	58
Code de produits des bandages de compression	58
Comprilan	59
Profore Lite	60
Profore	61
SurePress	62
Tubigrib	64

Avant-propos

Ce mode d'emploi a pour but d'avoir un accès rapide et abrégé sur l'utilisation des produits de plaies les plus courants. Pour une information complète, référez-vous à la fiche monographique du produit.

Les indications et contre-indications sont généralement inscrites selon des généralités (ex.: plaies très exsudatives). Pour quelques exceptions, nous avons précisé le type de plaies (ex.: lésion de stade I, brûlures, déchirure cutanée).

La ligne disponibilité permet :

- D'identifier tous les formats du produit ;
- D'avoir le numéro d'approvisionnement du CISSMO si le produit est disponible en inventaire (I), si le produit est acheté en achat direct (A) ou s'il est disponible à la pharmacie de l'hôpital ;
- De connaître les modalités de remboursement du produit soit :
 - o Remboursement par la RAMQ via la liste des médicaments d'exception ;
 - o Remboursement régulier via la RAMQ ;
 - o Aucun remboursement de la RAMQ.

Pour les produits à l'argent, plusieurs compagnies n'ont pas toutes les données cliniques pour les précautions suivantes :

- Ne pas associer à des produits à base d'huile, de vaseline ou à d'autres produits antimicrobiens ;
- Ne pas combiner à l'électrostimulation ;
- Enlever avec les traitements de radiothérapie si la plaie se situe dans le champ de radiation ;
- Ne pas utiliser chez un patient devant subir une IRM ;
- Éviter le contact des électrodes ou du gel conducteur durant un EEG ou ECG.

Par mesure de sécurité, ces précautions ont été ajoutées si la compagnie ne nous mentionnait pas un avis précis.

*Pour une correction, un commentaire ou l'ajout d'un produit, S.V.P. avisez
Julie Bélanger, ICASI Programmation en soins de plaies et stomathérapie
(450) 371-9920 poste 2687*

[Retour à la table des matières](#)

Cie : Smith&Nephew		Catégorie : Barrière cutanée liquide avec alcool			
Nom du produit :		 Mise à jour : 190104			
Caractéristiques	• Protège la peau contre l'urine, les matières fécales, l'exsudat de la plaie et les autres sécrétions corporelles • Protège l'épiderme contre les traumatismes reliés à la friction et au retrait des produits adhésifs • Augmente généralement l'adhérence du pansement à la peau • Tampon stérile				
Indications	• Prévention de la macération et de l'irritation cutanée • Prévention des traumatismes reliés à la friction et au retrait des adhésifs • Amélioration de l'adhérence du pansement dans les régions sèches en sébum ou velues				
Contre-indication	• Perte d'intégrité cutanée • Ne pas appliquer sur une plaie ouverte ou les muqueuses • Non recommandé autour du visage ou des yeux • Allergie ou sensibilité à l'alcool isopropylique				
Précaution	Utiliser dans un endroit bien ventilé et éviter son utilisation à proximité des flammes et des sources d'ignition (ex. électrocautère)				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	Lingette	1005291 (I)			☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et bien assécher • Appliquer et laisser sécher 30 secondes				
Fréquence de changements	NA				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Barrières cutanées : Liquides sans alcool

Cie : 3M		Catégorie : Barrière cutanée liquide sans alcool			
Nom du produit :		 Mise à jour 190116			
Cavilon					
Caractéristiques	Film protecteur cutané non irritant et non cytotoxique (solution polymérisée). Incolore, transparent et perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau. Tous les formats sont stériles, sauf le vaporisateur.				
Indications	• Prévention et traitement de la macération et de l'irritation cutanée • Traitement des plaies de stade I ou II peu exsudatives • Irritation et érosion secondaires à l'incontinence ou aux liquides biologiques • Prévention des traumatismes reliés aux adhésifs ou au frottement				
Contre-indications	• Allergie à l'acrylique • Nourrisson de moins d'un mois				
Précaution	Appliquer aux 48 à 72 heures, car une application plus fréquente risque de nuire à sa capacité de protection.				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	Applicateur 1 ml	1032094 (I)			☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer et bien assécher • Tampons : appliquer une couche de film uniforme • Vaporisateur : tenir le flacon à environ 15 cm de la peau et balayer d'un mouvement régulier toute la surface à traiter. Si une partie n'a pas été vaporisée, réappliquer sur cette partie uniquement après avoir laissé sécher la première application (30 sec.) • Lorsque le protecteur doit être appliqué dans un pli cutané, écarter la peau pour permettre au protecteur de sécher (30 sec.) afin d'éviter que les plis ne collent entre eux • Si le protecteur est utilisé sous un diachylon ou un pansement laisser sécher avant de le recouvrir				
Fréquence de changements	• Lorsque le protecteur est utilisé comme protection contre les liquides organiques, effectuer une nouvelle application toutes les 24 à 72 heures selon la fréquence de nettoyage. Pour des selles, peut être fait après chaque selle • Il n'est pas nécessaire d'éliminer le protecteur avant une nouvelle application. Au besoin, utiliser du dissolvant • Une nouvelle application est nécessaire après chaque changement de pansement				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Cie : Smith & Nephew		Catégorie : Barrière cutanée liquide sans alcool			
Nom du produit :		 Mise à jour : 190114			
No-Sting Skin Prep					
Caractéristiques	- Film protecteur cutané non irritant et non cytotoxique. Incolore, transparent et perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau. - Tous les formats sont stériles; le vaporisateur est stérile pour le premier emploi				
Indications	- Prévention et traitement de la macération et de l'irritation cutanée - Irritation et érosion secondaires à l'incontinence ou aux liquides biologiques - Prévention des traumatismes reliés aux adhésifs ou au frottement				
Contre-indication	- Allergie à l'un des composants - Nouveau-né à terme moins de 1 mois				
Précaution	- Si une rougeur ou d'autres signes d'irritation apparaissent, cesser l'utilisation - Ne pas appliquer directement sur une peau ouverte ou une plaie - Ne pas appliquer sur une zone cutanée infectée - L'utilisation dans les zones sensibles telles que le visage et les yeux est déconseillée - Produit inflammable ; ne pas utiliser à proximité de flammes				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	Lingette	1051889 (I)			☒
	Bouteille 28 ml	1004796 (I)			☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	- Nettoyer et bien assécher - Appliquer uniformément, laisser sécher 30 secondes avant de couvrir - Vaporisateur : tenir le flacon à 10-15 cm de la peau et balayer d'un mouvement régulier toute la surface à traiter. Si une partie n'a pas été vaporisée, réappliquer sur cette partie uniquement après avoir laissé sécher la première application (30 sec.) - Lorsque le protecteur doit être appliqué dans un pli cutané, écarter la peau pour permettre au protecteur de sécher (30 sec.) afin d'éviter que les plis ne collent entre eux				
Fréquence de changements	- Procure une barrière jusqu'à 4 jours lorsqu'utilisé seul ou sous un pansement non adhérent - Lorsqu'utilisé sous adhésif, réappliquer à chaque changement de pansement - Il n'est pas nécessaire d'éliminer le protecteur avant une nouvelle application. Au besoin, utiliser du dissolvant - Pour dermatite reliée à l'incontinence - Chaque 24-96 h, selon la fréquence de nettoyage - Chaque 12-24 h, si nettoyage fréquent (ex, diarrhée)				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Barrières cutanées : En crème, en onguent et en pâte

Cie : Coloplast		Catégorie : Protecteur cutané				
Nom du produit :						
Critic-aid Clear		Mise à jour 181227				
Caractéristiques	• Crème barrière à base d'oxyde de zinc et de 71,5% de gelée de pétrole utilisée pour les peaux sensibles, enflammées et dénudées à cause de diarrhées profuses ou autres conditions qui endommagent la peau. • Protecteur cutané incolore pour l'irritation cutanée, légère à sévère, due à l'incontinence • Barrière transparente qui permet d'évaluer la peau sans avoir à frotter pour enlever les résidus d'une application précédente • Adhère à la peau intacte, mouillée ou dénudée					
Indications	• Usager incontinent présentant un début d'irritation cutanée • Usager présentant des diarrhées fréquentes • Prévention macération					
Contre-indication	Aucune					
Précaution	• Éviter tout contact du produit avec les yeux. • Ne pas appliquer sur des plaies profondes ni sur les lacérations • Ne pas appliquer le produit en trop grande quantité					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	Sachet de 4g	1046737 (I)			☒	
	Tube 71 g	1029588 (I)			☒	
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	• Nettoyer délicatement la peau périnéale avec un nettoyant sans rinçage doux • Assécher délicatement la région. • Appliquer une toute petite quantité sur la région à protéger, l'étendre sur les gants au préalable pour faciliter l'application d'une couche mince uniforme. Ne pas tenter de faire pénétrer dans la peau.					
Fréquence de changements	Répéter après chaque incontinence en couche mince.					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

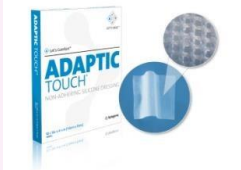
Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pansements non adhérents : Imprégnés

Cie : Acelity / KCI		Catégorie : Pansement non adhérent imprégné			
Nom du produit : Adaptic		 Mise à jour : 181229			
Caractéristiques	• Pansement primaire constitué d'un tricot d'acétate de cellulose imprégné d'une émulsion spéciale de gelée de pétrole • Conçu pour empêcher les pansements secondaires d'adhérer au lit de la plaie, minimisant ainsi les dommages tissulaires et la douleur associée au retrait du pansement • Perméable à l'exsudat • Aucune capacité d'absorption • Peut s'assécher • Peut être utilisé en association avec un gel				
Indications	• Pour les plaies sèches à fortement exsudatives • Prévention des traumatismes au lit de la plaie				
Contre-indication	Aucune				
Précaution	Cesser s'il colle ou cause des traumatismes au lit de la plaie				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	7,6 x 7,6 cm	1001402 (I)			☒
	7,6 x 20,3 cm	1005493 (I)			☒
	7,6 x 40,6 cm	1027882(I)			☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnant avec NaCl ; bien assécher • Appliquer sur la plaie et sur la peau environnante, peut être coupé • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place plusieurs jours selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Cie : Acelity/ KCI		Catégorie : Pansement non adhérent imprégné de silicone			
Nom du produit :		 Mise à jour : 181229			
Adaptic Touch					
Caractéristiques	• Pansement primaire non adhérent composé d'un tricot d'acétate de cellulose souple recouvert d'une couche siliconée souple adhésive. Sa couche siliconée souple adhésive facilite son application et permet un retrait atraumatique. Son maillage ouvert et à pores de petite taille : • Entraîne une réduction du risque d'accumulation d'exsudat • Réduit l'adhérence du pansement secondaire au lit de la plaie • Permet un libre passage de l'exsudat vers le pansement secondaire • Réduit les risques de macération • Empêche une croissance cellulaire dans les mailles.				
Indications	• Plaies sèches à fortement exsudatives • Prévention des traumatismes au lit de la plaie • Lacérations • Déchirures cutanées • Compatible avec la thérapie à pression négative				
Contre-indications	• Implantation chirurgicale • Sensibilité au silicone ou à l'acétate de cellulose				
Précaution	Aucune				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	5 x 7.6 cm	1005168 (I)			☒
	7.6 x 11 cm	1019693 (I)			☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante. Bien assécher la peau environnante • Choisir un format de pansement assez grand pour couvrir au moins 2 cm de peau environnante ; il peut être coupé ; s'il n'est pas assez grand pour couvrir la plaie, peut le chevaucher, mais réduire le chevauchement afin de prévenir l'occlusion des mailles • Appliquer l'Adaptic Touch et lisser le pansement tout autour de la plaie. Un gant humidifié peut faciliter la manipulation • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante				
Fréquence de changements	• Peut rester en place jusqu'à 7 jours selon l'état de la plaie. Le pansement secondaire peut être changé plus fréquemment au besoin sans enlever l'Adaptic Touch • Doit rester en place 7 jours sur les greffes cutanées, les brûlures avec phlyctène ou les lacérations				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Pansements non adhérents : Imprégnées d'agents antimicrobiens ou antiseptiques

Cie : Smith & Nephew		Catégorie : Pansement non adhérent imprégné d'agent antimicrobien ou antiseptique			
Nom du produit :					
Bactigras		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	• Compresse de gaze tissée, imprégnée de paraffine et d'acétate de chlorhexidine 0.5%. Conçu pour empêcher les pansements secondaires d'adhérer au lit de la plaie, minimisant ainsi les dommages tissulaires et la douleur associée au retrait du pansement. • Antiseptique à large spectre • Perméable à l'exsudat • Aucune capacité d'absorption				
Indications	• Brûlure • Plaies traumatiques • Plaies colonisées ou infectées ou à haut risque d'infection				
Contre-indication	• Sensibilité ou allergie aux composants • Si lésions à couvrir s'étendent sur plus de 10% de la surface du corps chez l'enfant et 15% chez l'adulte				
Précaution	Aucune				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	5 X 5 cm	certains formats disponibles en pharmacie			☒
	10 X 10 cm				☒
	10 X 20 cm				☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante du NaCl ; bien assécher • Tailler à la grandeur de la plaie et éviter de toucher à la peau environnante (particulièrement pour les ulcères veineux) • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante				
Fréquence de changements	Changer quotidiennement ou maximum 4 jours				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pansements non adhérents : Non Imprégnés

Cie. : Tyco healthcare/Smith & Nephew / AMD Ritmed		Catégorie : Pansements non adhérents non imprégnés				
Nom du produit :						
Telfa /Melolite / Compresse non adhérente		Mise à jour 140123				
Caractéristiques	• Compresse absorbantes placées entre 2 pellicules plastifiées perforées (Telfa) ou compresse thermo scellée sur une face à une pellicule extra mince de polyester perforé (Melolite). • Pansement primaire ou secondaire • Peut être utilisé avec un hydrogel ; n'absorbe que l'exsudat • Peut être coupé					
Indications	Pour plaies avec peu d'exsudat et superficielles (ex. : lignes de suture, lacérations cutanées superficielles, brûlures partielles superficielles, plaie en voie de granulation)					
Contre-indication	Aucune					
Précaution	À cesser si adhère à la plaie ou si crée macération					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	Plusieurs formats disponibles en inventaire*				☒	
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante ; bien assécher • Appliquer sur la plaie, le côté de la compresse avec la ligne blanchâtre doit être côté opposé de la plaie/peau • Fixer avec un produit adhésif au choix					
Fréquence de changements	• À changer dès l'apparition de l'exsudat au travers du pansement • Pas d'indication de fréquence dans la fiche monographique					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Pansements multicouches avec bordure adhésive

Cie : Molnlycke		Catégorie : Pansement multicouche avec bordure adhésive			
Nom du produit :					
Aldress					
Mise à jour : 190116					
Caractéristiques	• Pansement multicouche avec bordure adhésive comportant un ilot central non adhérent qui possède un léger pouvoir d'absorption. • Pansement primaire ou secondaire • Peut être utilisé comme pansement secondaire en association avec un hydrogel (absorbe l'exsudat, mais laisse l'hydrogel en place) • Perméable à la vapeur d'eau, mais imperméable à l'eau. Permet la douche				
Indications	Plaies avec exsudat léger à modéré				
Contre-indication	Allergie au produit adhésif				
Précaution	Vérifier l'intégrité de la peau en contact avec l'adhésif				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	10 X 10 cm	1006631 (I)	DE101		
	15 X 15 cm	1029579 (I)	DE101		
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante, bien assécher • Choisir un format de pansement assez grand pour couvrir au moins 2 cm la peau environnante • Appliquer la face adhésive sur la plaie				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place 7 jours, selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie.				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Pansements au charbon activé

Cie : Acelity/ KCI		Catégorie : Pansement antimicrobien au charbon activé				
Nom du produit :		 Mise à jour : 190116				
Actisorb silver 220						
Caractéristiques	• Pansement de charbon activé imprégné d'ions d'argent. Les microorganismes se fixent au charbon activé où ils sont détruits par les ions d'argent. Le charbon activé possède des propriétés anti odeur • Pansement primaire • Est efficace sec ou mouillé • Composition charbon activé imprégné d'argent 33 µ/cm2 dans une gaine de nylon liée par porus spun • Aucun latex					
Indications	Plaies aiguës ou chroniques avec colonisation critique / infection ou malodorantes					
Contre-indication	• Hypersensibilité ou allergie à l'argent • Sensibilité au nylon					
Précaution	• Ne pas couper • Ne pas associer à des produits à base d'huile ou de vaseline					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	6.5 X 9.5 cm	1005930 (A)	DE106 X 6 mois			
	10.5 X 10.5 cm	1005072 (A)	DE106 X 6 mois			
	19 X 10.5 cm		DE106 X 6 mois			
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante, bien assécher • Appliquer le pansement directement sur la plaie, ne pas couper, adapter à la forme de la plaie • Couvrir d'un pansement secondaire selon la quantité d'exsudat. Ajouter un pansement absorbant si l'exsudat est abondant ou un pansement non adhérent ou humide si la plaie est peu exsudative.					
Fréquence de changements	Changer au besoin ou aux 7 jours. Avant 7 jours, seulement le pansement secondaire peut être changé.					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Pellicules transparentes

Cie : Smith & Nephew / 3M		Catégorie : Pellicule transparente			
Nom du produit :					
Opsite/Tegaderm					
Mise à jour : 190116					
Caractéristiques	• Pellicules transparentes faites de polyuréthane enduit d'un adhésif acrylique • Procure un milieu humide qui favorise l'épithélialisation • Épouse facilement les contours de la plaie • Aucune capacité d'absorption • Perméable aux vapeurs d'eau et imperméable à l'eau • Pansement primaire ou secondaire				
Indications	• Plaies de pression stade I • Plaies peu exsudatives • Prévention contre la friction ou protection d'une plaie nouvellement épithélialisée				
Contre-indication	• Épiderme fragile, personnes âgées ou bébés prématurés • Allergie à l'adhésif				
Précaution	Retirer délicatement pour éviter d'endommager l'épithélium				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	Plusieurs formats disponibles en inventaire*				☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante, bien assécher • Choisir un pansement qui couvre la peau environnante de 3 à 5 cm • Appliquer du centre vers les bords ; ne pas étirer la pellicule • Ne pas appliquer la forme aérosol sur une peau érodée, car il contient de l'alcool • Retirer en exerçant une traction parallèle à la peau environnante et retenir celle-ci de l'autre main				
Fréquence de changements	• Peut rester en place au maximum 7 jours. Changer dès fuite ou décollement • Changer die si la plaie est infectée				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Hydrocolloïdes : Mince

Cie : Convatec		Catégorie : Hydrocolloïde mince			
Nom du produit :					
Duoderm Extra - Mince					
Mise à jour : 190116					
Caractéristiques	• Pansement hydrocolloïde qui forme un gel au contact de l'exsudat • Crée un milieu humide qui favorise la prolifération des tissus de granulation et l'épithélialisation • Imperméable à l'eau / semi-perméable à l'air • Pansement primaire ou secondaire • Aucun latex				
Indications	• Plaies sèches ou peu exsudatives, superficielles • Prévention des frictions				
Contre-indication	• Plaies avec exsudat modéré à abondant • Brûlure du 3e degré				
Précaution	Aucune				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	10 X 10 cm	1019307 (I)	DE101		
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante ; bien assécher • Choisir un format de pansement assez grand pour couvrir environ 3 cm la peau environnante • Appliquer le pansement et éviter de l'étirer, bien fixer en insistant sur les bords • Au besoin, encadrer avec un adhésif au choix				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place 7 jours, selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie.				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Hydrocolloïdes : Ordinaire

Cie : Coloplast		Catégorie : Hydrocolloïde régulier			
Nom du produit :					
Comfeel Plus pour ulcère					
Mise à jour : 190116					
Caractéristiques	• Pansement hydrocolloïde à bord aminci. Contient CMC et alginate de calcium. • Pansement semi-occlusif qui forme un gel au contact de l'exsudat : crée un milieu humide qui favorise le débridement autolytique, la prolifération des tissus de granulation et l'épithélialisation • Imperméable à l'eau • Le gel formé au contact de l'exsudat peut être nauséabond et est parfois interprété à tort comme un signe d'infection • Pansement primaire ou secondaire • Le pansement peut être coupé • Aucun latex				
Indications	Plaies avec exsudat léger à modéré, avec ou sans tissus nécrotiques				
Contre-indication	• Plaies infectées, plaies à risque élevées d'infection (ex. : plaie de stade IV, ulcère artériel) ; contre-indication relative car semi-perméable. • Plaies avec exsudat abondant • Brûlure 3e degré • Allergie aux composants				
Précaution	• Le gel doit être délogé par un nettoyage approprié • Capacité d'adhérence élevée et des retraits trop fréquents traumatisent la peau environnante / utiliser avec prudence sur une peau fragile • Occasionne parfois de l'hypergranulation si l'exsudat est trop abondant pour être absorbé par le produit				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	5 x 6 cm	1005082			
	10 x 10 cm	1001509	DE101		
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante ; bien assécher • Choisir un format de pansement assez grand pour couvrir environ 3 cm la peau environnante. Peut être coupé • Appliquer le pansement et éviter de l'étirer, bien fixer en insistant sur les bords (réchauffer avec les mains au besoin) • Au besoin, encadrer avec un adhésif au choix				
Fréquence de changements	• Peut demeurer en place 7 jours, selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie. La capacité d'absorption maximale est atteinte lorsque le pansement devient opaque ou lorsque l'exsudat s'étend à moins de 1.2 cm des bords (2 carreaux du bord).				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pâte hydrophile

Cie : Coloplast		Catégorie : Pâte hydrophile			
Nom du produit :					
Triad		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	• Pâte qui adhère aux zones humides et absorbe l'exsudat. Favorise le débridement autolytique, la prolifération des tissus de granulation et l'épithéliatlisisation. Produit stérile. • Composition : gelée de pétrole, oxyde de zinc, carboxyméthylcellulose et diméthicone • Aucun latex				
Indications	• Zones dénudées aux régions périanale et périnéale • Plaies de stade II et stade III chez un client incontinent • Plaies difficiles à traiter avec des pansements traditionnels à cause de leur localisation, par exemple le pli inter fessier				
Contre-indication	• Plaies infectées • Brûlure 3^e degré • Plaies artérielles				
Précaution	Aucune				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	Tube 71 g	1005192 (I)			☒
	Tube 170 g	1006111 (I)			☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante, bien assécher • Appliquer la crème Triad dans le lit de la plaie (remplir le lit de la plaie) • Couvrir d'un pansement au besoin (ex. : Telfa) • Si incontinence, nettoyer ce qui est souillé, ne pas tenter de retirer par la force des résidus du Triad. Réappliquer une nouvelle couche de Triad • Autres particularités : une poudre de type stomahésive peut être appliquée sous le Triad pour que ce dernier adhère mieux ET au-dessus du Triad pour qu'il ne colle pas.				
Fréquence de changements	• Peut rester en place 5 à 7 jours • Retirer la crème seulement lorsqu'elle se liquéfie, suinte et s'écoule • Si le Triad doit être retiré et est asséché, couvrir d'une gaze humectée de NaCl pour 2-3 minutes				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Hydrogels isotoniques

Cie : Acelity/ KCI		Catégorie : Hydrogel isotonique				
Nom du produit :		 Mise à jour : 190116				
NU-GEL						
Caractéristiques	- Hydrogel pour l'équilibre hydrique de la plaie ; favorise le débridement autolytique, la prolifération des tissus de granulation et l'épithélialisation. - Composition : Eau (70%) ; Alginate de sodium (3%) ; propylène glycol - Aucun latex					
Indications	- Plaies sans exsudation ou avec exsudat léger - Plaies avec du tissu de granulation - Plaies avec des tissus nécrotiques humides ou secs - Plaies avec sinus ou espaces sous-jacents					
Contre-indication	- Plaies avec exsudat modéré ou abondant - Brûlure 3° degré					
Précaution	- Ne pas mettre trop d'hydrogel, car peut entraîner la macération de la peau environnante, favoriser le développement d'une infection fongique ou provoquer de l'hypergranulation par excès d'humidité - Bien irriguer et enlever le surplus avant de combler un espace mort - Allergie ou sensibilité au propylène glycol					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	15 g	1000183 (I)		☒		
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	- Nettoyer la plaie et la peau environnante - Appliquer une couche de 3 à 5 mm d'épaisseur sur la surface de la plaie ou combler un espace mort (cavité ou sinus) à l'aide d'une mèche ou d'une compresse imbibée de gel - Recouvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante					
Fréquence de changements	- Refaire 1 fois par jour si l'objectif du traitement est le débridement autolytique - Refaire tous les 2-3 jours si les objectifs du traitement sont l'hydratation de la plaie, la prolifération des tissus de granulation et l'épithélialisation - À changer dès que le pansement secondaire est saturé					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Agent de débridement enzymatique

Cie : Smith&Nephew		Catégorie : Agent de débridement enzymatique			
Nom du produit :					
Santyl collagénase		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	• L'onguent avec collagénase Santyl est un agent de débridement topique stérile enzymatique qui renferme 250 unités de collagénase par gramme de pétrolatum blanc U.S.P. L'enzyme collagénase est dérivée de la fermentation de Clostridium histolyticum possédant le pouvoir unique de digérer de manière sélective le collagène aussi bien naturel que dénaturé qui lie les fibres nécrosées à la surface de la plaie. • Cette caractéristique le rend particulièrement efficace pour détruire les détritrus dans le lit de la plaie. Le collagène des tissus sains ou du nouveau tissu de granulation n'est pas digéré. • Aucun latex				
Indications	• Plaies avec tissus nécrotiques humides • Plaies avec escarre • Brûlures sévères nécessitant débridement				
Contre-indication	• Plaies infectées • Plaies sans potentiel de cicatrisation • Hypersensibilité topique ou systémique à la collagénase				
Précaution	• Ne pas utiliser avec des produits contenant des métaux lourds (ex. : argent, zinc, solution de Burow), de l'hexachlorophène (ex. : nettoyant PhisoHex) ou de l'iode. Ils inactivent le collagénase • Ne pas appliquer sur une peau saine, protéger la peau environnante si crainte de débordement du produit.				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	30 g	Disponible à la pharmacie	DE158 x 60 jrs		
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante avec du NaCl • Si présence d'escarre, scarifier l'escarre • Appliquer l'onguent Santyl sur la plaie, 2 mm d'épaisseur • Protéger la peau environnante avec un protecteur cutané si risque de débordement d'exsudat • Recouvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante				
Fréquence de changements	• Changer une fois par jour ou plus souvent si saturé • Cesser quand les tissus nécrotiques sont débridés				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pansement absorbants : Alginates

Cie : Cardinal Health		Catégorie : Alginate			
Nom du produit :		 Mise à jour : 181229			
Caractéristiques	• Pansement d'alginate de calcium produit à partir de matériaux en alginate naturel. • Le pansement en contact avec l'exsudat de la plaie forme un gel qui crée un environnement humide à l'endroit de la plaie				
Indications	• Plaies avec exsudat modéré à abondant • Plaies qui présentent des saignements (ex. : suite à un débridement chirurgical)				
Contre-indication	• Plaie sèche ou peu exsudative • Ne pas utiliser dans un sinus long, étroit ou tortueux ou dans une cavité profonde non accessible • Brûlure 3^e degré				
Précaution	• Nettoyer adéquatement la plaie au moment du changement de pansement, car il peut laisser des débris • Cesser lorsque le pansement est sec ou qu'il adhère au lit de la plaie, car causera une déshydratation de la plaie				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	10 x 10 cm	1027705 (A)	DE101		
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante • Déposer l'alginate dans la plaie ; bourrer lâchement les plaies profondes. Ne pas faire déborder sur la peau • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera le contrôle de l'humidité • Lors du retrait, humidifier avec du NaCl s'il adhère à la plaie				
Fréquence de changements	• Peut demeurer en place maximum 4 jours : changer dès que saturé et selon l'état de la plaie • Cesser lorsqu'il est sec ou adhère à la peau				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Pansements absorbants : Fibres gélifiantes

Cie : Convatec		Catégorie : Fibre gélifiante			
Nom du produit :					
Aquacel Extra		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	• Pansement absorbant composé de carboxyméthylcellulose sodique. Au contact de l'exsudat, se gélifie. Son absorption est verticale, ce qui évite la macération de la peau environnante. Relié avec des fibres de renfort pour permettre un retrait plus facile et moins douloureux. Peut être découpé dans tous les sens. • Favorise le débridement autolytique et la prolifération des tissus de granulation • Pansement primaire				
Indications	Pour les plaies avec exsudat modéré à abondant				
Contre-indication	Brûlure 3 ^e degré				
Précaution	Ne pas associer à des produits à base d'huile ou de vaseline				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	10 X 10 cm	1005190 (I)	DE101		
	15 X 15cm	1055007(I)	DE101		
	2 X 45 cm	1029757 (I)	DE101		
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante avec du NaCl ; bien assécher • Choisir un pansement de taille appropriée : ○ pour les plaies superficielles : doit déborder de 1 cm le pourtour de la plaie ○ pour les plaies cavitaires : laisser dépasser le ruban de 2.5 cm pour en faciliter le retrait/comblant la cavité à 80% • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante • Au retrait : humidifier le pansement s'il adhère à la plaie (choix de pansement alors à reconsidérer)				
Fréquence de changements	• Peut demeurer en place maximum 7 jours, selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie • Cesser lorsque l'écoulement n'est pas assez copieux pour saturer le pansement				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Pansements absorbants : Chlorure de sodium hypertonique

Cie : Molnlycke		Catégorie : Pansement au chlorure de sodium hypertonique				
Nom du produit						
Mesalt		Mise à jour : 190116				
Caractéristiques	• Pansement de viscose polyester non tissé imprégné de cristaux de NaCl. Au contact de l'exsudat, les cristaux se dissolvent et créent un milieu hypertonique qui, par osmose, attire l'exsudat, les liquides interstitiels et les débris cellulaires dans le pansement, tout en créant un milieu hostile aux microorganismes et en réduisant l'œdème • Pansement primaire • Aucun latex • Favorise la prolifération des tissus de granulation et le débridement autolytique					
Indications	• Plaies avec exsudat modéré à abondant • Plaies avec tissu nécrotique humide ou fibrineux et avec de la granulation • Plaies infectées					
Contre-indication	• Plaie sèche ou peu exsudative • Sensation de brûlure qui persiste 1 heure après l'application du pansement • Combinée à une thérapie de stimulation électrique • Brûlure 3^e degré					
Précaution	• Éviter le contact du pansement avec la peau environnante pour réduire le risque de brûlure et d'irritation cutanée • Cesser lorsque le pansement est sec ou adhère au lit de la plaie après 24 heures, car causera une déshydratation de la plaie					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	5 X 5 cm	1003884 (I)	DE101			
	10 X 10 cm	1051983 (I)	DE101			
	Mèche 2 X 100 cm	1019700 (I)	DE101			
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante • Déposer le Mesalt dans la plaie ; bourrer lâchement les plaies profondes ; ne pas faire déborder sur la peau • Si risque de débordement d'exsudat sur la peau environnante, protéger la peau environnante avec un protecteur cutané • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera le contrôle d'humidité					
Fréquence de changements	• Changer le Mesalt aux 24 heures ou plus souvent si saturé (car devient isotonique). • Cesser lorsque l'écoulement n'est plus assez copieux pour saturer le pansement en 24 heures					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

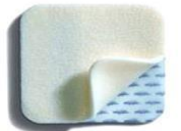
Pansements absorbants : Mousses hydrocellulaires

Cie : Coloplast		Catégorie : pansement absorbant, mousse hydrocellulaire			
Nom du produit					
Biatain					
Mise à jour : 190103					
Caractéristiques	- Mousse de polyuréthane absorbante et perméable à la vapeur d'eau ; assure un drainage optimal des exsudats. - Au contact de l'exsudat, la structure de la mousse tridimensionnelle s'adapte étroitement au lit de la plaie pour assurer une absorption verticale et elle emprisonne les fluides à l'intérieur de sa structure Nécessite une fixation secondaire				
Indications	- Pansement primaire dans les cas de plaies superficielles exsudatives - Pansement secondaire lorsqu'il est utilisé en association avec d'autres produits absorbants ou un hydrogel - Peut être utilisée sous une compression				
Contre-indication	- Allergie ou sensibilité aux composants - Ne pas utiliser en combinaison avec des agents oxydants (ex. : solution d'hypochlorite ou peroxyde d'hydrogène)				
Précaution	Aucune				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	10x10cm	1005132(I)	DE101		
	20x20cm	1049700(I)	DE101		
	10 x 20 cm	1027790 (I)	DE101		
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	- Nettoyer la plaie et la peau environnante ; bien assécher, - Choisir un format de pansement assez grand pour couvrir au moins 2 cm la peau environnante - Poser la face non imprimée sur la plaie - Fixer avec un produit au choix				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place 7 jours, selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Cie : Mölnlycke		Catégorie : Pansement absorbant, mousse hydrocellulaire avec enduit de silicone			
Nom du produit					
Mepilex		Mise à jour : 181230			
Caractéristiques	• Mousse absorbante et perméable à la vapeur d'eau ; n'adhère pas aux plaies humides, mais adhère délicatement à la peau sèche. • Une couche de silicone molle autoadhésive fournit une adhérence micro sélective qui minimise le trauma et la douleur lors du retrait • Nécessite une fixation secondaire • Composition : mousse avec couche de silicone molle				
Indications	• Pansement primaire dans les cas de plaies superficielles exsudatives • Pansement secondaire lorsqu'il est utilisé en association avec d'autres produits absorbants ou un hydrogel • Peut être utilisée sous une compression • Pour plaies entourées d'une peau fragile				
Contre-indication	Ne pas utiliser en combinaison avec des agents oxydants (ex. : solution d'hypochlorite ou peroxyde d'hydrogène)				
Précaution	Aucune				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	10x10cm	1005172 (I)	DE101		
	10x20 cm	1020266 (I)	DE101		
	20x20cm	1019817 (I)	DE101		
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante ; bien assécher, car le Mepilex ne colle pas sur une peau humide. (NB : si un protecteur cutané est appliqué, la couche de silicone perd sa propriété d'adhérence micro sélective sur la peau.) • Choisir un format de pansement assez grand pour couvrir au moins 2 cm la peau environnante, la mousse peut être coupée • Poser la face adhésive sur la plaie, ne pas étirer • Pour panser les extrémités, poser le Mepilex un peu au-dessous du centre de la plaie, pour éviter l'écoulement dû à la force de gravité • Fixer avec un produit au choix				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place 7 jours, selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie				

I = inventaire A = achat direct

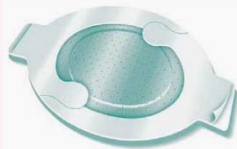
[Retour à la table des matières](#)

Cie : Mölnlycke		Catégorie : Pansement absorbant, mousse hydrocellulaire bordée, avec enduit de silicone				
Nom du produit		 Mise à jour : 190105				
Mepilex border						
Caractéristiques	• Mousse Composée de 5 couches • Une enduction de silicone souple sur un film de polyuréthane • Un coussin souple et absorbant formé de 3 couches : une couche de mousse de polyuréthane, un voile en non tissé en viscose et polyester et un voile super absorbant en fibres de polyacrylate • Un film externe en polyuréthane perméable à la vapeur d'eau et étanche à l'eau • Minimise la douleur et les traumatismes sur les plaies et la peau environnante					
Indications	• Plaies exsudatives ou plaies sèches avec ajout de gels • Pour plaies entourées d'une peau fragile • Traitement prophylactique en prévention des lésions de pression et des phlyctènes postopératoires • Peut être utilisé sous une compression					
Contre-indication	Ne pas utiliser en combinaison avec des agents oxydants (ex. : solution d'hypochlorite ou peroxyde d'hydrogène)					
Précaution	Sensibilité ou allergie à l'un des composants					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	7.5 x7.5 cm	1019688 (I)	DE101			
	10x10cm	1005173 (I)	DE101			
	12.5x12.5 cm	1001405 (I)	DE101			
	15x15 cm	1019689 (I)	DE101			
	15x20 cm	1019778 (I)	DE101			
	16x20 cm (sacrum)	1052010 (I)	DE101			
	22x25 cm (sacrum)	1005442(I)	DE101			
	22 x 23cm (talon)	1022139 (A)			☒	
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante ; bien assécher car le pansement ne colle pas sur une peau humide. (NB : si un protecteur cutané est appliqué, la couche de silicone perd sa propriété d'adhérence micro sélective sur la peau) • Choisir un format de pansement assez grand pour couvrir la peau environnante d'au moins 1 à 2 cm pour les pansements les plus petits (ad 12.5 x 12.5 cm) et d'au moins 5 cm pour les plus grands • Poser la face adhésive sur la plaie, ne pas étirer					
Fréquence de changements	Peut demeurer en place 7 jours, selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Pansements absorbants : Pansements en acrylique transparent

Cie : 3M		Catégorie : Pansement en acrylique transparent			
Nom du produit					
Tegaderm Absorbent		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	• Pansement composé d'un tampon en acrylique entre 2 films adhésifs transparents. Le film en contact avec la plaie est perforé afin de permettre l'absorption de l'exsudat par le tampon acrylique. • Perméable à la vapeur d'eau ; imperméable aux liquides • Pansement primaire ou secondaire				
Indications	• Pansement primaire : ulcère de pression stades I et II, sites donneurs, déchirures cutanées, brûlures superficielles, abrasions, plaies chirurgicales postopératoires • Pansement secondaire : pour cavités avec un produit de remplissage comme un alginate				
Contre-indication	Allergie à l'adhésif				
Précaution	Ne pas couper le pansement				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	7.6 X 9.5 cm	1008674 (I)			☒
	11.1 X 12.7 cm	1008675 (I)			☒
	14.2 X 15.8 cm	1009274 (I)			☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante, bien assécher • Si la peau environnante est fragile, appliquer du Cavilon ou autre film protecteur cutané • Choisir un pansement dont la partie absorbante dépasse la plaie d'au moins 1 cm. Le pansement ne doit pas être coupé, mais peut être chevauché (partie pellicule transparente seulement) • Centrer sur la plaie et lisser du centre vers la périphérie. Éviter d'étirer la plaie ou le pansement POUR LES DÉCHIRURES CUTANÉES : Rapprocher les lèvres de la plaie. Contrôler le saignement. Couvrir du pansement absorbant en acrylique. Laisser en place jusqu'à ce que la plaie soit guérie ou si le pourtour de la plaie présente des S&S d'infection.				
Fréquence de changements	Changer lorsqu'il est saturé, non étanche et si la plaie présente des signes d'infection.				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Pansements absorbants : Coussinets absorbants

Cie : Molnlycke		Catégorie : Coussinet absorbants				
Nom du produit :						
Mesorb						
Mise à jour : 190116						
Caractéristiques	• Coussinets absorbants conçus pour absorber de plus grandes quantités d'exsudats. Le noyau ultra absorbant retient les exsudats. La couche de contact est à faible adhérence • Peut être utilisé comme pansement primaire ou secondaire • Perméable à l'air • Aucun latex					
Indications	• Plaies fortement exsudatives • Plaies difficiles à panser telles que les plaies de formes irrégulières et celles de grandes dimensions					
Contre-indication	Aucune					
Précaution	Les remplacer dès qu'ils sont saturés pour éviter la macération					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	10 X 15 cm	1004892 (I)			☒	
	10 X 20 cm	1045940 (A)			☒	
	15 x 20 cm	1005247 (A)			☒	
	20 X 25 cm	1020641 (A)			☒	
	20 X 30 cm	1009675 (I)			☒	
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante ; bien assécher • Choisir un pansement assez grand pour déborder la plaie de 2 à 4 cm • Appliquer le Mesorb (ne pas superposer les coussinets) • Fixer avec un produit au choix					
Fréquence de changements	Changer selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie.					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Pansements antimicrobiens : À base d'iode

Cie : Acelity/ KCI		Catégorie : Pansement antimicrobien à base de providone iodine			
Nom du produit :					
Inadine		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	- Le pansement non adhérent Inadine est un pansement primaire fait de viscosse tissée imprégnée de 10% de providone iodine. Il contient du polyéthylène glycol et de l'eau purifiée comme ingrédients inactifs. - Pansement à libération lente d'iode - Efficace contre plusieurs agents pathogènes - Uniforme et poreux, permet le drainage d'exsudat - Peut être coupé				
Indications	- Plaie avec exsudat léger à abondant - Plaie aiguë ou chronique avec colonisation critique ou infection, ou en prophylaxie.				
Contre-indication	- Sensibilité à l'iode (connue ou soupçonnée) - Insuffisance rénale - Femmes enceintes ou qui allaitent - Avant ou après l'utilisation d'iode radioactif - Dermatite herpétiforme ou maladie de Duhring-Brocq (maladie de peau très rare)				
Précaution	- Maximum du produit à utiliser par jour : 4 feuilles de 9.5 x 9.5 cm - Problèmes de thyroïde - Enfants de moins de 6 mois - Ne pas utiliser avec une solution d'hypochlorite de sodium				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	5 x 5 cm	1008528 (I)			☒
	9.5 x 9.5 cm	1020820 (I)			☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	- Nettoyer la plaie et la peau environnante, bien assécher - Couper le pansement selon la forme de la plaie afin d'éviter le contact du pansement sur la peau environnante - Appliquer sur la plaie - Recouvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante.				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place 72 heures max. ; changer au besoin selon l'exsudat. Vérifier la coloration du produit, si la couleur orangée devient blanche, le pansement doit être changé, car il n'a plus ses propriétés antiseptiques.				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Cie : Smith & Nephew		Catégorie : Pansement antimicrobien à base de cadexomère d'iode			
Nom du produit :					
Iodosorb		Mise à jour : 190108			
Caractéristiques	- Le cadexomère d'iode est un antimicrobien non cytotoxique à cause de sa structure chimique qui favorise une libération lente d'iode. Il absorbe l'exsudat, forme un gel à la surface de la plaie et aide au débridement autolytique. - Efficace contre plusieurs agents pathogènes - Se présente en onguent ou en pâte - Pansement primaire				
Indications	- Plaie avec exsudat léger à abondant - Plaie avec tissus nécrotiques humides avec colonisation critique ou infection				
Contre-indication	- Sensibilité à l'iode (connue ou soupçonnée) - Problèmes thyroïdiens (hyperthyroïdie, thyroïdite d'Hashimoto, goitre multi nodulaire non toxique) - Femme enceinte ou qui allaite - Insuffisance rénale grave - Thérapie à base de lithium à cause de l'interaction médicamenteuse - Combiné à la thérapie de stimulation électrique - Combiné à l'usage d'antiseptiques - Enfants				
Précaution	Ne pas prolonger le traitement plus de 3 mois à cause de la toxicité du produit. La dose toxique quotidienne est de 50 g et la dose hebdomadaire est de 150 g.				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	Onguent 10 g	Certain formats disponibles en pharmacie	DE 58 x 12 sem.		
	Onguent 20 g		DE 58 x 12 sem.		
	Onguent 40 g		DE 58 x 12 sem.		
	Pâte 5 g	Non disponible	DE 58 x 12 sem.		
	Pâte 10 g	Non disponible	DE 58 x 12 sem.		
Pâte 17 g	Non disponible	DE 58 x 12 sem.			
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	- Nettoyer la plaie et la peau environnante, bien assécher - Onguent : badigeonner l'onguent sur une compresse pour en faciliter l'application ou l'appliquer à l'aide d'une tige montée mouillée ou abaisse langue - Pâte : retirer au préalable la gaze recouvrant les 2 faces de la pâte. Mouler au besoin la pâte en forme de boule pour faciliter son insertion dans une cavité				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place 72 heures max., changer au besoin selon l'exsudat. Vérifier la coloration du produit parce qu'une décoloration indique une libération complète de l'iode, donc une saturation du pansement.				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pansements antimicrobiens : À base de polyhexaméthylène (PHMB)

Cie : Cardinal (Convidien)		Catégorie : Pansement antimicrobien à base de Polyhexaméthylène biguanide (PHMB)			
Nom du produit :					
Mèche / compresse Curity PHMB		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	- Mèche qui contient un agent antimicrobien au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) à une concentration de 0,2%. Il favorise la résistance à la colonisation à l'intérieur du pansement. Il constitue une barrière antimicrobienne pendant 3 jours. - Efficace contre de nombreux agents pathogènes - Peut être coupé - Pansement primaire				
Indications	Pour les plaies aiguës ou chroniques avec colonisation critique ou infection, avec une cavité profonde ou un sinus à combler.				
Contre-indication	- Hypersensibilité ou allergie au PHMB - Brûlure du troisième degré				
Précaution	Ne pas utiliser avec une solution d'hypochlorite				
Disponibilité	Dimensions/Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	0.6 cm x 0.9 m	1008731(A)			☒
	1.3 cm x 0.9 m	1009337(A)			☒
	2.5 cm x 0.9 m	1031881 (A)			☒
	10 x 10 (non-tissé)	1055118 (A)			☒
	11,4 cm x 3,7 m (rouleau)	1051816 (A)			☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	- Nettoyer la plaie et la peau environnante (avec du NaCl), bien assécher - Humidifier la mèche avec du NaCl ou un hydrogel, seulement si la plaie est sèche - insérer la mèche dans la plaie, bourrer lâchement - Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son hydratation				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place maximum 3 jours, selon l'exsudat ou l'état de la plaie				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Cie : Cardinal (Convidien)		Catégorie : Mousse de transfert antimicrobienne à base de Polyhexaméthylène biguanide (PHMB)			
Nom du produit :					
Mousse de transfert PHMB		Mise à jour : 190105			
Caractéristiques	• Mousse de transfert en polyuréthane à alvéoles ouvertes, imbibée de 0.5% de polyhexaméthylène biguanide (PHMB). Il favorise la résistance à la colonisation à l'intérieur du pansement. Il constitue une barrière antimicrobienne pendant 7 jours • Drainage vertical • Efficace contre de nombreux agents pathogènes • Peut être coupé • Peut être utilisé sous compression • Pansement primaire, transfère l'exsudat à un pansement secondaire				
Indications	• Pour les plaies aiguës ou chroniques avec colonisation critique ou infection • Pour plaies avec exsudat modéré à abondant				
Contre-indication	• Hypersensibilité ou allergie au PHMB ou l'un des autres composants • Brûlure du troisième degré				
Précaution	• Ne pas utiliser avec une solution d'hypochlorite				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	5 x 5 cm				☒
	10 x 10 cm				☒
	10 x 20 cm				☒
	15 x 15 cm				☒
	20 x 20 cm				☒
	8.8 x 7.5 cm (fenêtré)				☒
	Disque 7 mm				☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante (avec du NaCl), bien assécher • Appliquer la mousse de transfert, les 2 faces sont identiques • Choisir un format de pansement assez grand pour couvrir au moins 5 cm la peau environnante, la mousse peut être coupée • Appliquer le pansement secondaire au choix				
Fréquence de changements	• Peut demeurer en place jusqu'à 7 jours, selon l'exsudat ou l'état de la plaie • Changer quand la saturation s'étend jusqu'à 1 cm du bord de la mousse				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Cie : Cardinal Health Canada		Catégorie : Gel				
Nom du produit :		 Mise à jour : 190116				
Caractéristiques	- Composition : eau purifiée, Glycérol, Hydroxyéthylcellulose, 0,1% Polyhexanide, 0,1% Bétaïne - Le Polyhexanide limite la prolifération bactérienne et la bêtaïne est un tensio-actif surfactant - Peut rester dans le lit de la plaie plusieurs jours et, par conséquent, permet en nettoyage et débridement en continu - Gel non irritant, indolore. Ne crée pas d'inhibition de la granulation et de l'épithélialisation - Dans de très rares cas, une légère sensation de brûlure est possible après l'application, mais elles disparaissent en quelques minutes - Utiliser en association avec la solution de rinçage Prontosan					
Indications	- Plaies aiguës contaminées par des corps étrangers, débris et micro-organismes - Plaies avec tissus nécrotiques humide et/ou biofilm - Prévention d'un biofilm					
Contre-indication	- Allergie aux composants du produit. Peut provoquer des réactions allergiques telles que des démangeaisons (urticaire) et des éruptions cutanées (exanthème). Dans de rares cas des chocs anaphylactiques ont été rapportés. - Ne pas utiliser sur le SNC ou les méninges, les oreilles moyennes et internes ou les yeux - Son utilisation sur le cartilage hyalin et lors d'opérations aseptiques des articulations est contre-indiquée - Ne pas utiliser avec d'autres savons nettoyants pour plaies, pommades, huiles et enzymes (rincer avant) - Brûlure 3e degré					
Précaution	- Grossesse et allaitement (pas d'études cliniques) - Nouveau-nés et nourrissons (pas d'études cliniques)					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	250 g				☒	
	30 ml (uni-service)				☒	
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	- Nettoyer la peau environnante avec la solution de Prontosan - Appliquer une compresse imbibée de solution Prontosan sur la plaie x 15 min - Appliquer une couche 3-5 mm sur la surface de la plaie ou combler un espace mort (cavité ou sinus) à l'aide d'une mèche ou d'une compresse imbibée de gel - Recouvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante Durée de conservation du flacon après l'ouverture : 8 semaines					
Fréquence de changements	- Préférentiellement quotidiennement, maximum 3 jours. - Après 4 mois, serait moins efficace.					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Cie : Cardinal Health Canada		Catégorie : Solution de rinçage pour plaies			
Nom du produit :					
Prontosan solution nettoyage		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	• Solution de rinçage pour plaies ; présente une excellente activité de nettoyage de la surface de la plaie, à la fois sur les biofilms et les régions difficiles d'accès • Composition : eau purifiée, 0,1% Polyhexanide, 0,1% Bétaïne • Le Polyhexanide limite la prolifération bactérienne et la bêtaïne est un tensio-actif surfactant • Solution non irritante, indolore. Ne crée pas d'inhibition de la granulation et de l'épithélialisation • Dans de très rares cas, une légère sensation de brûlure est possible après l'application, mais elles disparaissent en quelques minutes • La solution peut être utilisée seule ou en association avec le Prontosan woundgel				
Indications	• Plaies aiguës contaminées par des corps étrangers, débris et micro-organismes • Plaies avec tissus nécrotiques humide et/ou biofilm • Prévention d'un biofilm				
Contre-indication	• Allergie aux composants du produit. Peut provoquer des réactions allergiques telles que des démangeaisons (urticaire) et des éruptions cutanées (exanthème). Dans de rares cas des chocs anaphylactiques ont été rapportés. • Ne pas utiliser sur le SNC ou les méninges, les oreilles moyennes et internes ou les yeux • Son utilisation sur le cartilage hyalin et lors d'opérations aseptiques des articulations est contre-indiquée • Ne pas utiliser avec d'autres savons nettoyants pour plaies, pommades, huiles et enzymes (rincer avant)				
Précaution	• Grossesse et allaitement (pas d'études cliniques) • Nouveau-nés et nourrissons (pas d'études cliniques)				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	350 ml				☒
	40 ml (uni-service)				☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la peau environnante avec la solution de Prontosan • Appliquer une compresse imbibée de solution Prontosan sur la plaie x 15 min • Durée de conservation du flacon de 350 ml après l'ouverture : 8 semaines				
Fréquence de changements	• Préférentiellement quotidiennement, lors des changements de pansement • Après 4 mois, serait moins efficace				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pansements antimicrobiens : À base d'argent

Cie : Smith & Nephew		Catégorie : Pansement antimicrobien à base d'argent : compresse				
Nom du produit :						
Acticoat Flex 3		Mise à jour : 190116				
Caractéristiques	• Pansement constitué d'une couche souple de polyester faiblement adhésif, recouverte de nanocristaux d'argent • Pansement primaire • Libération soutenue d'argent jusqu'à 3 jours (aussi Acticoat flex 7, libère jusqu'à 7 jours) • Efficace contre de nombreux agents pathogènes • S'étire pour permettre au patient sa liberté de mouvement • Peut entraîner une décoloration transitoire de la peau • Peut causer une douleur passagère. Peut être atténué en respectant le mode d'application					
Indications	• Plaies aiguës ou chroniques avec colonisation critique ou infection ; exsudat léger à abondant • Peut servir de couche d'interface avec la thérapie à pression négative					
Contre-indication	Hypersensibilité ou allergie à l'argent					
Précaution	• Ne pas l'associer à des produits à base d'huile ou de vaseline ou à d'autres agents antimicrobiens. • À enlever avant les traitements de radiothérapie si la plaie se situe dans le champ de radiation • Ne pas l'utiliser chez un patient qui doit subir une IRM • Éviter le contact des électrodes ou du gel conducteur durant une EEG ou un ECG • Éviter l'exposition à la lumière • N'utiliser chez les prématurés (<37 semaines de gestation) que si les bienfaits cliniques escomptés compensent les risques éventuels ; aucune donnée clinique pour les prématurés et peu de données cliniques pour les nouveau-nés. • Ne pas utiliser sur des organes exposés					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	5x5 cm				☒	
	10x10 cm	1006984 (I)			☒	
	10x20 cm				☒	
	20x40 cm				☒	
	40x40 cm		DE58 x 12 sem.			
	10x120 cm				☒	
	Acticoat flex 7 10 x 12 cm				☒	
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante avec de l'eau stérile, bien assécher • Couper à la taille de la plaie ; peut aussi être utilisé pour combler une cavité • Mouiller avec de l'eau stérile et essorer. Peut aussi être humidifié avec un hydrogel à base d'eau stérile • Pour les plaies superficielles : sans étirer le pansement, appliquer sur la plaie, ne pas faire déborder. Appliquer de sorte que le sens de l'étirement permette le mouvement. • Pour les plaies avec cavité : appliquer dans la plaie, ne pas faire déborder • En présence de douleur suite à l'application de l'Acticoat Flex, refaire le pansement en humidifiant avec un hydrogel. Si la douleur persiste, cesser l'utilisation de l'Acticoat Flex • Couvrir d'un pansement					
Fréquence de changements	Peut demeurer en place 3 jours maximum (jusqu'à 7 jours pour Acticoat Flex 7) selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Cie : Convatec		Catégorie : Fibre gélifiante à base d'argent			
Nom du produit :					
Aquacel AG Extra		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	- Hydrofibre imprégné d'argent ionisé à concentration de 1.2% ; l'argent détruit les bactéries absorbées dans le pansement gélifié - Efficace contre de nombreux agents pathogènes - Par son action antimicrobienne, il atténue également l'odeur associée à l'infection - Grande capacité d'absorption verticale, se gélifie au contact de l'exsudat - Relié à des fibres de renfort pour permettre un retrait plus facile et moins douloureux - Peut être découpé dans tous les sens - Favorise le débridement autolytique et la prolifération des tissus de granulation - Pansement primaire				
Indications	Plaies aiguës ou chroniques avec colonisation critique ou infection ; exsudat léger à abondant				
Contre-indication	- Hypersensibilité ou allergie à l'argent - Brûlure 3^e degré				
Précaution	- Mode d'emploi différent pour brûlure de deuxième degré - Ne pas associer à des produits à base d'huile ou de vaseline - Ne pas combiner à l'électrostimulation - À enlever avant les traitements de radiothérapie, si la plaie se situe dans le champ de radiation - Éviter le contact des électrodes ou du gel conducteur durant un EEG ou ECG				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	5 X 5 cm		DE58 x 12 sem.		
	10 X 10 cm	1005170 (I)	DE58 x 12 sem.		
	15 X 15 cm		DE58 x 12 sem.		
	20 X 30 cm		DE58 x 12 sem.		
	1.8 X 44.5 cm				☒
	1 X 44.5 cm				☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	- Nettoyer la plaie et la peau environnante avec du NaCl, bien assécher - Choisir un format qui couvre 1 cm de peau environnante ; pour les plaies cavitaires, laisser dépasser le ruban de 2.5 cm pour en faciliter le retrait et combler la cavité à 80% - Pour les plaies sèches : placer le pansement Aquacel Ag sur la plaie et humecter avec du NaCl le site de la plaie seulement - Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante - Garder le pansement à l'abri de la lumière une fois qu'il est ouvert				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place maximum 7 jours, selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie.				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Cie : Convatec		Catégorie : Fibre gélifiante à base d'argent				
Nom du produit :						
Aquacel AG+ Extra		Mise à jour : 181230				
Caractéristiques	• Pansement stérile non tissé et fabriqué avec deux couches de carboxyméthylcellulose sodique imprégnée de 1.2 % d'ions d'argent • Présence de sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et de chlorure de benzéthonium et renforcé par des fibres de cellulose régénérées. • Absorbe de grandes quantités de liquides et de bactéries des plaies • Il crée un gel cohésif doux qui épouse étroitement la surface de la plaie • Le pansement perturbe et absorbe le biofilm, prévient sa formation et sa reformation • Il accroît l'efficacité du transfert de l'argent aux micro-organismes • Pansement peut être découpé.					
Indications	• Plaies aiguës ou chroniques avec colonisation critique ou infection ; exsudat léger à abondant • Plaies cancéreuses exsudatives					
Contre-indication	• Sensibilité ou allergie aux composantes • Brûlure 3^e degré					
Précaution	N/A					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	5x5 cm		DE58 x 12 sem.			
	10x10 cm	1010466 (I)	DE58 x 12 sem.			
	15x15 cm	1046708 (I)	DE58 x 12 sem.			
	20x30 cm		DE58 x 12 sem.			
	1 x 45 cm				☒	
	2 x 45 cm				☒	
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante, bien assécher • Choisir un format qui couvre 1 cm de peau environnante ; pour les plaies cavitaires remplir seulement un maximum de 80 % de la cavité • Pour les plaies sèches : placer le pansement Aquacel Ag + extra sur la plaie et humecter avec du NaCl le site de la plaie seulement • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante					
Fréquence de changements	Peut demeurer en place maximum 7 jours, selon la quantité d'exsudat et l'état de la paie.					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Cie : Smith & Nephew		Catégorie : Produit de sulfadiazine d'argent (crème)			
Nom du produit :					
Flamazine		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	- Le mécanisme d'action antibactérienne de la sulfadiazine d'argent n'a pas encore été complètement élucidé. Il réduit la viabilité des souches sensibles due à l'entrave de la synthèse macromoléculaire. La portion de sulfadiazine possède également une action bactériostatique contre les micro-organismes sensibles - Chez l'adulte, jusqu'à 10% de la sufadiazine peut être absorbée, dont 60 à 85% excrétée dans l'urine. Chez les enfants dont les brûlures couvrent 13% de la surface corporelle, la concentration de sulfadiazine dans l'urine était de 31.8 mg/L - La Flamazine peut altérer l'apparence des plaies et ralentir le détachement de l'escarre dans les cas de brûlures. Les tissus non viables et les kératinocytes peuvent devenir grisâtres.				
Effets secondaires	- Des réactions telles que sensation de brûlure, démangeaison et rash (eczéma ou dermatite) peuvent se manifester chez environ 2 % des patients - Leucopénie (utilisation sur une grande surface), argyrie, absorption de sulfamides				
Indications	- Brûlures mineures ou graves - Ulcères de jambe peu à modérément exsudative - Diverses plaies mineures				
Contre-indication	- Femmes enceintes arrivées à terme - Prématurés, nouveau-nés des premiers mois de vie - Sensibilité ou allergie à l'un des composants - Ne pas appliquer au visage				
Précaution	- Employer avec prudence chez les patients présentant des antécédents de déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase - Employer avec prudence chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique ou rénale importante - L'innocuité chez la femme enceinte ou qui allaite n'a pas été établie - Ne pas utiliser avec des agents de débridement enzymatique - Une concentration sérique de sulfadiazine se rapprochant des conc. thérapeutiques, l'action des hypoglycémiants et de la phénytoïne par voie orale peut être activée				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	20 g (tube)				☒
	50 g (tube)	(I) pharmacie			☒
	500 g (pot)				☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	- Nettoyer la plaie et la peau environnante avec une solution de NaCl, bien assécher - Appliquer une couche de 3 à 5 mm de Flamazine sur la surface de la plaie (pour les ulcères de jambes, s'assurer de ne pas appliquer sur les régions saines) - Recouvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante - Le tube doit être jeté 7 jours après l'ouverture - Le pot doit être jeté 24 heures après l'ouverture (pour assurer la stérilité)				
Fréquence de changements	- Pour les brûlures : refaire au moins toutes les 24 heures - Pour les ulcères de jambe : refaire aux 2 à 3 jours				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Cie : Coloplast		Catégorie : Textile anti microbien à base d'argent			
Nom du produit :					
InterDry AG		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	• Textile avec complexe d'ions d'argent (0.019%). Réduit la colonisation microbienne à l'intérieur du textile. Le tissu attire l'humidité et garde la peau au sec. Il réduit aussi la friction de la peau. • Peut causer une coloration passagère de la peau • Aucun latex				
Indications	Intertrigo des plis cutanés				
Contre-indication	• Sensibilité ou allergie à l'argent • Ne pas placer directement sur une plaie ouverte • Ne doit pas être utilisé comme barrière contre l'urine ou les selles				
Précaution	• L'utilisation sécuritaire durant la grossesse, l'allaitement et chez les enfants n'a pas été démontrée • L'utilisation de barrières occlusives (crème, onguent, pâte) conjointement avec le textile peut réduire l'efficacité du produit • Ne pas combiner à l'électrostimulation • À enlever avant les traitements de radiothérapie si la plaie se situe dans le champ de radiation • Ne pas utiliser chez un patient qui doit subir une IRM • Éviter le contact des électrodes ou du gel conducteur durant un EEG ou ECG				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	25 x 366 cm Rouleau non stérile	1030392 (A)			☒
	25 x 91.4 cm stérile				☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Couper le tissu à la longueur appropriée en estimant 5 cm de tissu exposé à l'air de chaque côté du repli cutané pour permettre l'évaporation de l'humidité • Soulever la peau et insérer un côté du tissu jusqu'au fond du repli cutané. Laisser déborder de 5 cm de chaque côté • Nettoyer et inspecter quotidiennement la peau • Si une infection fongique n'est pas résolue après 5 jours, une poudre antifongique peut être ajoutée				
Fréquence de changements	Remplacer l'InterDry Ag s'il devient souillé ou après 5 jours				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Cie : Molnlycke		Catégorie : Pansement antimicrobien à base d'argent : mousse				
Nom du produit :						
Mepilex Ag		Mise à jour : 190116				
Caractéristiques	• Mousse siliconée autoadhésive avec des ions d'argent libérés au contact de l'humidité jusqu'à 7 jours (se dispersent dans le pansement et dans la plaie) • Efficace contre plusieurs agents pathogènes • Pansement primaire • Réduit le risque de coloration périlésionnelle • Réduit le traumatisme et la douleur lors du retrait					
Indications	Plaies aiguës ou chroniques avec colonisation critique ou infection, avec exsudat modéré à abondant					
Contre-indication	• Hypersensibilité ou allergie à l'argent • Plaie sèche ou peu exsudative					
Précaution	• Ne pas l'utiliser chez un client qui doit subir une IRM • Éviter le contact des électrodes ou du gel conducteur durant un EEG ou un ECG • Ne pas l'utiliser en combinaison avec des agents antioxydants (ex. : solution d'hypochlorite ou peroxyde d'hydrogène) • Ne pas l'utiliser durant la radiothérapie • Ne pas l'associer à des produits à base d'huile ou de vaseline • Ne pas combiner à l'électrostimulation					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	10 X 10 cm		DE58 x 12 sem.			
	10 X 20 cm		DE58 x 12 sem.			
	15 X 15 cm		DE58 x 12 sem.			
	20 X 20 cm		DE58 x 12 sem.			
	20 x 50 cm		DE58 x 12 sem.			
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante avec une solution de NaCl, bien assécher • Choisir un format qui couvre au moins 2 cm la peau environnante, la mousse peut être coupée • Poser la face adhésive sur la plaie, ne pas étirer. Pour panser les extrémités, poser le pansement un peu au-dessous du centre de la plaie • Fixer avec un produit au choix					
Fréquence de changements	Peut demeurer en place maximum 7 jours, selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie.					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Cie : Acelity/ KCI		Catégorie : Pansement à l'argent (bio-actif)			
Nom du produit :					
Prisma		Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	Matrice composée de 45% de cellulose oxydée régénérée, de 55% de collagène et de 0.25% d'argent. Il permet de rééquilibrer et de moduler l'environnement hostile des plaies chroniques qui est défavorable à la cicatrisation. Il inactive les métalloprotéases matricielles (MPM) trouvées en quantité excessive dans les plaies chroniques. L'absorption du Prisma dans la plaie entraîne une inactivation des protéases, une réduction des taux de cytokines inflammatoires et une protection des facteurs de croissance. Les ions d'argent ont une activité antimicrobienne. Il se transforme en un gel malléable absorbé par le lit de la plaie et favorise la prolifération des tissus de granulation.				
Indications	• Plaies chroniques • Plaies exsudatives • Plaies stagnantes • Peut être utilisé sous compression				
Contre-indication	• Présence d'escarre ou de tissus nécrotiques • Brûlure 3° degré • Hypersensibilité aux produits bovins ou aux composants du produit • Hypersensibilité ou allergie à l'argent				
Précaution	Débrider la plaie avant l'application				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	28 cm²	1050608 (A)			☒
	123 cm²				☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante avec NaCl, bien assécher • Découper le pansement en respectant la forme de la plaie • Appliquer le Prisma directement sur la plaie, ne pas faire déborder. Si la plaie est peu exsudative ou sèche, hydrater le Prisma avec du NaCl • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante • Ne pas enlever les résidus du pansement lors d'une nouvelle application				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place maximum 3 jours, selon la quantité d'exsudat.				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Cie : Acelity/ KCI		Catégorie : Pansement antimicrobien à base d'argent, alginate			
Nom du produit : Silvercel		 Mise à jour : 190116			
Caractéristiques	• Composé de CMC, d'alginate et de 8% d'argent (libération continue sur 7 jours) • Absorbe l'exsudat, non dissoluble • Efficace contre plusieurs agents pathogènes • Pansement primaire • Favorise l'hémostase • Ne tâche pas la plaie ni les tissus environnants • Favorise le débridement autolytique et la prolifération des tissus de granulation				
Indications	• Plaies aiguës ou chroniques avec colonisation critique ou infection • Plaies avec exsudat modéré à abondant				
Contre-indication	• Hypersensibilité ou allergie à l'argent ou aux alginates • Plaies sèches ou avec peu d'exsudat • Plaies avec sinus étroit ou cavité profonde ne permettant pas de visualiser le fond ou difficiles d'accès • Brûlure 3° degré				
Précaution	• Ne pas l'associer à des produits à base d'huile ou de vaseline ou à d'autres agents antimicrobiens • Ne pas combiner à l'électrostimulation • À enlever avant les traitements de radiothérapie, si la plaie se situe dans le champ de radiation • Ne pas utiliser chez un patient qui doit subir une IRM • Éviter le contact des électrodes ou du gel conducteur durant un EEG ou ECG				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	5 X 5 cm		DE58 x 12 sem.		
	11 X 11 cm	1009315 (A)	DE58 x 12 sem.		
	10 X 20 cm		DE58 x 12 sem.		
	2.5 X 30.5 cm				☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante avec du NaCl, bien assécher • Appliquer sur le lit de la plaie ou combler la cavité (peut se couper) • Lorsque l'état de la plaie s'améliore et que les exsudats diminuent, humecter le pansement avec du NaCl avant l'application. • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante • Au retrait, si la plaie apparaît sèche, saturer le pansement avec du NaCl avant son retrait				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place maximum 7 jours, selon l'exsudat et l'état de la plaie.				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pansements antimicrobiens : À base de miel

Cie : Integra		Catégorie : Pansement antimicrobien à base de miel				
Nom du produit :						
Medihoney		Mise à jour : 190116				
Caractéristiques	• Pansement en tulle : pansement stérile non adhérent qui contient 85% de miel Leptospermum (Manuka) imprégné dans une gaze d'acétate à 3 plis. • Tube : contient 100% de miel Leptospermum (Manuka). • Favorise le débridement autolytique et la prolifération des tissus de granulation • Efficace contre de nombreux agents pathogènes et contre les biofilms • Possède une action osmotique qui contribue à nettoyer la plaie (via le sucre) • Anti-inflammatoire • Abaisse le pH de la plaie (3.5 à 4.5), ce qui contribue à diminuer la prolifération bactérienne • Contribue à diminuer les odeurs • Pansement primaire					
Indications	• Pour les plaies aiguës ou chroniques avec colonisation critique ou infection • Tube : Plaies avec exsudat léger à modéré • Tulle : plaie sèche à exsudat abondant					
Contre-indication	• Hypersensibilité à l'un des composants • Brûlure 3° degré					
Précaution	Certains patients peuvent ressentir une certaine gêne ou un tiraillement au moment de l'application. Cette sensation ne dure pas. Si cette gêne atteint un niveau intolérable, cesser l'utilisation du produit et laver la zone affectée.					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	Tulle 10 x 10 cm (DUP 796)	1051996 (A)			☒	
	Alginate 10 x 10 cm (DUP795)				☒	
	Tube 20 g (DUP398)	1051995 (A)			☒	
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante avec du NaCl, bien assécher • <u>Tube</u> : ○ Pour les plaies superficielles : appliquer sur le lit de la plaie une couche de 3 mm ○ Pour les plaies profondes : combler l'espace mort (cavité ou sinus) à l'aide d'une mèche ou d'une compresse imbibée de miel • <u>Tulle</u> : ○ Protéger au besoin la peau environnante. Appliquer le tulle au fond de la plaie (peut être plié ou coupé) • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son hydratation					
Fréquence de changements	• <u>Tube</u> : Peut demeurer en place généralement 1 à 3 jours, maximum 7 jours, selon l'exsudat ou l'état de la plaie • <u>Tulle</u> : Doit être changé lorsque le miel est dissout par l'exsudat de la plaie, maximum 7 jours.					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pansements antimicrobiens : À base de violet de gentiane et de bleu de méthylène

Cie : Appulse Medical		Catégorie : Pansement antimicrobien à base de violet de gentiane et de bleu de méthylène : mousse			
Nom du produit :					
Hydrofera Blue classic		Mise à jour : 181228			
Caractéristiques	• Pansement en mousse absorbant, bactériostatique, constitué d'une éponge d'alcool polyvinylique, de bleu de méthylène (≤0.00025 g/g) et de violet cristallisé (≤0.00025 g/g). Il aspire l'exsudat chargé de bactéries et l'éloigne de la surface de la plaie. • Fournit une couverture bactériostatique qui peut aider à prévenir l'infection • Efficace contre plusieurs agents pathogènes (bactéries/levures) • Pansement primaire, peut être coupé • Compatible avec les produits de débridement enzymatique • Ne nuit pas aux facteurs de croissance • Aplanit les bords de plaie				
Indications	• Plaies aiguës ou chroniques avec colonisation critique ou infection. • Biofilm suspecté • Exsudat modéré ou abondant, plaie profonde, tunnalisée ou superficielle, avec ou sous tissus nécrotiques. • Bords soulevés				
Contre-indication	• Brûlure du 3^e degré • Sensibilisation ou allergie à l'un des composants • Ne pas utiliser en combinaison avec des agents oxydants (ex.: solution d'hypochlorite ou peroxyde)				
Précaution	En cas de dessiccation du pansement, réhydrater avec une solution de NaCl ou d'eau stérile				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	5x5 cm				☒
	10x10 cm	1009751			☒
	15x15 cm				☒
	Disque stomie				☒
	tunnel 9 mm				☒
	10 x 10 cm super absorbant				☒
	15 x 15 cm super absorbant				☒

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

APPLICATIONS	
Mode d'emploi	<u>Compresse :</u> • Nettoyer la plaie et la peau environnante avec du NaCl, bien assécher • Humidifier le pansement avec du NaCl, le presser pour éliminer l'excédent de liquide • Appliquer sur le lit de la plaie ou combler la cavité (peut se couper, peut se superposer). En présence d'érythème péri-lésionnelle ou de bords roulés, le pansement peut déborder de la plaie. • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante <u>Pansement tunnel :</u> • Nettoyer la plaie et la peau environnante avec du NaCl, bien assécher • Humecter l'extrémité du pansement tunnel avec du NaCl ou de l'eau stérile pour faciliter l'insertion. • Insérer doucement l'extrémité humide dans le canal de la plaie. Au besoin, utiliser un écouvillon rigide pour en faciliter l'insertion. Laisser dépasser de 1 cm. Une fois inséré, humecter la partie rigide du pansement jusqu'à ce qu'elle soit humide. • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante
Fréquence de changements	• Changer le pansement tous les 1 à 3 jours. Il doit être remplacé s'il devient blanc. • Le premier changement de pansement doit être fait après 24 h. Par la suite, ajuster la fréquence selon la couleur du pansement. • Ne pas laisser le pansement sécher complètement. Réhydrater le pansement en fonction de besoins selon la quantité drainé

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Pansements antimicrobiens : Par micro-attraction

Cie : BSN Medical		Catégorie : Pansement antimicrobien par micro attraction				
Nom du produit :		 Mise à jour : 181228				
Cutimed Sorbact						
Caractéristiques	• Composé d'une trame coton ou acétate imprégnée de DACC (chlorure de diaky carbamoyle), un produit hautement hydrophobe qui capte rapidement et de manière irréversible les micro-organismes. La plupart des micro-organismes susceptibles d'entraver le processus de cicatrisation sont hydrophobes. • Le mode d'action étant physique, il ne peut créer de résistance bactérienne ou fongique.					
Indications	• Plaies aiguës ou chroniques avec colonisation critique ou infection • Plaies modérément à fortement exsudative • Peut être utilisé avec un gel amorphe si la plaie est trop sèche • Plaies avec ou sans tissus nécrotiques humides • Pour plaies profondes ou superficielles					
Contre-indication	Ne pas utiliser en combinaison avec des substances grasses ou des crèmes					
Précaution	Aucune					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	7x9 cm (compresse)				☒	
	10x10 cm (compresse)				☒	
	10x20 cm Compresse				☒	
	4x6 cm (gaze)				☒	
	7x9 cm (gaze)	1051999 (A)			☒	
	2x50 cm (mèche)				☒	
	5x200 cm (mèche)				☒	
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante avec du NaCl, bien assécher • Appliquer le pansement de façon à assurer un contact direct avec la surface de la plaie (côté vert) • Si des mèches ou compresses sont insérées, les faire dépasser à l'extérieur de la plaie pour pouvoir être retirées facilement • Si la plaie est sèche, avec peu ou pas d'exsudat, utiliser un peu de gel amorphe avant d'appliquer le Sorbact • Le pansement Sorbact peut être en contact avec la peau environnante • Couvrir d'un pansement secondaire au choix et fixer					
Fréquence de changements	Tous les 1 à 3 jours, selon l'état de la plaie.					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pansement bioactifs : Matrice à effet anti-protéases

Cie : Acelity/ KCI		Catégorie : Pansement bio-actif			
Nom du produit :		 Mise à jour : 190116			
Promagran					
Caractéristiques	Pansement composé de 45% de cellulose oxydée régénérée et de 55% de collagène. Il permet de rééquilibrer et de moduler l'environnement hostile des plaies chroniques qui est défavorable à la cicatrisation. Il inactive les métalloprotéases matricielles (MPM) trouvées en quantité excessive dans les plaies chroniques. L'absorption du Promogran dans la plaie entraîne une inactivation des protéases, une réduction des taux de cytokines inflammatoires et une protection des facteurs de croissance. Il se transforme en un gel malléable absorbé par le lit de la plaie et favorise la prolifération des tissus de granulation.				
Indications	• Plaies chroniques • Plaies exsudatives • Plaies stagnantes • Peut être utilisé sous compression				
Contre-indication	• Présence d'escarre ou de tissus nécrotiques • Plaies infectées • Brûlures profondes • Hypersensibilité ou allergie aux produits bovins ou aux composants du produit				
Précaution	Débrider la plaie avant l'application				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	28 cm²				☒
	123 cm²				☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante avec NaCl, bien assécher • Découper le pansement en respectant la forme de la plaie • Appliquer le Promogran directement sur la plaie, ne pas faire déborder. Si la plaie est peu exsudative ou sèche, hydrater le Promogran avec du NaCl • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante • Ne pas enlever les résidus du pansement lors d'une nouvelle application				
Fréquence de changements	Peut demeurer en place maximum 3 jours, selon la quantité d'exsudat.				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pansements bioactifs : Matrice extracellulaire

Cie : Smith & Nephew		Catégorie : Matrice extracellulaire				
Nom du produit :						
Oasis		Mise à jour : 190114				
Caractéristiques	• Matrice extracellulaire naturelle (MEC) ; intacte et tridimensionnelle Biomatériau naturel prélevé dans la sous-muqueuse de l'intestin grêle du porc. Conserve son architecture d'origine et sa composition interstitielle pour la croissance de nouvelles cellules • Composée de collagène, de fibronectine, de glycosaminoglycanes et de protéoglycanes. Contient aussi des facteurs de croissance • Remplace la MEC manquante ou inefficace ; favorise l'adhérence des cellules en formant un échafaud ; favorise la prolifération des tissus ; finit par être absorbée et par remplacer le tissu hôte • Peut être utilisé sous compression					
Indications	Pour les plaies difficiles à guérir ; pour plaies sans tissus dévitalisés					
Contre-indication	• Sensibilité ou allergie aux composants (dont porcin) • Brûlures profondes • Plaies avec exsudat abondant, saignement, œdème important, infection					
Précaution	Aucune					
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	Avec fenêtre					
	3 x 3.5 cm				☒	
	3 x 7 cm				☒	
	7 x 10 cm				☒	
	7 x 20 cm				☒	
	Maillé					
	7 x 10 cm	1055107 (A)			☒	
	7 x 20 cm				☒	
	7 x 20 cm (bilaminé)				☒	
APPLICATIONS						
Mode d'emploi	Se référer à la monographie					
Fréquence de changements	Se référer à la monographie					

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pansement avec médication

Cie : Coloplast		Catégorie : Pansement avec médication			
Nom du produit :		 Mise à jour : 190114			
Caractéristiques	• Pansement hydrocellulaire constitué d'une mousse de polyuréthane contenant de l'Ibuprofène (0.5 mg/cm²) dispersé de façon homogène dans la mousse. Au contact de l'exsudat l'Ibuprofène est libéré dans le lit de la plaie • Recouvert d'un film perméable à l'air et imperméable à l'eau • Le Biatain IBU Soft-Hold (Contact) a un ajout d'une couche micro-adhérente • Peut être utilisé sous compression				
Indications	Plaies exsudatives non infectées				
Contre-indication	• Sensibilité ou allergie à l'un des composants • Femmes enceintes • Enfant moins de 12 ans sauf avis contraire du médecin • Biatain IBU Soft-Hold (Contact) ne peut être appliqué sur un site donneur				
Précaution	• Ne pas dépasser la dose quotidienne indiquée : 2400 cm² • Surface maximale 1200cm² (ex. 3 pansements 20 x 20 cm) • Ne pas l'utiliser en combinaison avec des agents antioxydants (ex. : solution d'hypochlorite ou peroxyde d'hydrogène) • Entreposer en position horizontale et conserver à l'abri de la lumière • À retirer lors d'exposition à des radiations (radiographie, échographie, diathermie, microondes ou IRM)				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.
	Non adhésif				
	10 x 10 cm				☒
	10 x 20 cm				☒
	15 x 15 cm				☒
	20 x 20 cm				☒
	Soft-hold (contact)				
	10 x 10 cm				☒
	10 x 20 cm				☒
APPLICATIONS					
Mode d'emploi	• Nettoyer la plaie et la peau environnante avec NaCl, bien assécher • Choisir un pansement dont la mousse dépasse les bords de la plaie d'au moins 2 cm. Pour les pansements de petite taille, un dépassement de 1 cm suffit • Si la plaie est peu exsudative, le pansement peut être humidifié avec du NaCl avant l'application • Couvrir d'un pansement secondaire qui maximisera son action hydratante				
Fréquence de changements	Peut être laissé en place jusqu'à 7 jours, selon la quantité d'exsudat et le type de plaie				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Pansements post-op

Cie : MÔlnlycke		Catégorie : Pansement post-op				
Nom du produit :		 Mise à jour : 190104				
Caractéristiques		• Composé d'une compresse absorbante en non tissé 100% viscose recouverte d'un voile en polymère hypo adhérent. • Le support adhésif en polyester est perméable à l'air, imperméable à l'eau.				
Indications		• Pour les plaies avec exsudat faible à modéré • Plaies chirurgicales, coupures, écorchures				
Contre-indication		Hypersensibilité ou allergie aux masses adhésives acryliques				
Précaution		Peau très fragile				
Disponibilité	Dimensions/ Formats	# magasin (I/A)	RAMQ Méd. d'exc.	RAMQ	Ø Remb.	
	6 x 7 cm	1027703 (I)			☒	
	9 x 10 cm	1031225 (I)			☒	
	9 x 15 cm	1027704 (I)			☒	
	9 x 20 cm	1001436 (I)			☒	
	9 x 25 cm	1020900 (I)			☒	
	9 x 30 cm	1001435 (I)			☒	
APPLICATIONS						
Mode d'emploi		• Nettoyer la plaie et la peau environnante, bien assécher • Choisir un format de pansement assez grand pour couvrir au moins 2 cm la peau environnante • Appliquer la face adhésive sur la plaie, lisser fermement les bords adhésifs sur la peau. Ne pas étirer le pansement lors de l'application. • Lors du retrait, tirer lentement le pansement par un côté dans le sens de la pousse des poils et parallèlement à la peau				
Fréquence de changements		En fonction de l'état de la plaie				

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Liste des pansements pour la thérapie par pression négative :

Thérapie VAC (maj 200609)

Nom du produit	Code 3M/ KCI	# approv. CISSS-MO	Coût unitaire
Location d'une unité Acti VAC		1006796	75.00/ jour
Location d'une unité VAC Ulta		1041421	75.00/ jour
Trousse de pansement Granufoam, petit	M8275051/5.S	1045340	269.00/5 unités
Trousse de pansement Granufoam, moyen	M8275052/5.S	1037675	350.00/ 5 unités
Trousse de pansement Granufoam, grand	M827053/5.S	1051924	390.00/ 5 unités
Trousse de pansement Granufoam, très grand			
Trousse de pansement Granufoam silver, petit	M8275098-10	1005751	506.00/ 10 unités
Trousse de pansement Granufoam silver, moyen	M8275096-10	1020462	582.12/ 10 unités
Trousse de pansement Granufoam silver, grand	M8275099-5	1005952	733.32/ 10 unités
Mousse blanche 10x7.5 cm seulement	M6275033/10.S	1020257	232.00/10 unités
Mousse blanche 10x15 cm seulement	M6275034/10.S	1006674	331.00/ 10 unités
Trousse de pansement Granufoam Simplace petit	M8275046/5.S	1008158	210.00/ 5 unités
Trousse de pansement Granufoam Simplace moyen	M8275045/5.S	1020910	268.00/ 5 unités
Mousse VAC Veraflo, grand	ULTVFLO5LG	1022673	725.91/ 5 unités
Mousse VAC Veraflo, moyen	ULTVFL005MD	1011399	615.18/ 5 unités
Mousse VAC Veraflo, petit	ULTVFLO5SM	1044524	547.79/ 5 unités
Mousse moyenne Veraflo Clean Choice	ULTVCC05MD.S	1013086	695.00/5 unités
Mousse large Veraflo Clean Choice	ULTVCC05LG.S	1061321	1100.00/ 5 unités
Cassette pour Veraflo et Clean Choice	ULTDUO0500	1011400	375.00/5 unités
Réservoir VAC Ulta 1000 ml		1011466	384.00/ 5 unités
Réservoir VAC Ulta 500 ml	M8275063/10.S	1020665	415.00/ 10 unités

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Réservoir ActiVAC 300 ml	M827058/5.S	1040843	218.75/ 5 unités
Champ adhésif VAC	M6275009/10	1030504	
Connecteur en Y TRAC VAC	M6275066/10.S	1019780	
Tubulure (tampon) Sensa TRAC uniquement	M8275057/10.S	1019781	

Technique standard/Plaie infectée ou colonisée/Thérapie Veraflo

[Retour à la table des matières](#)

Thérapie VAC Prevena (pour salle d'opération seulement)

Nom du produit	Code 3M/KCI	Numéro approvisionnement	Coût
Prevena (Peel and place) Pansement de 20 cm A/réservoir	PRE1001.S	1041823 1044520	425.00\$
Prevena plus Pansement de 90 cm A/réservoir	PRE4001CA	1044521	595.00\$
Pansement abdominal ABTHERA mousse polyuréthane	ABT1055.S	1009107	3300.00

PICO (maj 14027)

Nom du produit	Code S & N	Numéro approv.	Coût unitaire
Trousse PICO 7 10x20 cm (contient 1 pompe et 2 pansements) Kit 7 jours	181-66802012	1064616	585\$13 = 195\$ l'unité
Trousse PICO 7 15x15 cm (contient 1 pompe et 2 pansements) Kit 7 jours	181-66802015	1060261	
Trousse PICO 15x20 cm (contient 1 pompe et 2 pansements) Kit 7 jours	181-66802016		
Trousse PICO 15x30 cm (contient 1 pompe et 2 pansements) Kit 7 jours	66800956		
Trousse PICO 20x20 cm (contient 1 pompe et 2 pansements) Kit 7 jours	66800957		
Trousse PICO 25x25 cm (contient 1 pompe et 2 pansements) Kit 7 jours	66800958		

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Gaze PHMB 15x17 cm	66801019		4.90\$
Pansement de fixation en gel 10x7cm	66801082		4.59\$
Mousse noire 10x12.5x1.5 cm	66801021		9.50\$

[Retour à la table des matières](#)

Nanova

Nom du produit	Code Acelity KCI	Numéro approv.	Coût unitaire
Pompe Nanova		1041830	143.00\$
Nanova small (18x 14 cm)		1041830	103.55 \$
Nanova médium (18 x 18 cm)		1041832	84.00\$
Nanova large (18x 28 cm)		1040834	119.90\$

[Retour à la table des matières](#)

Bandages de compression :

Code de produits des bandages de compression (maj 181218)

Nom du produit	Code de produit de la compagnie	Code de produit CISSMO
Coban 2 ,	3M : 2094N	
Coban 2 lite	3M : 2794N	
Comprilan; 10 cm x 5 m	BSN Medical 0102800	
Jobst Compri2	BSN : 7627100	
Jobst Compri2 Lite	BSN : 2794N	
Profore 3 couches, sans latex	Smith&Nephew : 66000771	
Profore 3 couches, avec latex	Smith&Nephew : 66000415	
Profore 4 couches, sans latex	Smith&Nephew : 66000770	
Profore 4 couches, avec latex	Smith&Nephew : 66000016	
SurePress bandage	Convatec : 650947	
SurePress bandage absorbant (ouaté)	Convatec	
Tubigrip B	Mölnlycke : 1436	
Tubigrip C	Mölnlycke : 1443	1009857 (I)
Tubigrip D	Mölnlycke : 1437	1004100 (I)
Tubigrip E	Mölnlycke : 1434	1006481 (I)
Tubugrip F	Mölnlycke : 1438	1005715 (I)
Tubigrip G	Mölnlycke : 1439	

I = inventaire A = achat direct

[Retour à la table des matières](#)

Comprilan

Comprilan®

Bandage de compression à courte élasticité

Gestion des ulcères
veineux de la jambe

Technique d'application

Remarques générales

- La pose d'un bandage de compression nécessite un diagnostic différentiel préalable et la présence d'un indice de pression tibio-brachiale (IPTB) supérieur à 0,8 dans le but d'exclure toute maladie artérielle ou vasculaire sous-jacente. Le bandage à élasticité courte peut être utilisé en présence d'ulcération mixte avec un IPTB supérieur à 0,8, mais avec d'extrêmes précautions.
- Informez vos patients des signes et symptômes révélateurs de problèmes potentiels et dites-leur ce qu'ils doivent faire si ceux-ci se produisent.

Application

- Recouvrez toute plaie ouverte avec un (des) pansement(s) adéquat(s).
- Le pied du patient doit être fléchi à 90 degrés.
- Déterminez le nombre de rouleaux de bandage Comprilan® nécessaires en mesurant la circonférence de la cheville: si la mesure est > 26 cm, utilisez 2 rouleaux; si la mesure est ≤ 26 cm, utilisez 1 rouleau.



1

La largeur de bandage Comprilan® 10 cm est appropriée dans la majorité des cas. Au besoin, déterminez la largeur adéquate du 1^{er} rouleau en fonction de la largeur de la cheville à la hauteur des malléoles, puis du 2^e bandage en fonction de la partie la plus large du mollet.



2

Note:
L'utilisation de bandage tubulaire et de queue est optionnelle. Posez le premier bandage de compression Comprilan® sur le pied, parallèle à la base des orteils.



3

Commencez à enrouler le bandage de compression à partir du côté interne de l'articulation basale des orteils vers la face latérale du pied; faites un ou deux tours, dépendamment de la taille du pied. Posez le bandage par-dessus le point d'insertion du tendon d'Achille,...



4

... ce qui enveloppera la moitié du talon. Faites passer le bandage de l'intérieur à l'extérieur de la cheville, pour recouvrir l'autre moitié de la cheville et atteindre la voûte plantaire. Toute la cheville sera ainsi enveloppée. Le talon doit être complètement recouvert.



5

Continuer l'enveloppement en spirale en montant le long de la jambe avec un chevauchement de 50 % et un étirement de 50 % du bandage.



6

Assurez-vous de poser le bandage de façon uniforme dans le sens de sa largeur. Si un deuxième bandage doit être fait, commencez à la cheville et posez-le en spirale dans la direction opposée.



7

Terminez le bandage Comprilan® à une largeur d'environ deux doigts sous le genou. S'il reste un peu de bandage, déroulez-le simplement le long de la jambe sans l'étirer. Fixer avec un ruban adhésif tel que Leukoplast® Stick.



8

Vous pouvez utiliser un bandage non élastique tel que Elastix® Cohésive ou un fil pour recouvrir le Comprilan pour l'empêcher de descendre. Des bandes de diachylon tout le long du bandage de chaque côté et au talon peuvent aussi être utilisées.

BSN medical
Service à la clientèle 1-877-978-5528

[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Profore Lite

Technique de pose PROFORE[◊] Lite

- Système de compression à trois couches
- Le seul système de compression qui permet de traiter aussi bien les ulcères artérioveineux (indice de pression systolique de 0,6 à 0,8) que les ulcères veineux
- Compression réduite : 23mmHg
- Bandez la jambe en maintenant le pied à angle droit



PROFORE[◊] WCL
Interface de viscose
non adhérente



Retirez le pansement de son emballage et appliquez à l'aide de pinces stériles directement au contact de la plaie si elle est peu exsudative.



PROFORE[◊] #1
Bande de rayonne

- absorbe l'exsudat
- protège les saillies osseuses



Appliquez de manière aussi lisse et uniforme que possible, sans l'étirer. Commencez à la base des orteils et effectuez 2 tours d'ancrage autour du pied.



Remontez derrière le tendon d'Achille. Veillez à ce que le talon soit entièrement recouvert.



Appliquez la bande en **spirale** en assurant un chevauchement de 50% de la spire précédente.



Remontez sur la jambe et terminez juste sous le genou (tubérosité tibiale). Déchirez et coupez le surplus.



PROFORE[◊] #2
Bande de crêpe

- préserve l'énergie élastique des couches de compression



En commençant aux orteils, effectuez 2 tours d'ancrage.



Ramenez la bande sous la voûte plantaire et le dessous du talon pour bien l'enserrer.



Revenez sur le devant du pied et commencez à remonter en **spirale** le long de la jambe en assurant un chevauchement de 50% de la spire précédente.



Terminez en laissant une étroite bordure de **PROFORE[◊] #1** et découpez le surplus. Fixez la bande à l'aide de ruban adhésif au besoin.



PROFORE[◊] #4
Bande de compression auto-adhérente

- maintient le bandage en place jusqu'à 7 jours



Appliquez encore une fois 2 tours d'ancrage.



Recouvrez le talon avec la bande étirée à 50%. Ramenez la bande sous la plante du pied et remontez en travers du pied.



Remontez sur la jambe jusqu'à la tubérosité tibiale, comme précédemment, avec une application en **spirale** à 50% de recouvrement de la spire précédente.



Coupez la bande en veillant à ne pas l'étirer sur les derniers 15 cm et fixez-la en exerçant une légère pression.

Pour toute autre information (contre-indications, précautions, avertissements et recommandations avant usage), veuillez vous référer à la notice d'instruction.

◊ Marque de commerce de Smith & Nephew



[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

PROFORE[◇] : mode d'emploi



1. Appliquer la couche d'interface directement sur la plaie.
2. **Bande d'ouate PROFORE n° 1.** S'assurer que le pied est en flexion, appliquer la bande sans l'étirer. Commencer à la base des orteils et bloquer au niveau de la cheville. Appliquer la bande selon la technique en spirale en créant un chevauchement de 50 % à chaque tour.
3. **Bandage de crêpe souple PROFORE n° 2.** Commencer à la base des orteils et bloquer au niveau de la cheville. Enrouler le bandage autour de la jambe selon la technique en spirale en créant un chevauchement de 50 % à chaque tour.
4. **Bandage de compression légère PROFORE n° 3.** Commencer à la base des orteils et bloquer au niveau de la cheville. Enrouler le bandage autour de la jambe selon une technique formant le chiffre huit et en l'étirant au maximum de 50 %. Utiliser la ligne jaune centrale pour créer le chevauchement de 50 % à chaque tour.
5. **Bandage de compression PROFORE n° 4.** Commencer à la base des orteils et bloquer au niveau de la cheville. Appliquer le bandage selon la technique en spirale en créant un chevauchement de 50 % à chaque tour et un étirement maximum de 50 %.
6. **Consignes pour le retrait/la mise au rebut.** PROFORE peut être porté sur la jambe pendant un maximum de 7 jours. En cas de problème, veuillez consulter un médecin.

[Retour à la table des matières](#)

Éliminez les incertitudes et augmentez votre confiance

Le bandage de forte compression extensible SurePress® est conçu pour être appliqué sur un pansement primaire chez les patients atteints d'un trouble du retour veineux et pour lesquels un traitement par compression est indiqué.



Traitement par compression

- Une compression adéquate est nécessaire afin de favoriser la cicatrisation des ulcères veineux
- Les indicateurs visuels d'application vous aident à exercer une force appropriée de compression graduelle
- Conçu pour exercer une compression soutenue de 35 à 45 mmHg

Conçu pour en faciliter l'application

- Deux indicateurs rectangulaires pour des membres de différentes tailles
- Les rectangles se transforment en carrés lorsque l'extension appropriée est atteinte
- La ligne jaune au centre du bandage facilite un chevauchement de 50 %

Conçu pour être durable

- Le bandage est réutilisable et léger
- Des tests ont montré que le bandage exerce une compression en toute sûreté jusqu'à 20 lavages (en utilisant seulement de l'eau, sans détergent)¹

Le bandage absorbant SurePress® est aussi disponible

- Ce bandage doux peut être appliqué sous le bandage de forte compression extensible SurePress®
- Il améliore la prise en charge de l'exsudat de la plaie
- Ce bandage facilite une distribution graduelle de la compression
- Le bandage absorbant facilite l'application sur des jambes de formes inhabituelles en protégeant les zones vulnérables et en aplanissant certains contours²



Bandage de forte compression SurePress® Application*

Au moyen d'un mètre à ruban, déterminer si le membre est de taille « normale » ou « forte ». Les chevilles dont le tour mesure de 18 à 26 cm sont considérées comme étant de tailles « normales ». Les chevilles dont le tour est supérieur à 26 cm sont considérées comme étant de tailles « fortes ».

Une fois la taille du membre déterminée, choisir le grand ou le petit indicateur d'extension rectangulaire sur le bandage. On doit choisir le petit rectangle pour un membre de taille « normale » et le grand pour un membre de taille « forte ».



Nettoyer l'ulcère conformément au protocole habituel de pratique clinique, puis bien rincer et assécher la peau environnante avant d'appliquer le pansement primaire et le bandage de compression.

1



Après l'application d'un pansement primaire, un bandage absorbant SurePress® (vendu séparément) peut être appliqué comme base avant l'application du bandage de compression. Cette compresse absorbante et douce aide à répartir une compression graduelle et à protéger la peau de tout exsudat qui passerait au travers du pansement primaire.

2



Commencer à enrouler le bandage au centre de l'avant-pied, la bordure inférieure du bandage se trouvant à la base des orteils. Enrouler le bandage autour du pied (1 ½ tour) en le tendant légèrement.

3



Maintenir le bandage en place avec le pouce et commencer à l'enrouler autour du talon en l'étriant jusqu'à ce que le rectangle choisi se soit transformé en carré; puis, enrouler le bandage une fois autour du talon. Maintenir le bandage en place avec le pouce et l'étrier jusqu'à ce que le rectangle choisi se soit transformé en carré. Enrouler ensuite le bandage en passant sur le devant de la cheville et sous la plante du pied de façon à recouvrir l'écart.

4



Continuer à étrier le bandage jusqu'à ce que le rectangle choisi se soit transformé en carré. Enrouler le bandage une fois autour de la cheville, puis continuer à l'enrouler en spirale le long de la jambe en le faisant chevaucher, à chaque tour, sur la moitié de sa largeur, c'est-à-dire à la base des indicateurs d'extension rectangulaires.

5



Lorsque le bandage recouvre toute la jambe jusqu'en dessous du genou, couper l'excès de bandage et en fixer solidement l'extrémité avec du ruban adhésif.

6

Information pour commander

Bandage de forte compression SurePress®

Code de produit	Dimensions	Unité par boîte
650047	10 cm x 3 m (non étiré) (4 po x 3,2 verges)	1

Bandage absorbant SurePress®

Code de produit	Dimensions	Unité par boîte
650048	10 cm x 3 m (4 po x 3,2 verges)	6

References : 1. Court AD, Thomas S, Peters K. SurePress high compression bandage: Design, performance and clinical experience. Affiche présentée à la réunion de l'ETRS/WHG, Bordeaux, France, 2. Sturling J. Sustained compression with a high compression bandage. Affiche présentée à l'ISWMA à Milan en 1997.

* Consulter la notice du produit pour le mode d'emploi détaillé.

SurePress est une marque déposée de ConvaTec Inc.
©2010 ConvaTec Inc. CA-07-1425-WF

VC06: V632
janvier 2011



Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Centre des relations avec la clientèle au 1 800 465-6502, du lundi au vendredi, de 8h à 18h (HNE), ou visitez notre site Web à www.convatec.ca

Soins des plaies
de ConvaTec

[Retour à la table des matières](#)

Tubigrip

Bandage de compression tubulaire : Tubigrip

Compression selon une chartre : 5-10 mmHg/ 10-20 mmHg/ 20-30 mmHg

Prescription médicale avec le degré de compression nécessaire

Indications	- Ulères veineux et mixtes - Le choix du degré de compression peut être adapté selon l'indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB) et autres problèmes de santé concomitants (insuffisance cardiaque)
Contre-indications	- Membre présentant une difformité (ex. mollet fort et petite cheville) - Insuffisance artérielle sévère - Œdème de l'insuffisance cardiaque non contrôlée et OAP
Contre-indication relative	Manque de collaboration de l'utilisateur ou de compréhension
Avantages	- Peut être lavé à la main et réutilisé 20 fois - Est économique - Est moins épais que les systèmes de compression à 3 ou 4 couches - S'adapte à différents diamètres de la jambe (guide de mesure) - Peut être enlevé et refait tous les jours; permet ainsi la réfection du pansement aussi souvent que nécessaire (ex. lors d'exsudat abondant ou infection)
Inconvénients	- N'est pas dégressif - Peut causer un effet garrot - Peut nuire à l'observance du traitement, car il peut être enlevé par l'utilisateur - Difficile à faire glisser sur un pansement - Exige une surveillance fréquente du diamètre du mollet pour s'assurer d'obtenir la compression désirée

Surveillance après installation

- Signes de circulation (coloration des orteils, engourdissement, douleur...)
- Traumatismes dus à la pression (glissement/ pli/ pression sur proéminence osseuse...)/ État de la peau
- Mesure de la circonférence du mollet à toutes les semaines pour s'assurer d'avoir le degré de compression prescrit

Enseignement à l'utilisateur

- Les principes de la compression sur le contrôle des effets de l'insuffisance veineuse
- L'installation (s'il y a lieu)
- Surveillance des signes de circulation
- Surveillance de l'état de la peau
- Inconfort disparaît généralement après 1 à 2 semaines
- Nécessité du port d'un soulier plus grand
- Élévation des jambes au dessus du cœur périodiquement durant la journée
- Exercices avec les chevilles : rotation/flexion
- Entretien et durée du bas

No produits Tubigrip; compagnie molnlycke : rouleau de 10 mètres

Format	No produits compagnie	No magasin HAL
Format B	1436	21000425
Format C	1443	20940320
Format D	1437	20940433
Format E	1434	20940321
Format F	1438	20940434
Format G	1439	21000943

Chartre du Tubigrip en double épaisseur

	5-10 mm Hg	10-20 mm Hg	20-30 mm Hg
10 cm - 14 cm		B	
14 cm - 15 cm	C	B	
15 cm - 25 cm	D	C	B
25 cm - 35 cm	E	D	C
35 cm - 45 cm	F	E	D
45 cm - 50 cm	G	F	E
50 cm - 60 cm		G	F
60 cm - 70 cm			G

Mode d'emploi

Principes généraux

- À installer avant le levé ou après minimum 20 minutes en position couchée avec la jambe surélevée si possible
- Installer à la base des orteils et terminer 2 ou 3 doigts sous le creux poplité
- Couper l'excès de bandage
- Durée du port : dépend de la plaie et de son exsudat; peut demeurer en place 24h/24h durant 2 à 3 jours

1. Mesurer la plus grande circonférence du mollet et choisir la grandeur appropriée de la compression prescrite, selon la chartre


4. Garder le pied à 90 ° et doubler le Tubigrip sur la jambe, à partir de la base des orteils


2. Tailler une double longueur de Tubigrip, en laissant 2 à 3 cm de plus pour le chevauchement


5. S'assurer que le bord supérieur dépasse de 2 à 3 cm la première couche


3. Enfiler le Tubigrip jusqu'en dessous du genou


6. S'assurer qu'il n'y a pas de pli


[Retour à la table des matières](#)

Mode d'emploi des produits de soins de plaie

Processus d'élaboration/Révision		
Rédigé par	Inscrire les prénom, nom et titre	AAAA-MM-JJ
Révisé par	Inscrire les prénom, nom et titre	AAAA-MM-JJ
Personnes consultées	Inscrire les prénom, nom et titre	AAAA-MM-JJ
	Inscrire les prénom, nom et titre	AAAA-MM-JJ
	Inscrire les prénom, nom et titre	AAAA-MM-JJ
	Inscrire les prénom, nom et titre	AAAA-MM-JJ

Historique du document		
CONCERNANT UNE SEULE DIRECTION	Inscrire le prénom, nom, Directeur de la Direction.....	Date AAAA-MM-JJ
Approuvé par		
CONCERNANT PLUS D'UNE DIRECTION	Inscrire le prénom, nom et titre Le Comité de coordination clinique	Date AAAA-MM-JJ
Approuvé par		
Commentaires	Inscrire vos commentaires	

[Retour à la table des matières](#)