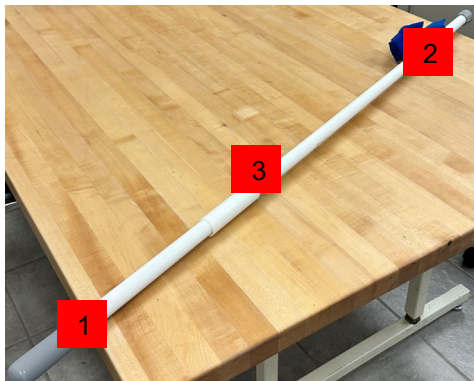
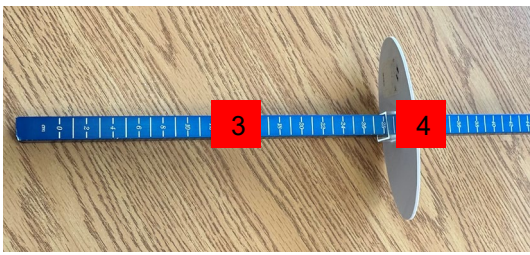


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- ACTIVITÉ DE MOBILITÉ ET RENFORCEMENT DES MEMBRES SUPÉRIEURS

MATÉRIEL REQUIS
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Les deux poignées aux extrémités 2. La courroie pour la main 3. La tige 4. Les autres parties de l'équipement

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE
Autres équipements qui entre dans cette liste : • Appareil pour pratiquer la dextérité fine • Pronation/supination main (WRIST TWIST (FEBS)) En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL
SEABOGLIDE  Reaching Bar (cm et pouce) 

FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire

	
HIGH TOUCH	LOW TOUCH