

Procédure de réutilisation des protections oculaires (visière ou lunette de protection)

**ATTENTION : LES LUNETTES DE VUE NE SONT PAS CONSIDÉRÉES
COMME UNE PROTECTION OCULAIRE SÉCURITAIRE.**

PROCÉDURE DE RÉUTILISATION

ÉTAPE PRÉPARATOIRE

Préparer le sachet en plastique où la visière se trouvait
ou préparer un sac transparent de style « Ziploc »
et mettre un collant avec votre nom pour l'identifier.



PROCÉDURE DU RETRAIT DE LA PROTECTION OCULAIRE


ÉTAPE 1

Retirer la protection oculaire et la déposer sur
une surface souillée.

Procéder à l'hygiène des mains et mettre les gants.

Nettoyer **l'intérieur** avec le 1^{er} côté de la lingette
désinfectante, puis **l'extérieur** avec l'autre côté
de la lingette*.

* Respecter le temps de contact du produit utilisé pour la désinfection
avant de reprendre la protection oculaire.

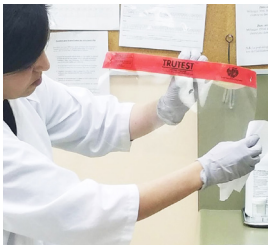

ÉTAPE 2

Déposer la protection oculaire sur une surface propre*,
laisser sécher.

Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains.

* Respecter le temps de contact du produit utilisé pour la désinfection
avant de reprendre la protection oculaire.



ÉTAPE 3

Une fois le temps de contact du produit respecté,
mettre la protection oculaire dans le sac en plastique.

* Si la visibilité de la protection oculaire est compromise par le produit
désinfectant, rincer la visière avec de l'eau du robinet et laissez sécher
avant de mettre dans le sac.



ÉTAPE 4

Déposer la protection oculaire dans le bac identifié
à cet effet ou à l'endroit désigné selon le milieu à la fin
de votre quart de travail.

