

Installation des attaches poignets et chevilles

RAPPEL !

- Procéder à l'hygiène des mains selon les 4 moments.
- Utiliser toujours la ceinture abdominale lors de l'installation des attaches poignets et des attaches chevilles.
- Garder les ridelles de lit remontées en tout temps, le lit en position la plus basse et la cloche d'appel à portée de l'usager.
- Ne pas fixer plus de quatre œillets dans une même tige de laiton.
- Tirer toujours sur les boutons noirs afin de s'assurer qu'ils soient bien enclenchés.
- Garder une clé magnétique près de l'usager mais hors de sa portée (Rendre disponible un ciseau en cas d'urgence).
- Retirer les bijoux, les souliers et les bas.



Installation des attaches poignets

- **Étape 1 :** Ajuster l'attache poignet autour du poignet avec les deux bandes Velcro (légèrement croisées en formant un « V »). Laisser l'espace d'un seul doigt.

Mobilité réduite : Insérer la sangle la plus longue de l'attache poignet dans la boucle métallique située sur le côté de la ceinture abdominale.

- **Étape 2 :** Insérer un des œillets de la sangle la plus longue de l'attache poignet à la tige de laiton de la sangle latérale de la ceinture. Placer le bouton aimanté sur la tige de laiton.
- **Étape 3 :** Prendre l'extrémité de la sangle (la plus courte) et l'insérer dans la boucle de métal en passant par-dessus le poignet.
- **Étape 4 :** Ramener la sangle par-dessus le poignet vers l'usager puis la fixer à l'aide d'un des œillets avec une tige de laiton. Replier l'excédent de la sangle sur la tige de laiton et verrouiller avec un bouton noir.


N.B. Répéter les mêmes étapes pour la 2^e attache poignet.

NETTOYAGE :

- Revêtir l'équipement de protection individuel (EPI).
- Retirer, nettoyer et désinfecter les boutons noirs et les tiges en laiton avec des lingettes désinfectantes. (Ne pas immerger)
- En présence de souillures visibles, rincer la contention dans le lavabo de l'utilité souillée, l'essorer et la placer dans un sac de lingerie souillée.
- Laver à la machine avec un détergent doux, préférentiellement à l'eau tiède. (Ne pas utiliser d'eau de Javel)
- Sécher à cycle délicat à température moyenne ou à l'air ambiant.

Source : <http://msi.expertise-sante.com/fr>

Installation des attaches poignets et chevilles

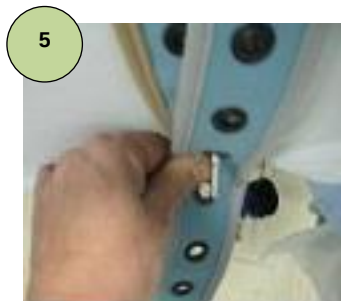

Installation des attaches chevilles

- **Étape 1 :** Déposer la sangle de raccordement à la hauteur des chevilles de l'utilisateur (ganses vers le pied du lit). Insérer une tige de laiton.
- **Étape 2 :** Insérer la sangle dans l'une des fentes de chaque côté de la structure mobile du lit. Tirer fermement la sangle de raccordement (pour exercer une dépression du matelas). Fixer un des œillets sur la tige de laiton. Verrouiller avec un bouton noir.
- **Étape 3 :** Insérer la sangle la plus longue de chaque attache cheville dans les ganses de la sangle de raccordement.
- **Étape 4 :** Ajuster l'attache cheville autour de la cheville avec les deux bandes Velcro (légèrement croisées en formant un « V »). Laisser l'espace d'un seul doigt.
- **Étape 5 :** Retirer le bouton aimanté de la sangle de raccordement. Insérer la tige de laiton de la sangle de raccordement dans un des œillets de la sangle la plus longue de l'attache cheville (ajuster selon la mobilité voulue). Verrouiller avec le bouton noir.
- **Étape 6 :** Prendre l'extrémité de la sangle (la plus courte) et l'insérer dans la boucle de métal en passant par-dessus la cheville.
- **Étape 7 :** Ramener la sangle par-dessus la cheville vers l'utilisateur puis la fixer à l'aide d'un des œillets avec une tige de laiton. Verrouiller avec un bouton noir.

N.B. Répéter les mêmes étapes pour la 2e attache cheville.