

Installation de la ceinture abdominale et des bretelles

Rappel!

- Procéder à l'hygiène des mains selon les 4 moments.
- Garder les ridelles de lit remontées en tout temps, le lit en position la plus basse, la cloche d'appel à portée de l'utilisateur. (Ne jamais utiliser ce modèle dans un fauteuil.)
- Ne jamais installer la ceinture abdominale directement sur la peau.
- Ne jamais placer de literie entre la ceinture abdominale et l'utilisateur.
- Ne pas installer sur un matelas à air ou chez un usager avec pression abdominale contre-indiquée.
- Garder toujours une distance de 10 cm entre un stimulateur cardiaque et la clé magnétique.
- Ne pas fixer plus de quatre œillets dans une même tige de laiton.
- Tirer toujours sur les boutons noirs afin de s'assurer qu'ils soient bien enclenchés.
- Garder une clé magnétique près de l'utilisateur, mais hors de sa portée. (Rendre disponible un ciseau en cas d'urgence.)

1




1



Étape 1 : Installation de la ceinture abdominale

- Déposer la ceinture abdominale au centre du matelas (les ganses noires dirigées vers la tête de lit). Insérer une tige de laiton dans les pochettes intérieures des courroies principales.
- Insérer les courroies principales dans l'une des fentes de chaque côté de la structure mobile. Ne jamais les fixer à la partie fixe du lit ou aux ridelles.
- Tirer fermement la courroie principale (pour exercer une dépression du matelas). Fixer un des œillets sur la tige de laiton et verrouiller avec un bouton noir.

2c

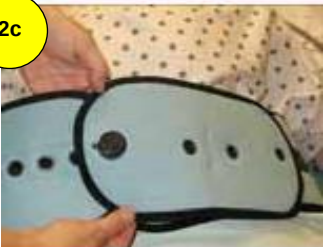

Étape 2 : Installation de l'utilisateur dans la ceinture abdominale

- Coucher l'utilisateur sur le dos au centre de la ceinture.
- Placer la 1^{ère} bande de la ceinture abdominale (avec bande noire intérieure) sur l'abdomen de l'utilisateur (doit être située sous les seins et au-dessus des crêtes iliaques). Insérer une tige de laiton dans la pochette intérieure, dans l'œillet correspondant au centre de l'abdomen de l'utilisateur (au besoin, ajouter la rallonge).
- Rabattre la 2^e bande de la ceinture abdominale par-dessus la 1^{ère} sur l'abdomen de l'utilisateur. Fixer un des œillets sur la tige de laiton (choisir l'œillet pour laisser l'épaisseur d'une main entre la ceinture et l'utilisateur) et verrouiller avec un bouton noir.

3a



3b



Étape 3 : Installation obligatoire des courroies latérales de la ceinture abdominale


- Fixer les sangles latérales avec bordure jaune dans la boucle métallique située sur le côté de la ceinture abdominale.
- Fixer ensuite les sangles latérales avec la même tige de laiton que les sangles principales.
 - ✓ Choisir un œillet distal pour permettre la rotation latérale.
 - ✓ Choisir un œillet proximal pour maintenir en position dorsale.
 - ✓ Placer les 2 courroies latérales sur le même côté pour maintenir l'utilisateur en position latérale.

N.B. : L'utilisateur ne doit pas être capable de se tourner à l'intérieur de la ceinture, mais bien avec la ceinture.

RAPPEL !

- Les bretelles doivent obligatoirement être utilisées chez un usager qui risque de se glisser pour sortir par le haut de la ceinture.
- Ne peuvent être utilisées chez un usager avec un stimulateur cardiaque (la clé magnétique pouvant créer une défaillance).


1

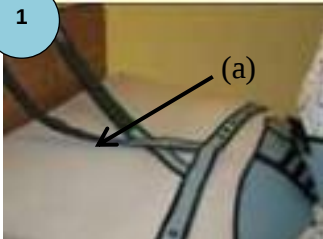

2



3

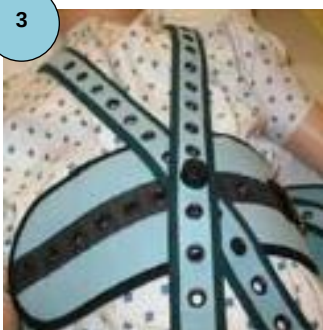

4



5



6



Installation des bretelles

Installer préalablement, lorsque prévisible, les bretelles sur la ceinture abdominale ou faire asseoir l'usager.

- **Étape 1 :** Placer les bretelles à la tête du lit ou de la civière. Le « X » des bretelles doit être ajusté au centre du dos de l'usager, les pochettes vertes (a) placées face vers le haut.
- **Étape 2 :** Insérer la sangle horizontale des bretelles dans les ganses noires situées sur la ceinture. Rabattre les bretelles sur les épaules de l'usager.

Facultatif pour maintenir un usager en position couchée :

- ✓ Déposer la sangle de raccordement à la hauteur des épaules de l'usager (les ganses vers le pied du lit).
- ✓ Insérer une tige de laiton dans la pochette intérieure.
- ✓ Insérer la sangle dans l'une des fentes de chaque côté de la structure mobile du lit.
- ✓ Tirer fermement la sangle de raccordement (pour exercer une dépression du matelas). Fixer un des œillets sur la tige de laiton et verrouiller avec un bouton noir.
- ✓ Glisser les bretelles dans les ganses de la sangle de raccordement.
- **Étape 3 :** Recoucher l'usager. Fixer les bretelles à l'avant, à la tige de laiton de la ceinture abdominale, et verrouiller avec un bouton noir (choisir l'œillet pour laisser l'espace d'un doigt entre la bretelle et l'épaule).
- **Étape 4 :** Prendre la courroie inférieure de droite, la faire passer sous l'aisselle droite et l'insérer dans l'une des 3 fentes situées sur la bretelle de droite.
- **Étape 5 :** Placer une tige de laiton dans la pochette intérieure de la bretelle de gauche et fixer la courroie de droite sur la tige de laiton.
- **Étape 6 :** Faire passer la courroie inférieure de gauche sous l'aisselle gauche, la fixer sur la tige de laiton et verrouiller avec un bouton noir.

NETTOYAGE :

- Revêtir l'équipement de protection individuel (EPI)
- Retirer, nettoyer et désinfecter les boutons noirs et les tiges en laiton avec des lingettes désinfectantes (Ne pas immerger)
- En présence de souillures visible, rincer la contention dans le lavabo de l'utilité souillée, l'essorer et la placer dans un sac de lingerie souillée;
- Laver à la machine avec un détergent doux, préférablement à l'eau tiède (Ne pas utiliser d'eau de Javel);
- Sécher à cycle délicat à température moyenne ou à l'air ambiant.