

Rappel!

- Procéder à l'hygiène des mains selon les 4 moments.
- Fixer la sangle pelvienne à la ceinture abdominale pour l'utilisateur agité, qui risque de sortir du lit ou dont l'ajustement de la ceinture abdominale est difficile.
- Ajouter à la ceinture abdominale afin de prévenir le déplacement de celle-ci vers le thorax.
- Garder les ridelles de lit remontées en tout temps, le lit en position la plus basse, la cloche d'appel à portée de l'utilisateur. (Ne jamais utiliser ce modèle dans un fauteuil)
- Ne pas fixer plus de quatre œillets dans une même tige de laiton.
- Tirer toujours sur les boutons noirs afin de s'assurer qu'ils soient bien enclenchés.
- Garder une clé magnétique près de l'utilisateur mais hors de sa portée. (Rendre disponible un ciseau en cas d'urgence)

1a



1b



1c



1c



2b



2c



2d



Étape 1 : Installation de la sangle pelvienne à la ceinture abdominale

- Glisser la sangle pelvienne sous la ceinture abdominale. La boucle doit sortir entièrement, vers la tête du lit.
- Passer la boucle au centre de la ceinture, vers le bas, sous les bandes noires entrecroisées.
- Passer la bande large de la sangle pelvienne dans la boucle.
- Fixer la ceinture abdominale au lit ou sur la civière. (Se référer à l'aide-mémoire *Ceinture abdominale et bretelles*, au besoin)

Étape 2 : Installation de la ceinture avec la sangle pelvienne à l'utilisateur

- Passer la sangle pelvienne entre les jambes de l'utilisateur. Laisser une distance minimale de 3 cm entre la sangle pelvienne et les aines pour le confort de l'utilisateur.
- Insérer les 2 tiges de laiton (centrées sur l'abdomen) de la ceinture abdominale dans les œillets de la sangle pelvienne.
- Placer la 2^{ème} bande de la ceinture abdominale par-dessus la sangle pelvienne en insérant les tiges de laiton dans les œillets (choisir les œillets pour laisser l'épaisseur d'une main entre la ceinture et l'utilisateur) et verrouiller avec un bouton noir.
- La sangle pelvienne peut également être fixée par-dessus la 2^{ème} bande de la ceinture abdominale

N.B. L'utilisateur ne doit pas être capable de se tourner à l'intérieur de la ceinture, mais bien avec la ceinture.

NETTOYAGE :

- Revêtir l'équipement de protection individuel (EPI).
- Retirer, nettoyer et désinfecter les boutons noirs et les tiges en laiton avec des lingettes désinfectantes. (Ne pas immerger)
- En présence de souillures visibles, rincer la contention dans le lavabo de l'utilité souillée, l'essorer et la placer dans un sac de lingerie souillée.
- Laver à la machine avec un détergent doux, préférentiellement à l'eau tiède. (Ne pas utiliser d'eau de Javel)
- Sécher à cycle délicat à température moyenne ou à l'air ambiant.

Source : <http://msi.expertise-sante.com/fr>