
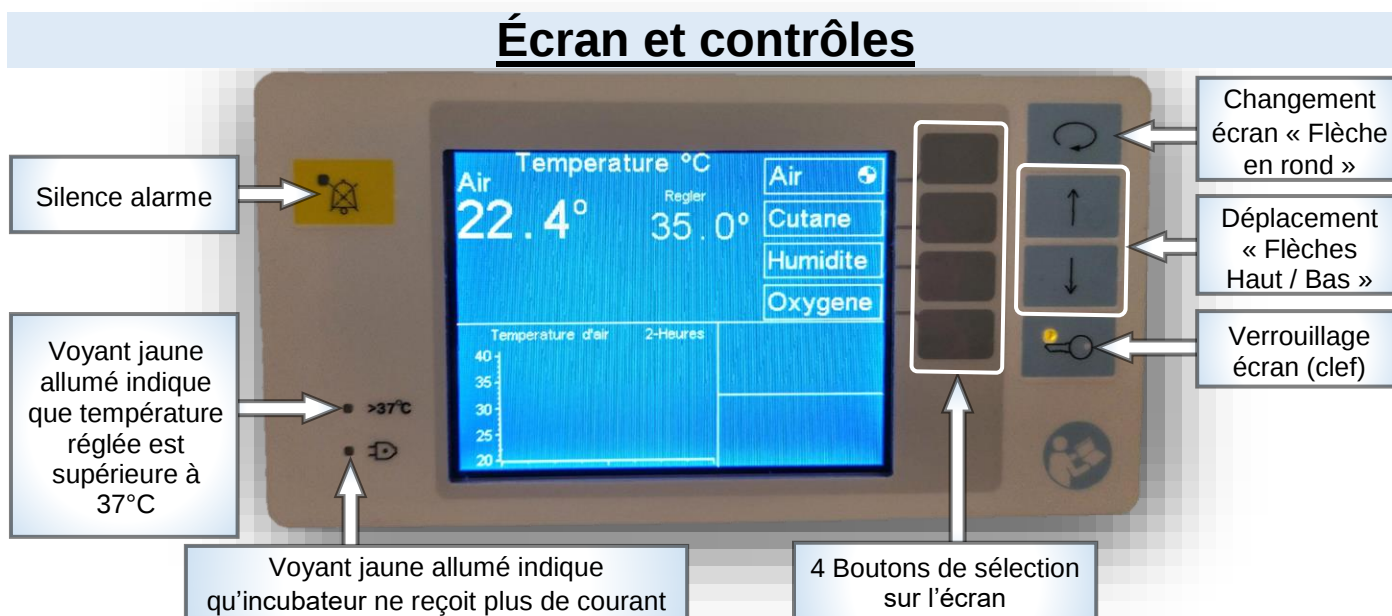


AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Consignes d'utilisation de l'incubateur 8000 Dräger en contexte soins néonataux

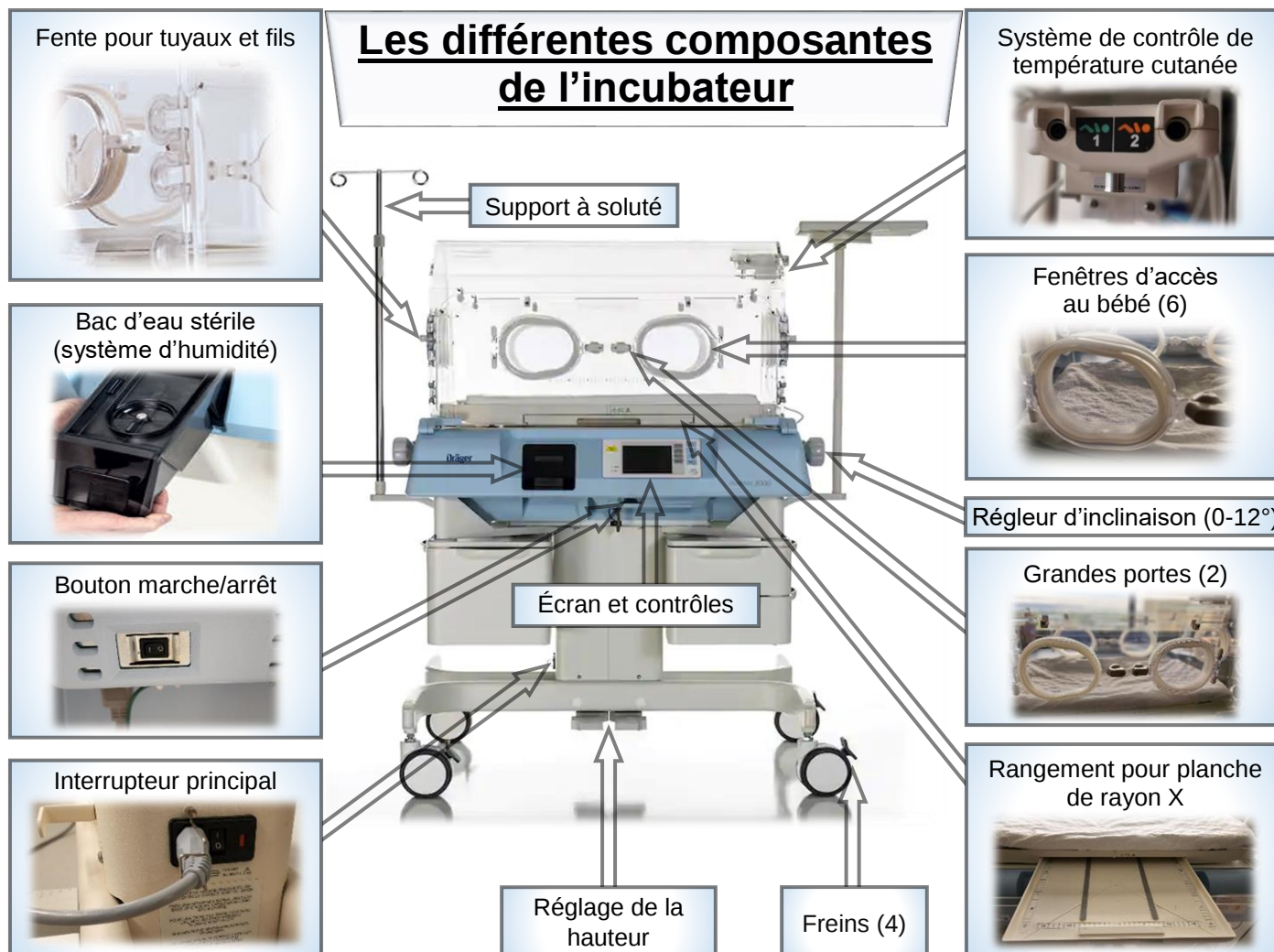

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Consignes d'utilisation de l'incubateur 8000 Dräger en contexte soins néonataux

Mise sous et hors tension

Appuyer sur le bouton marche/arrêt, l'appareil fera une vérification système automatique. Puis vous demandera de sélectionner la température voulue. Pour mettre l'incubateur hors tension vous devez seulement appuyer de nouveau sur le bouton marche/arrêt.

L'incubateur ne fonctionne pas

Vérifier qu'il est bien branché à une prise de courant et que le fil est bien connecté à l'incubateur. Vous pouvez aussi vérifier que l'interrupteur principal est allumé.

RÉGLAGE DES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES

Paramètres (écran en marche)	Programmation	Écran lors de la programmation
T° Air 	- Déverrouiller l'écran (clef) et appuyer sur le bouton air (gris) - Utiliser les « Flèches » pour ajuster la température voulue (régler) - Appuyer sur le bouton retour (gris) puis sur verrouiller (clef)	
T° cutanée 	- Brancher la perle de température dans le module installer la perle sur le nouveau-né - Déverrouiller l'écran (clef) et appuyer sur le bouton cutané (gris) - Utiliser les « Flèches » pour ajuster la température voulue (régler) - Appuyer sur le bouton retour (gris) et puis sur verrouiller (clef)	
Emplacement de la perle cutanée Favoriser l'aisselle, l'abdomen ou le thorax. Toujours appliquer un collant réflecteur. Le nouveau-né ne doit jamais être couché sur sa perle.		
T° supérieure à 37°C 	- Déverrouiller l'écran (clef) et appuyer sur le bouton de T° désirée (gris) - Utiliser les « Flèches » pour ajuster la T° voulue (régler) jusqu'à 37°C - Appuyer sur le bouton « > » 37°C (gris) - Utiliser les « Flèches » pour ajuster la T° voulue (régler) - Appuyer sur le bouton retour (gris) et puis verrouiller (clef)	
Courbe tendance T° 	- Déverrouiller l'écran (clef) et appuyer sur le bouton changement d'écran « Flèche en rond » - Appuyer sur le bouton tendance (gris) puis température (gris) - Sélectionner (2h, 4h ou 24h) - Appuyer sur le bouton retour (gris) puis verrouiller (clef)	

Procédure de nettoyage de l'équipement

Système d'humidification :

Il est complètement indépendant et est spécialement conçu pour assurer un nettoyage le plus simple possible. Il suffit de tirer le réservoir d'eau à l'extérieur, puis de pousser l'évaporateur pour stériliser rapidement et facilement l'ensemble du système.

Nettoyage et désinfection complète :

Il doit être nettoyé chaque semaine ou entre chaque usager. Pour nettoyer l'incubateur, il doit être débranché et ne pas avoir été en marche depuis 30 minutes. Ne jamais utiliser d'alcool, d'acétone ou de produit en aérosol. Vous devez utiliser le nettoyant suivant : lingettes désinfectantes de peroxyde d'hydrogène.

Les sondes de température jetables doivent être jetées entre chaque bébé.

ALERTE CLINIQUE

HYPERTHERMIE ET PHOTOTHÉRAPIE

Vérifier la perle cutanée :

- S'assurer d'avoir une perle cutanée adéquate, les perles réutilisables sont valides un an lorsqu'elles sont intactes.
- Les perles à usage unique doivent être changées entre chaque usager ou en présence d'un bris.
- Utiliser un collant réflecteur pour maintenir la perle en place sur l'usager.
- Vérifier que la perle cutanée est bien positionnée selon les indications précédentes.

Si l'usager est en hyperthermie (température axillaire est supérieure ou égale à 37,3°C)

Malgré les vérifications ci-dessus, utiliser le mode air pour diminuer la température de l'incubateur de 0,5°C chaque 20 min en prenant soin de surveiller la température de l'usager avec un thermomètre à tout 20 minutes jusqu'à l'obtention d'une température adéquate. Une fois que la température du bébé stable utiliser à nouveau le mode cutané.

ATTENTION

Ne jamais ouvrir de hublot pour faire descendre la température, l'incubateur est conçu de façon à minimiser les pertes de chaleur lors de l'ouverture des portes alors il se réchauffera davantage.