



AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Système de gestion de la température Altrix

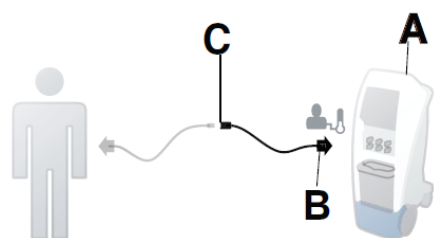

Écran d'accueil :

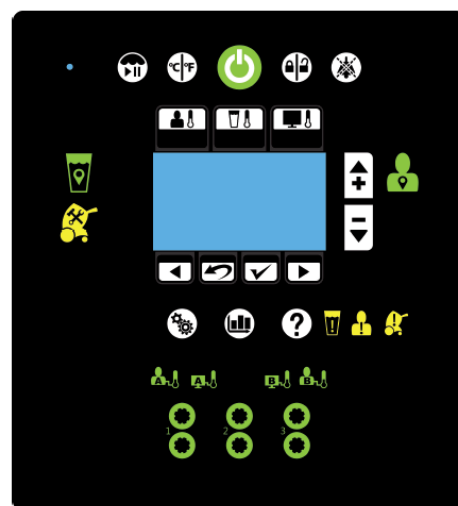

A : Appareil Altrix

B : Câble adaptateur réutilisable
connecté au port A ou B (arrière)




C : Connexion du câble (B) et de
la sonde de température de l'utilisateur

37.0°	Température cible du patient ou de l'eau
Med	Moyenne : la température de patient augmente de 4,0 °C en 12 hours (0,33 °C/ h).
Max	Maximum : la température de l'eau atteint la cible pour l'eau le plus vite possible
Min	Minimum : la température du patient augmente de 4,0 °C en 24 heures (0,17 °C/h).
Set Custom	Personnalisée : la température du patient augmente à une température et sur une période sélectionnées par l'opérateur. La température augmente de 0,05 °C/heure à 0,5 °C/heure
Max	Maximum : la température de l'eau atteint la cible pour l'eau le plus vite possible
Med	Moyenne : l'eau est refroidie à la cible, avec un écart max. de 15,0 °C entre la température du patient et celle de l'eau
Min	Minimum : l'eau est refroidie à la cible, avec un écart max. de 10,0 °C entre la température du patient et celle de l'eau

Connexion des tuyaux

1. Pousser le collier vers l'arrière 2. Pousser les tuyaux dans les ports et relâcher le collier

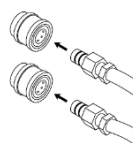

3. Max. 3 dispositifs



Mise en marche et programmation

1. Mise sous tension : Brancher au mur
2. Remplir le réservoir :
 - Soulever le couvercle ou retirer le réservoir
 - Remplir avec 5 L d'eau stérile. **Ne pas dépasser la ligne de remplissage (A)**
 - S'il a été retiré, replacer le réservoir et s'assurer qu'il est bien fixé pour éviter les fuites
3. Connecter les tuyaux à l'arrière de l'appareil
4. Connecter les tubulures du ou des dispositif(s) thermique(s)
5. Remplir le ou les dispositifs thermiques :
 - Ouvrir les pinces/clampes du tuyau connecteur et des dispositifs de transfert thermique pour permettre un débit d'eau correct :
 - *Il est préférable de pré-remplir les dispositifs avant de les appliquer à l'utilisateur*
 - Appuyer sur le bouton Veille pour démarrer 
 - Appuyer sur le bouton Mode manuel 
 - Appuyer sur Confirmer 
 - Sélectionner une température d'eau alignée sur la température cible de l'utilisateur : 
 - *Laisser l'eau s'écouler du contrôleur dans le dispositif de transfert thermique jusqu'à ce qu'il soit plein*
 - Appuyer sur Confirmer 
6. Appliquer le dispositif thermique sur l'utilisateur :
 - Le côté « doux » de la couverture est le côté en contact avec la peau de l'utilisateur
 - Privilégier une couverture thermique sous l'utilisateur et une autre sur l'utilisateur
 - Éviter d'ajouter une jaquette, flanelle, alèze, piqué ou autre couverture :
 - *Ajouter simplement une serviette pour couvrir les parties intimes*
 - *Ajouter un piqué en cas de besoin seulement (ex. : Utilisateur avec saignement à l'aîne ou qui fait des selles)*
7. Connecter le câble adaptateur réutilisable au port de température A ou B à l'arrière 
8. Connecter l'autre embout du câble réutilisable à la sonde de température de l'utilisateur
9. Choisir le mode de traitement :

	Mode de traitement Autom.	Refroidit ou réchauffe le patient à une température cible de patient sélectionnée
	Mode de traitement Manuel	Refroidit ou réchauffe l'eau à une température cible de l'eau sélectionnée.
	Mode Monitoring seul	Affiche la température actuelle du patient (sans traitement)

10. Déterminer la vitesse    de refroidissement  / réchauffement  (en mode Automatique ou Manuel) :
 - *Prêter attention à la variation de C°/heure souhaitée*
 - *Le refroidissement se fait habituellement en mode rapide (vitesse maximum)*
11. Appuyer sur Confirmer 

Références : Système haute précision de gestion de la température Altrix® Manuel d'utilisation, 2020			
Direction émettrice :	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Entrée en vigueur :	2020-10-22
AMC-DSIEU-6069 (2020-10)		Révision :	