

Positionnement de l'utilisateur au fauteuil gériatrique en situation de mesure de contrôle - tablette et ceinture

POUR UN POSITIONNEMENT OPTIMAL IL EST PRÉFÉRABLE D'INSTALLER L'USAGER À L'AIDE DU LEVIER

ÉTAPES POUR LE TRANSFERT AU LEVIER

- Mettre les freins du fauteuil gériatrique.
- Installer l'utilisateur dans la toile de transfert pour utiliser le levier.
- Incliner le dossier du fauteuil gériatrique ainsi que l'assise vers l'arrière d'environ 5°. Attention : l'utilisateur peut glisser si seul le dossier a été incliné.
- Approcher le levier du fauteuil jusqu'à ce que les fesses de l'utilisateur appuient sur le dossier.
- Descendre l'utilisateur dans le fauteuil en s'assurant que ses fesses demeurent en contact avec le dossier tout au long de la manœuvre.
- S'assurer que l'utilisateur est assis bien au fond du fauteuil.
- Maintenir un angle de 90° entre le tronc et les jambes de l'utilisateur (au niveau des hanches). Le dossier et l'assise doivent demeurer inclinés à 5° (ou plus, selon le positionnement suggéré par le professionnel).
- Une fois l'utilisateur bien assis, boucler la ceinture pelvienne au niveau des hanches. Laisser un espace permettant le passage d'une main.
- Installer la tablette le plus près possible de l'abdomen.
- Positionner les appuie-bras 1 ou 2 cm plus élevés que les coudes.
- S'assurer que les pieds reposent sur les appuie-pieds et qu'il y a un angle de 90° entre les appuie-jambes et les appuie-pieds.

ÉTAPES POUR TRANSFERT EN PIVOT LORSQUE RECOMMANDÉ PAR UN PROFESSIONNEL AUTORISÉ

- Mettre les freins du fauteuil gériatrique.
- Installer l'utilisateur dans le fauteuil en s'assurant que les fesses sont bien au fond de l'assise.
- S'assurer que l'utilisateur est assis bien au fond du fauteuil et que les hanches sont à la même hauteur (en se fiant aux crêtes iliaques).
- Boucler la ceinture pelvienne attachée au niveau des hanches. Laisser un espace permettant le passage d'une main.
- Installer la tablette le plus près possible de l'abdomen.
- Positionner les appuie-bras 1 ou 2 cm plus élevés que les coudes.
- Incliner le dossier et l'assise vers l'arrière à 5° (ou plus selon la recommandation du professionnel). Attention : l'utilisateur peut glisser si seul le dossier a été incliné.
- Maintenir un angle de 90° entre le tronc et les jambes de l'utilisateur (au niveau des hanches).

ATTENTION

L'UTILISATION DU FAUTEUIL PEUT DEVENIR UNE MESURE DE CONTENTION LORSQUE LA TABLETTE OU LA CEINTURE SONT UTILISÉES POUR ÉVITER QUE L'USAGER SE LÈVE.

Références : http://iucpq.gc.ca/contribute_documents/FlashAgreementNo2_Octobre2012_FINAL.pdf

Direction émettrice	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Entrée en vigueur :	2020-12-04
AMC-DSIEU-6073 (2023-01)		Révision :	2023-01-30

Un bon ajustement pour la sécurité et le confort des usagers

QUAND L'UTILISER?

Le fauteuil gériatrique sert à positionner un usager lorsque le support d'un fauteuil standard est insuffisant. Par exemple, pour une personne qui glisse, qui penche sur un côté et qui s'affaisse dans un fauteuil standard.

****Attention** : L'utilisation de ce fauteuil peut devenir une mesure de contention lorsque la tablette ou la ceinture sont utilisées pour éviter que l'utilisateur se lève.

QUELS DANGERS SONT RELIÉS À UN AJUSTEMENT INADÉQUAT?

Une mauvaise utilisation ou un ajustement inadéquat du fauteuil gériatrique peut entraîner de graves blessures et même le décès de l'utilisateur dans l'éventualité où il glisse et reste pris sous la tablette.

QUEL EST LE POSITIONNEMENT ADÉQUAT?



Références : http://iucpq.qc.ca/contribute_documents/FlashAgreementNo2_Octobre2012_FINAL.pdf

Direction émettrice	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Entrée en vigueur :	2020-12-04
AMC-DSIEU-6073 (2023-01))		Révision :	2023-01-30