

ACTIVATE / ALLUMAGE / Mise sous tension

A

- Mettre LUCAS 3 sous tension par la fenêtre supérieure de l'étui de transport pour démarrer l'appareil.

*Massage cardiaque est fait simultanément par un coéquipier*




BACK PLATE / Planche dorsale

B

- Lors d'une pause dans les compressions thoraciques, positionner, avec votre coéquipier, la planche dorsale sous l'usager à la hauteur des aisselles. (Arrêt RCR très brève moins de 5 sec.)

*Reprendre les compressions thoraciques aussitôt que la planche dorsale est en place*

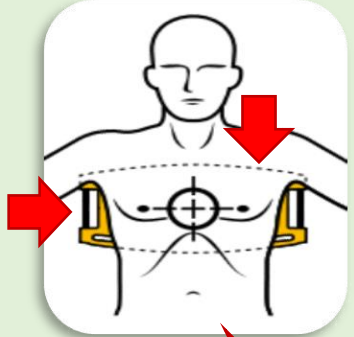

COMPRESSOR / Installation du LUCAS 3

C

- Tenir le compresseur dans le creux de votre bras et activer les anneaux de déverrouillage pour ouvrir les clips de fixation. Fixer les pieds de support du compresseur à la planche dorsale. Vous devriez entendre un clic pour chaque pied de support.
- Soulever légèrement le compresseur par ses poignées pour vérifier que les clips de fixation sont bien enclenchés.

*Massage cardiaque toujours en cours*



Ajustement de la ventouse

1

- #1 Abaisser la ventouse à la poitrine de façon manuelle.
- La ventouse doit être à la même position que les mains lors des compressions thoraciques manuelles.



Pause / Verrou

2

- Appuyer sur le bouton #2 « pause/verrou » pour l'ajustement final de la hauteur et la profondeur du piston.
- Indiquer la position de la ventouse avec un marqueur noir.

*La deuxième pause des compressions thoraciques manuelles (manœuvre de moins 5 sec.)*



Activation du compresseur

3

Vous avez maintenant 2 choix soit :

- Le **mode continu** qui s'applique à l'usager déjà intubé.
- Le **mode 30:2** pour l'usager non intubé, ce qui permet une pause pour les 2 insufflations et une entrée d'air efficace.



Par la suite :

- Tracer votre ligne de référence au marqueur noir afin de surveiller la position de la ventouse en tout temps
- Installer les sangles de stabilisation
- Poursuivre le protocole de RCR selon la procédure d'établissement

