

NOTE

DESTINATAIRES :	Tous les gestionnaires cliniques, personnel en soins infirmiers, inhalothérapeutes, gestion de l'approvisionnement
EXPÉDITEUR :	Dave Métras, conseiller cadre spécialisé en soins infirmiers – volet oncologie et continuum de fin de vie, DSI Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers - Évaluation et harmonisation des produits, DSI
DATE :	Le 8 juillet 2026
OBJET :	RAPPEL - Avis de sécurité – Ensembles pour perfusion par pompe Infusomat Space et ensembles pour perfusion intraveineuse

Nous désirons réitérer que les directives présentées dans la note de service du 25 novembre 2025 relative à l'avis de sécurité publié par le fournisseur B. Braun sont toujours en vigueur et doivent continuer d'être appliquées. Cet avis fait état d'un risque de dysfonctionnement de la valve antiretour sur certains ensembles pour perfusion (voir annexe), soit :

- Les ensembles pour perfusion par pompe *Infusomat Space*
- Les ensembles pour perfusion intraveineuse (gravité)

Ce dysfonctionnement pourrait entraîner un **reflux du médicament de la voie secondaire vers la voie primaire**. De plus, lorsque la valve est en position fermée, il pourrait devenir **difficile, voire impossible, d'amorcer la tubulure**.

Directives à suivre :

Administration de perfusion sous pompe ou par gravité :

- Fermer la pince à glissement supérieure de la tubulure primaire pendant l'écoulement du médicament en secondaire afin de prévenir le reflux.
- Rouvrir la pince à glissement dès la fin de l'administration de la médication
- Valider le bon fonctionnement des montages de perfusion à chaque manipulation et selon la procédure en vigueur

BBraun diffusera un avis lorsque nous pourrons reprendre le processus normal de perfusion secondaire et nous vous aviserons.

Ceci n'est pas un rappel de produit, mais un avis de sécurité.

Santé Québec Montérégie-Ouest

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Pour toutes questions concernant les produits, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse suivante :
[conseillères soins infirmiers.produits.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca](mailto:conseilleres_soins_infirmiers.produits.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca).

DM, RF

**Avis de sécurité – Ensembles pour perfusion par pompe Infusomat Space
et ensembles pour perfusion intraveineuse**

Risque de dysfonctionnement de la valve antiretour sur certains ensembles pour perfusion

GRM	Code produit	Description
1036293	BB354203	TUBULURE PRIMAIRE 264CM 104PO 2 SITES INJECTION S/AIGUILLE A/CLAMPE A/REGULATEUR
1122541	BB363424	TUBULURE POUR POMPE INFUSOMAT MUNIS D'UN FILTRE 1.2 MICRON
1019220	BB354204	TUBULURE PRIMAIRE 262CM 103PO 2 SITES INJECTION S/AIGUILLE A/CLAMPE A/REGULATEUR
1122560	BB363420	TUBULURE AVEC FILTRE 0.2 MICRON
1021328	BB354206	TUBULURE PRIMAIRE 224CM 88PO 3 SITES INJECTION S/AIGUILLE A/CLAMPE A/REGULATEUR
1122568	BB363419	TUBULURE A SANG EN Y POUR POMPE SPACE (490105) A/FILTRE 210 MICRONS
1122543	BB363430	ENS. TUBULURE 3 SITES VALVE ANTI-SIPHON DETACHABLE 123PO 15GTES PR POMPE BBRAUN