






BONNE PRATIQUE : Utilisation d'un moteur portatif

Cette pratique évite le soulèvement du moteur portatif, ce qui diminue le risque de blessure.

Référence : ASSTSAS « Lève-personne sur rail au plafond (LPSRP) à domicile » (2012)

Avant le déplacement...

- 1- Déplacer le moteur portatif à l'aide du chariot prévu à cet effet jusqu'à la chambre de l'utilisateur.
- 2- Placer le chariot sous le rail. (un crochet et une rallonge sont déjà en place sur le rail)
- 3- Utiliser le mécanisme du moteur pour allonger la sangle du moteur.
- 4- Utiliser la tige pour accrocher le moteur portatif sur le mousqueton de la rallonge en place sur le rail.
- 5- Utiliser le mécanisme du moteur pour tendre la sangle du moteur.
- 6- Utiliser la manette pour soulever le moteur du chariot.
- 7- Utiliser le moteur pour déplacer l'utilisateur.

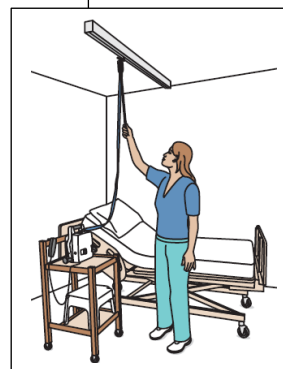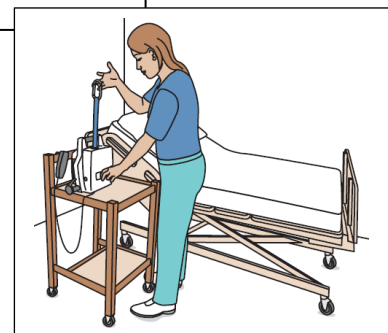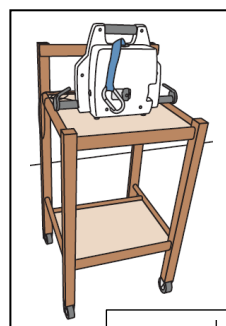

Après le déplacement de l'utilisateur...

- 1- Placer le chariot sous le moteur.
- 2- Utiliser la manette pour descendre le moteur et le déposer sur le chariot.
- 3- Utiliser la tige pour décrocher le moteur portatif du mousqueton de la rallonge en place sur le rail.
- 4- Utiliser le mécanisme du moteur pour rétracter la sangle du moteur.