
DESTINATAIRES : Aux gestionnaires cliniques, à l'ensemble du personnel en soins infirmiers, aux inhalothérapeutes et anesthésistes de l'hôpital Anna-Laberge et de l'hôpital du Suroît

EXPÉDITEURS : **Fayez Aidibe**, Chef de service du génie biomédical, DL
Geneviève Leboeuf, Coordonnatrice des activités cliniques et des pratiques professionnelles en soins infirmiers (intérim), DSIEU
Lucie Verret, Chef adjointe projets spéciaux et harmonisation, DSPEM
Marie-Soleil Lafranchise, conseillère spécialisée en soins infirmiers, DSIEU

DATE : Le 20 novembre 2025

OBJET : **Fonctionnement de la mise à jour de la bibliothèque de médicaments (BM) de la pompe à perfusion Infusomat Space 2e génération de BBRaun**

Lorsque des modifications sont apportées à la bibliothèque de médicaments (BM) par la pharmacie, celles-ci doivent être poussées dans le système informatique par le génie biomédical (GBM), afin que la BM s'actualise dans la pompe.

La mise à jour se télécharge automatiquement dans les pompes **via le réseau Wi-Fi**, à condition que certaines exigences soient respectées (voir le tableau ci-dessous).

Il est donc essentiel que les pompes puissent se connecter au réseau Wi-Fi. Lorsque les pompes sont éteintes, il est recommandé de les sortir des chambres et de les ramener à l'endroit d'entreposage prévu sur l'unité de soins, puisque le Wi-Fi ne se rend pas toujours dans celles-ci.

Concernant la fonctionnalité du transfert de la BM lorsqu'elle est poussée dans le système informatique. Cela s'effectue en deux étapes :

1. **Téléchargement :** La mise à jour se télécharge via Wi-Fi dans la batterie de la pompe, comme en attente, mais ne remplace pas l'ancienne programmation.



Voici ce qui apparaîtra sur la pompe pour indiquer qu'une nouvelle BM a été téléchargée dans la batterie et est en attente d'installation dans la pompe à perfusion.

2. **Mise à jour :** À la suite du téléchargement dans la batterie, la mise à jour s'effectue dans la pompe et l'ancienne programmation est remplacée.



Voici ce qui apparaîtra sur la pompe à perfusion pour indiquer que la BM a été installée.



IMPORTANT

Pour que ces deux étapes soient possibles, voici les conditions dont il faut tenir compte :

Tableau des conditions pour la mise à jour d'une bibliothèque de médicaments (BM)				
Étapes	Pompe éteinte (sans charge)	Pompe éteinte (en charge)	En fonctionnement (en charge ou non)	Dans une Space Station
1. Téléchargement dans la batterie de la BM	Non	Oui	Oui	Non
2. Mise à jour dans la pompe de la BM	Non	Oui	Non	Non

Ainsi, nous comptons sur votre collaboration afin de vous assurer que les conditions requises pour la mise à jour de la bibliothèque de médicaments soient respectées et que vos équipes soient bien informées et soutenues tout au long de cette période d'ajustement.

FA/GL/LV/MSL