

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :	Aux gestionnaires cliniques, à l'ensemble du personnel en soins infirmiers, aux inhalothérapeutes et anesthésistes de l'hôpital Anna-Laberge et de l'hôpital du Suroît
EXPÉDITEUR :	Frédérique Desrochers-Perrault, Chef de service du génie biomédical, DL La pharmacie Marie-Soleil Lafranchise, conseillère spécialisée en soins infirmiers – volet sécurité médicamenteuse, DSI
DATE :	Le 14 septembre 2026
OBJET :	Annonce d'une mise à jour de la bibliothèque de médicaments (BM) des pompes à perfusion 2e génération de BBraun dans le système informatique

Cette note de service vise à vous informer qu'afin d'optimiser la bibliothèque de médicaments (BM) et de répondre adéquatement aux besoins des différentes unités de soins, tout en assurant la sécurité des usagers, une mise à jour de la bibliothèque de médicaments des pompes à perfusion BBraun – 2^e génération aura lieu **lundi 14 septembre 2026**.

Il est essentiel que chaque mise à jour soit transférée dans les plus brefs délais dès qu'elle est poussée dans le système informatique par le GBM.

Nous demandons donc aux chefs d'unités de s'assurer que l'ensemble des pompes à perfusion reçoivent correctement la mise à jour. Voici un rappel de la note de service qui explique le [Fonctionnement de la mise à jour de la bibliothèque de médicaments de la pompe à perfusion Infusomat Space 2^e génération de BBraun](#)

Tableau des conditions pour la mise à jour d'une bibliothèque de médicaments (BM)				
Étapes	Pompe éteinte (sans charge)	Pompe éteinte (en charge)	En fonctionnement (en charge ou non)	Dans une Space Station
1. Téléchargement dans la batterie de la BM	Non	Oui	Oui	Non
2. Mise à jour dans la pompe de la BM	Non	Oui	Non	Non

Le tableau suivant présente les principales modifications apportées.

Médicament I.V. concerné	Modification	Unité touchée
Modifications qui seront effectuées dans la pompe volumétrique		
Sulfate de magnésium	Ajout de deux doses : 1) 1g 2) 2g	SOP
Lactate Ringer	Ajout dans la bibliothèque de la SOP	SOP
Milrinone	Ajustement de la programmation. Retrait de la dose de charge.	Urgence/SI
Rocuronium	Ajustement de la limite infranchissable à 16mcg/kg/min afin que cela concorde avec l'OIPI	Urgence/SI
Midazolam	Ajustement de la dose bolus à 0.02mg/kg	Urgence/SI
Modifications qui seront effectuées dans la pompe pousse-seringue		
Flolan en nébulisation	Ajout de dose 15 000ng	Urgence/SI
Lidocaïne 1 %	Ajout de la dose 10 mg/mL	SOP
Lidocaïne 2 %	Ajout de la dose 20 mg/mL (2mg/kg/heure)	SOP

Validation de la version de la BM dans la pompe à perfusion

Il est possible de valider la version de la bibliothèque de médicaments (BM) dans la pompe à perfusion en suivant les étapes ci-dessous :

1. Dans le **Choix de bibliothèque**
2. Sélectionner **Perfusion de base**
3. Sélectionner **État**
4. Sélectionner **Information médicaments**
5. Vérifier la **date affichée (année/mois/jour)**

À la suite de la mise à jour, la date qui devrait apparaître est : **2026-09-14**.