



DESTINATAIRES :	Aux gestionnaires cliniques, à l'ensemble du personnel en soins infirmiers, aux inhalothérapeutes et anesthésistes de l'hôpital Anna-Laberge et de l'hôpital du Suroît
EXPÉDITEURS :	Fayez Aidibe, Chef de service du génie biomédical, DL Geneviève Leboeuf, Coordinatrice des activités cliniques et des pratiques professionnelles en soins infirmiers (intérim), DSIEU Lucie Verret, Chef adjointe projets spéciaux et harmonisation, DSPM Marie-Soleil Lafranchise, conseillère spécialisée en soins infirmiers – volet sécurité médicamenteuse, DSIEU Hélène Soriya Kvann, Adjointe au chef - système d'information pharmaceutique et des technologies, DSPM
DATE :	Le 21 novembre 2025
OBJET :	Annonce d'une mise à jour de la bibliothèque de médicament (BM) de la pompe à perfusion 2e génération de BBraun dans le système informatique

Cette note de service vise à vous informer qu'afin d'optimiser la bibliothèque de médicaments et de répondre adéquatement aux besoins des différentes unités de soins, tout en assurant la sécurité des usagers, une mise à jour de la bibliothèque de médicaments des pompes à perfusion BBraun – 2e génération aura lieu **vendredi 21 novembre 2025**.

Il est essentiel que **chaque mise à jour soit transférée dans les plus brefs délais** dès qu'elle est poussée dans le système informatique par le GBM.

Nous vous demandons donc de vous assurer que l'ensemble de vos pompes à perfusion reçoivent correctement la mise à jour. Au besoin se référer à la note de service suivante :

→ [Fonctionnement de la mise à jour de la bibliothèque de médicaments de la pompe à perfusion Infusomat Space 2e génération de BBraun](#)

Le tableau suivant présente les principales modifications qui ont été effectuées :

Médicament concerné	Modification	Unité touchée
Modifications qui seront effectuées avec la mise à jour		
Héparine IV	Ajout d'une limite infranchissable IV à 35mL/h	Toutes
Milrinone	Ajout de deux (2) entrées programmées 1- Dose de charge 2- Perfusion	Urgence/SI
Azithromycine	Modification du sac de dilution. Retrait du mini bag +	Toutes
Infliximab	Ajout de deux (2) entrées programmées 1- Perfusion 2- Perfusion variable démarrant à 10 mL/h	Urgence/SI
Immunoglobuline	Modification de l'affichage pour du mL/h	Toutes
Ocytocine	Ajustement de la limite franchissable à 300 mL/h (soit 200mUI/min). On peut choisir le type d'affichage souhaité.	Unité d'obstétrique. Urgence/SI
Magnésium	Ajout des doses de 1g, 3g, 4g et 5g	Toutes
Modifications qui ont déjà été effectuées		
Midazolam	Modification de la programmation pour mg/kg/h Limite inférieure infranchissable retirée	Urgence/SI, SOP SOP
Milrinone	Ajustement du temps de la dose de charge à 10 minutes	Toutes

Validation de la version de la BM

Il est possible de valider la version actuelle de la bibliothèque de médicaments (BM) dans la pompe à perfusion en suivant les étapes ci-dessous :

1. Dans le **Choix de bibliothèque**
2. Sélectionner **Perfusion de base**
3. Sélectionner **État**
4. Sélectionner **Information médicaments**
5. Vérifier la **date affichée (année/mois/jour)**

À la suite de la mise à jour d'aujourd'hui, la date qui devra apparaître est : **2025-11-21**.