

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :	Aux gestionnaires cliniques, à l'ensemble du personnel en soins infirmiers, aux inhalothérapeutes et anesthésistes de l'hôpital Anna-Laberge et de l'hôpital du Suroît
EXPÉDITEUR :	Fayez Aidibe, Chef de service du génie biomédical, DL Josée Conesa, Adjointe au chef, DMSP Marie-Soleil Lafranchise, conseillère spécialisée en soins infirmiers – volet sécurité médicamenteuse, DSI
DATE :	Le 26 juin 2026
OBJET :	Annonce d'une mise à jour de la bibliothèque de médicaments (BM) des pompes à perfusion 2e génération de BBraun dans le système informatique

Cette note de service vise à vous informer qu'afin d'optimiser la bibliothèque de médicaments (BM) et de répondre adéquatement aux besoins des différentes unités de soins, tout en assurant la sécurité des usagers, une mise à jour de la bibliothèque de médicaments des pompes à perfusion BBraun – 2e génération aura lieu lundi 29 juin 2026.

Il est essentiel que chaque mise à jour soit transférée dans les plus brefs délais dès qu'elle est poussée dans le système informatique par le GBM.

Nous demandons donc aux chefs d'unités de s'assurer que l'ensemble des pompes à perfusion reçoivent correctement la mise à jour. Voici un rappel de la note de service qui explique le [Fonctionnement de la mise à jour de la bibliothèque de médicaments de la pompe à perfusion Infusomat Space 2e génération de BBraun](#)

Tableau des conditions pour la mise à jour d'une bibliothèque de médicaments (BM)				
Étapes	Pompe éteinte (sans charge)	Pompe éteinte (en charge)	En fonctionnement (en charge ou non)	Dans une Space Station
1. Téléchargement dans la batterie de la BM	Non	Oui	Oui	Non
2. Mise à jour dans la pompe de la BM	Non	Oui	Non	Non

Le tableau suivant présente les principales modifications apportées, dont certaines sont en cohérence avec les ajustements effectués aux OIPI :

Médicament I.V. concerné	Modification	Unité touchée
Modifications qui seront effectuées dans la pompe volumétrique		
Insuline	Entrée d'insuline modifiée. Chaque dose est maintenant entrée individuellement.	Tous
	Ajout de limite infranchissable haute	Med/chir/autres et Urgence/SI
	Ajout de la concentration 100 unités/250 mL	Urgence/SI
Milrinone	Modification de la programmation. Au lieu de deux (2) entrées (dose de charge et perfusion) il y aura qu'une seule entrée. La dose de charge sera accessible via la sélection du médicament.	Urgence/SI
Cisatracurium	Modification de la concentration pour 2mg/mL	Urgence/SI
Fer saccharose	Ajout de deux (2) doses 1) 400 mg 2) 500 mg	Tous
Ciprofloxacine	Ajout de deux (2) doses 1) 200 mg 2) 400 mg	Tous
Thiamine	Ajout de trois (3) doses 1) 200 mg 2) 300 mg 3) 500mg	Tous
Mirikizumab	Ajout de deux (2) doses 1) 300 mg 2) 900 mg	CLSC
Modifications qui seront effectuées dans la pompe pousse-seringue		
Thiamine	Ajout de trois (3) doses 1) 100 mg 2) 200 mg 3) 300 mg	Tous
Fluconazole	Ajout d'une dose 1) 100 mg	Tous

Validation de la version de la BM dans la pompe à perfusion

Il est possible de valider la version de la bibliothèque de médicaments (BM) dans la pompe à perfusion en suivant les étapes ci-dessous :

1. Dans le **Choix de bibliothèque**
2. Sélectionner **Perfusion de base**
3. Sélectionner **État**
4. Sélectionner **Information médicaments**
5. Vérifier la **date affichée (année/mois/jour)**

À la suite de la mise à jour, la date qui devrait apparaître est : **2026-06-29**.

FA/JC/MSL