

ÉCHO LABO

Juillet 2025

Édition no 5

Voici la cinquième édition de l'Écho-labo.

Suggestions, commentaires ou proposition de sujet? Contactez le service à la clientèle des laboratoires :

CISSSMC : laboratoire_hrr.ciassmc16@ssss.gouv.qc.ca

CISSSME : sac.laboratoirehpb.ciassme16@ssss.gouv.qc.ca

CISSSMO : genevieve.daoust.ciassmo16@ssss.gouv.qc.ca

**Pour un prélèvement sans accroc,
c'est le bon contenant qu'il faut!**



- Protozoaires entériques (parasites)
CODE SIL-P: PARAT
- C. difficile GDH et toxines; Selles
CODE SIL-P: CLOSD
- H. pylori, Ag; Selles
CODE SIL-P: HPYLO

- Oeufs et parasites par microscopie; Selles
CODE SIL-P: LSPIN



- Culture de selles
CODE SIL-P: SELLE



Remplissage des tubes de prélèvements

Pourquoi doit-on respecter le nombre de millilitre demandé?

Un remplissage inadéquat des tubes de prélèvements sanguins peut conduire à des **résultats d'analyse erronés**.

Cette erreur peut **influencer l'interprétation clinique** et, potentiellement, **affecter la prise en charge de l'usager**

TUBES CITRATÉS EN PLASTIQUE	AUTRES TUBES
• L'indicateur de remplissage se situe autour du tube sous forme de bande dépolie. Il s'agit du volume MINIMAL requis pour l'acceptation du spécimen.	• Remplir le tube jusqu'à l'indicateur de remplissage; • Il est important de respecter le niveau de remplissage des tubes afin d'éviter des interférences sur les résultats causés par un mauvais ratio sang/additifs; • Ne jamais transvider deux tubes même si les deux contiennent le même additif.