
DESTINATAIRES :	Tous les employés, gestionnaires et médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest
EXPÉDITEUR :	Guillaume Ferland, chef de service entreposage, distribution et reprographie, DL Brigitte Gareau, conseillère en soins infirmiers – volet santé mentale, DSIEU
DATE :	Le 5 avril 2022
OBJET :	Écoulement des stocks et prolongement de la durée de vie des tests BD Veritor

Par souci de roulement des stocks, le MSSS nous demande d'écouler complètement les tests de détection antigénique rapide BD Veritor, malgré la péremption sur l'étiquette du produit, et ce, dans les meilleurs délais. Nous allons donc débiter la distribution dans nos établissements. Chaque travailleur de la santé recevra une trousse lors d'un dépistage dans une clinique désignée de dépistage Covid19 (CDD). (Aide-mémoire clinique disponible sur [l'intranet](#).)

Nous tenons à vous informer que Santé Canada avait émis un amendement le 18 octobre 2021 dernier autorisant la prolongation de la durée de conservation des tests BD Veritor pour une période totale de 16 mois. Santé Canada a obtenu les données requises d'une étude menée par le Laboratoire national de microbiologie.

Veuillez suivre le guide ci-dessous pour déterminer la date de péremption de votre produit :

Si la date de péremption imprimée sur l'étiquette du produit est en 2021 :

- La date de fabrication était de 6 mois avant la date de péremption imprimée.
- La nouvelle date de péremption sera fixée à 10 mois après la date imprimée sur l'étiquette.

Par exemple, les produits dont la date de péremption imprimée est le 2021-06-09 ont maintenant une nouvelle date de péremption, soit le 2022-04-09.

Si la date de péremption imprimée sur l'étiquette du produit est en 2022 :

- La date de fabrication était de 12 mois avant la date de péremption imprimée.
- La nouvelle date de péremption sera fixée à 4 mois après la date imprimée sur l'étiquette.

Par exemple, les produits dont la date de péremption imprimée est le 2022-01-09 ont maintenant une nouvelle date de péremption, soit le 2022-05-09.

Prendre note des mesures suivantes :

- Afin de *maintenir la conservation du produit* jusqu'à la nouvelle date de péremption, il est important de ne pas ouvrir les sacs des tubes de réactif trop d'avance. Il est recommandé de les ouvrir au fur et à mesure de leur utilisation.
- Si des flocons sont visibles dans les tubes de réactif, le produit peut être utilisé quand même car il sera filtré au dépôt des gouttes sur la bandelette réactive.

- Il est important de ne pas utiliser d'autres écouvillons que ceux distribués dans la trousse.
- Il est important avant l'utilisation du contenu de la trousse de faire les contrôles de qualité qui sont inclus dans la trousse.

Nous sollicitons votre aide pour procéder à l'affichage de cette note de service afin que tous les utilisateurs de ce produit puissent être informés.

Nous vous remercions de votre collaboration.

GF, BG