

DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS ET DE LA QUALITÉ
PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES
INFECTIONS

ENTRETIEN DES CHAISES D'AISANCE

- LES CHAISES D'AISANCE DOIVENT DÉSINFECTÉES AU COMPLET (DESSUS – DESSOUS – CÔTÉS) APRÈS CHAQUE UTILISATION, QUE LE PATIENT SOIT EN ISOLEMENT OU NON.
- LES SERVIETTE DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE 0,5% PEUVENT ÊTRE UTILISÉES EN ENTRETIEN RÉGULIER (LORSQUE LE PATIENT N'EST PAS EN ISOLEMENT).
- LORSQUE LA CHAISE EST UTILISÉE POUR UN PATIENT QUI PRÉSENTE DES DIARRHÉES, CELLE-CI DOIT D'ABORD ÊTRE LAVÉE AVEC LE VIREX, RINCÉE À L'EAU ET DÉSINFECTÉE AVEC LA SOLUTION DE CHLORE (après chaque utilisation)

Note : le recouvrement des chaises ne doit pas présenté de fissures, de trous, etc.