

Direction des soins infirmiers et de la qualité

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Utilisation des appareils		No
Méthode : Entretien des toiles de lève-patients Medi-Toile		Page 1 de 4
Préparé par : Chantal Bélisle, conseillère, service de prévention et contrôle des infections	Approuvé par :	Date : 17-07-2012
		Révision :

1. Définition

La toile de levier en tissu de polyester est un équipement utilisé pour le transfert des patients à mobilité réduite. Selon les pratiques de base, tous les équipements partagés doivent être soumis à des méthodes de nettoyage et de désinfection entre chaque patient.

2. Buts

- Éviter la transmission de microorganismes pathogènes;
- Respecter les pratiques de base;
- Prodiguer des soins de santé sécuritaires;
- Préserver l'intégrité de l'équipement.

3. Matériel requis

- Eau
- Savon à lessive
- Sacs de transport à lingerie souillée en plastique jetables
- Équipement de protection individuelle (EPI)
 - gants non stériles à usage unique
 - blouse jaune à manches longues
 - masque
 - protection oculaire
- Lingettes ou bouteille prête à l'emploi de peroxyde d'hydrogène 0,5% (Accel TB)

Ne jamais utiliser de produit tel que l'hypochlorite de sodium (eau de javel), car il détériore les fibres de polyester et diminue la résistance des tissus, ce qui compromet la sécurité des patients.

PROCÉDÉS**Pour une toile visiblement propre**

1. Mettre des gants.
2. Disposer la toile utilisée dans un sac à lingerie souillée (sacs bleus jetables) pour le transport vers la salle de lavage.
3. Procéder à l'hygiène des mains.

Dans la salle de lavage

4. Mettre des gants.
5. Déposer la toile dans la machine à laver.
6. Déposer le sac bleu souillé dans les ordures.
7. Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains.
8. Nettoyer et désinfecter les surfaces touchées avec un produit au peroxyde d'hydrogène 0,5%.
9. Ajuster la quantité de détergent à lessive et laver à l'eau tiède (distribution de détergent automatique dans les laveuses de certaines installations).
10. Suspendre pour sécher.

PRINCIPES

Appliquer les pratiques de base.

Transporter l'équipement contaminé de façon sécuritaire.

Appliquer les pratiques de base.

Appliquer les pratiques de base.

Manipuler les équipements contaminés de façon sécuritaire.

Jeter conformément à la politique de gestion des déchets en vigueur dans l'établissement.

Appliquer les pratiques de base.

Assurer la propreté des surfaces.

Respecter les recommandations du fabricant.

Respecter les recommandations du fabricant et préserver l'intégrité des toiles.

PROCÉDÉS**Pour une toile visiblement souillée**

1. Revêtir l'EPI.
2. Disposer la toile utilisée dans un sac à lingerie souillée (sacs bleus jetables) pour le transport vers la salle d'utilité souillée.
3. Retirer l'EPI et procéder à l'hygiène des mains.

Dans l'utilité souillée

4. Revêtir l'EPI.
5. Rincer la toile dans le lavabo de la salle d'utilité souillée.
6. Essorer la toile et la placer dans un nouveau sac de lingerie souillée (sacs bleus jetables).
7. Retirer l'EPI et procéder à l'hygiène des mains.
8. Remettre des gants, nettoyer et désinfecter le lavabo et les surfaces souillées avec un produit de peroxyde d'hydrogène 0,5%.
9. Retirer les gants et procéder de nouveau à l'hygiène des mains.

Dans la salle de lavage

10. Mettre des gants et déposer la toile dans la laveuse.
11. Déposer le sac bleu souillé dans les ordures.

PRINCIPES

Appliquer les pratiques de base.

Transporter l'équipement contaminé de façon sécuritaire.

Appliquer les pratiques de base.

Appliquer les pratiques de base et protéger le personnel contre les éclaboussures et les souillures.

Éliminer les matières organiques et les souillures.

Transporter l'équipement contaminé de façon sécuritaire.

Appliquer les pratiques de base.

Assurer la propreté des surfaces.

Appliquer les pratiques de base.

Manipuler les équipements contaminés de façon sécuritaire.

Jeter conformément à la politique de gestion des déchets en vigueur dans l'établissement.

PROCÉDÉS	PRINCIPES
12. Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains.	Appliquer les pratiques de base.
13. Remettre des gants et nettoyer les surfaces touchées avec un produit de peroxyde d'hydrogène 0,5%.	Assurer la propreté des surfaces.
14. Retirer les gants et procéder de nouveau à l'hygiène des mains.	Appliquer les pratiques de base.
15. Ajuster la quantité de détergent à lessive et laver à l'eau tiède (distribution de détergent automatique dans les laveuses de certaines installations).	Respecter les recommandations du fabricant.
16. Répéter l'opération de lavage une deuxième fois.	S'assurer de la propreté de l'équipement.
17. Suspendre pour sécher.	Respecter les recommandations du fabricant et préserver l'intégrité des toiles.

Références

Entretien des toiles de lève-patients, service de prévention des infections. Révision octobre 2010.
Instruction d'utilisation, Médi-Toile Inc.

Consultation

Renée Gauthier, conseillère cadre, service de prévention et contrôle des infections

Lucie Moisan
Directrice des soins infirmiers et de la qualité

17 juillet 2012
date