

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Utilisation des appareils		No
Méthode : Nettoyage et désinfection des télémétries Infinity M300 de Dräger et de ses composantes entre chaque patient		Page 1 de 3
Préparé par : Chantal Bélisle, conseillère, Service PCI et Renée Gauthier, conseillère-cadre, Service PCI	Approuvé par : Directrice des soins infirmiers et de la qualité	Date : 13 janvier 2012
		Révision :

1. Définition

La télémétrie Infinity (boîtier de télémétrie, câbles et chargeur) est un équipement utilisé pour plusieurs usagers. L'unité centrale et l'écran sont situés à l'unité des Soins Intensifs et les télémétries sont assignées aux patients sur les unités de soins, selon les besoins. Selon les pratiques de base, tous les appareils partagés doivent être soumis à des méthodes de nettoyage et de désinfection entre chaque utilisateur.

2. Buts

- Éviter la transmission de microorganismes pathogènes d'un usager à un autre.
- Respecter l'application des pratiques de base.
- Préserver l'intégrité de l'équipement.
- Prodiquer des soins de qualité.
- Procéder au nettoyage et à la désinfection de manière sécuritaire (pour les utilisateurs).

3. Matériel requis

- Eau
- Savon
- Chiffon doux à usage unique
- Équipement de protection individuelle
 - Blouse à manches longues
 - Gants non stériles
 - Masque de procédures
 - Protection oculaire
- Lingettes de peroxyde d'hydrogène à 0,5% (ex. : Accel TB) désinfection sans précautions additionnelles
- Lingettes pré-imbibées d'eau de javel Chlorox 0,55% (dilution d'hypochlorite de sodium 1 :10) désinfection avec précautions additionnelles

PROCÉDÉS**Nettoyage et désinfection de la télémétrie (boîtier, câbles et chargeur) pour la clientèle sans précautions additionnelles.**

1. Procéder à l'hygiène des mains et enfiler des gants non stériles.
2. Si souillures visibles, nettoyer l'équipement avec de l'eau et du savon (linge bien essoré). Enlever tout matériau adhésif (ex. : diachylon) sur les électrodes.
3. Rincer l'équipement avec de l'eau (linge bien essoré).
4. Sécher avec une serviette propre.
5. Désinfecter l'équipement (chacun des câbles individuellement) avec une lingette pré-imbibée de peroxyde d'hydrogène 0,5%. Éliminer l'excès de solution désinfectante sur une serviette de papier si nécessaire.
6. Laisser sécher (ne pas essuyer).
7. Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains.

Nettoyage et désinfection de la télémétrie (boîtier, câbles et chargeur) clientèle avec précautions additionnelles.

1. Procéder à l'hygiène des mains.
2. Revêtir l'équipement de protection individuelle.
3. Si souillures visibles, nettoyer l'équipement avec de l'eau et du savon (linge bien essoré). Enlever tout matériau adhésif (ex. : diachylon) sur les électrodes.

PRINCIPES

Appliquer les pratiques de base.
Manipuler les lingettes désinfectantes de manière sécuritaire.

Enlever les matières organiques sur les pièces de l'équipement.
Éviter la dispersion de liquide dans le boîtier de la télémétrie.

Éliminer les résidus de savon et éviter la dispersion de liquide à l'intérieur du boîtier de la télémétrie.

Respecter les recommandations du fabricant.
Préserver l'intégrité de l'équipement.

Respecter le temps de séchage nécessaire à la destruction des microorganismes.

Appliquer les pratiques de base.

Appliquer les pratiques de base.

Protéger le personnel contre les éclaboussures et assurer la manipulation des lingettes de chlore de façon sécuritaire.

Enlever les matières organiques sur les pièces de l'équipement.
Éviter la dispersion de liquide dans le boîtier de la télémétrie.

PROCÉDÉS	PRINCIPES
4. Rincer l'équipement avec de l'eau (linge bien essoré).	Éliminer les résidus de savon et éviter la dispersion de liquide à l'intérieur du boîtier de la télémétrie.
5. Sécher avec une serviette propre.	
6. Désinfecter l'équipement (chacun des câbles individuellement) avec une lingette pré-imbibée d'eau de javel Chlorox 0,55% (essorer sur une serviette de papier pour retirer l'excédent de liquide).	Respecter les recommandations du fabricant. Préserver l'intégrité de l'équipement.
7. Laisser sécher (ne pas essuyer).	Respecter le temps de séchage nécessaire à la destruction des microorganismes.
8. Retirer l'équipement de protection individuelle et procéder à l'hygiène des mains.	Appliquer les pratiques de base.

Références

Manuel d'utilisation du fabricant Dräger pour télémétries Infinity et Infinity M300

Manuel d'utilisation Infinity CentralStation Logiciel VF8

Lucie Moisan
Directrice des soins infirmiers et de la qualité

13 janvier 2012
date