
DESTINATAIRES : À tous les médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest

EXPÉDITEUR : Le Département d'imagerie médicale

DATE : Le 2 juillet 2025

OBJET : **Consultation des examens d'imagerie médicale disponibles au DSQ via le PACS Synapse par le module Ad Hoc XDSi (rappel)**

MISE EN CONTEXTE

C'est quoi le module Ad Hoc XDSi ?

C'est un outil développé par **Christie Innomed** à partir du PACS pour aider les professionnels de la santé à **retrouver facilement les examens d'imagerie médicale** (comme des radiographies, IRM, etc.) d'un patient, même si ces examens ont été faits dans un autre hôpital ou clinique hors du CISSSMO.


GUIDE D'UTILISATION

Lancement de la page Web du Module Ad Hoc XDSi

La page Web qui permet le chargement sur demande d'examens d'intérêt peut être lancée de différents points d'accès :

- Barre d'outils de Synapse
- PowerJacket

Ces accès permettront à l'utilisateur de lancer la page Web du module Ad Hoc et d'y saisir le numéro d'assurance maladie (NAM) du patient pour lequel il désire rapatrier des examens. **A noter, si vous n'avez pas accès à l'icône « Demande AdHoc », vous devez faire une demande à l'informatique afin qu'il vous octroie les droits sur le réseau.**

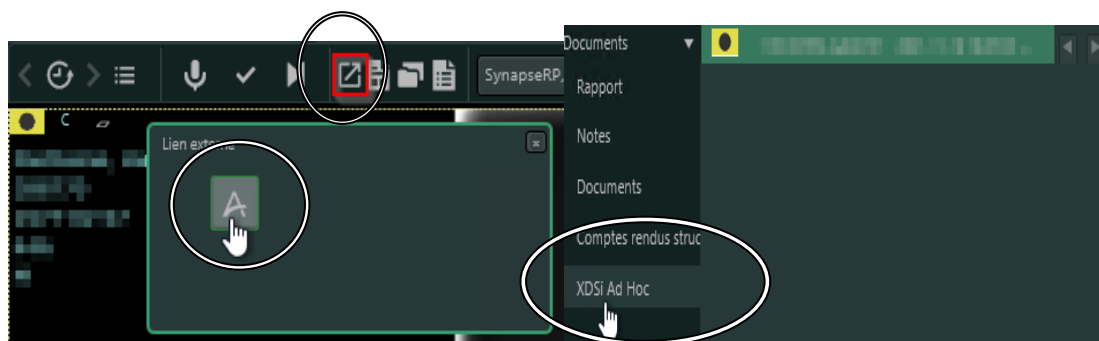

Lancement à partir de la barre d'outils


Lancement à partir du PowerJacket

L'application lancera une page Web indépendante de l'application de Synapse. Cela peut prendre quelques secondes.

L'utilisateur devra fermer cette page Web lorsqu'il aura terminé sa recherche.

Fonctionnalités de l'outil


Saisir la RAMQ du patient

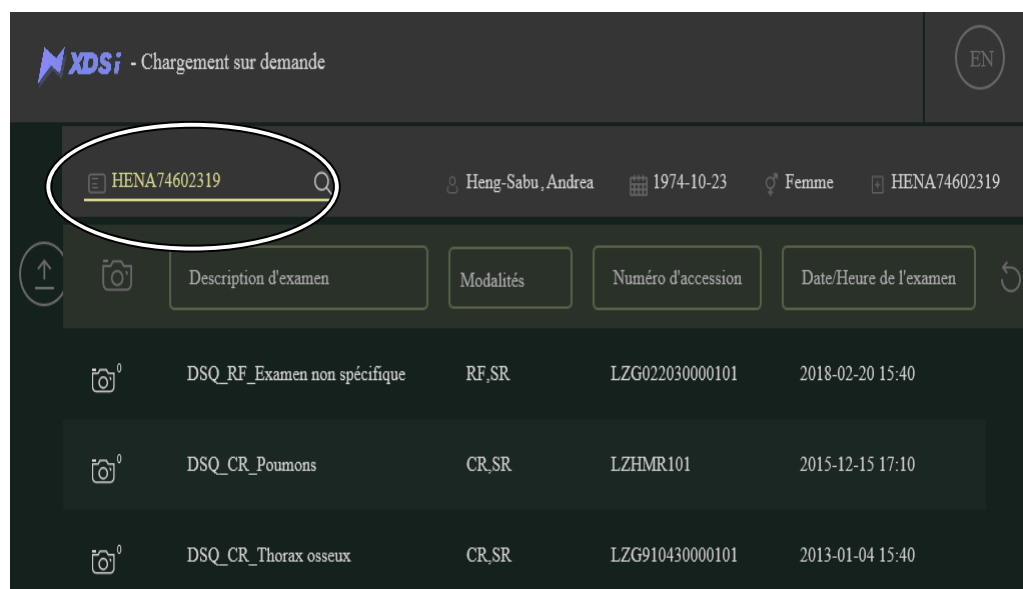

Pour sélectionner un examen à charger, déplacez votre curseur sur la ligne représentant cet examen et cliquez sur la case à cocher qui s'affichera.

Sélectionner un ou plusieurs examens puis initier le chargement en cliquant sur la flèche à gauche de la barre des titres. Notez que le total de des examens sélectionnés est affiché.

Lors de l'opération de chargement, l'icône de flèche changera pour un cercle : 
Un crochet vert à gauche du libellé de l'examen indique que le chargement de cet examen est terminé.

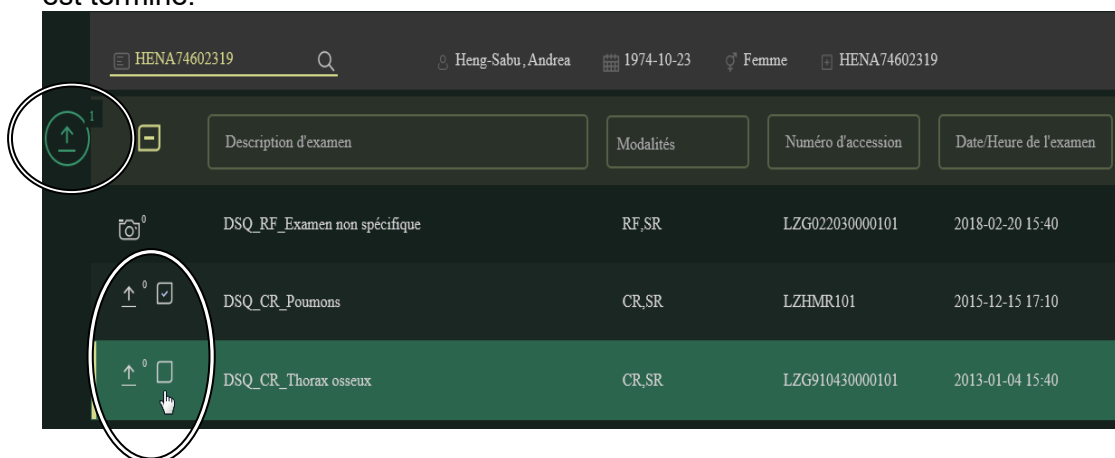

Visualisation des examens chargés

Tous les examens									
Priorité		Nom du patient	ID Patient externe	N° d'examen	ID Patient	Protocole	Code de proc...	Modalité	Nombre d'images
DSQ									
DSQ		...	...	...	...	DSQ_CR_Poumons	6831TH01	DX	2
DSQ		...	...	...	...	DSQ_US_Abdomen	6832AB01	US	58
DSQ		...	...	...	...	DSQ_US_Abdomen	6832AB01	US	85
DSQ		...	...	...	...	DSQ_CR_Main	6831ES10	DX	3
DSQ		...	...	...	...	DSQ_CR_Poumons	6831TH01	DX	2
DSQ		...	...	...	...	DSQ_RF_Colonne	6831CO51	RF	4
DSQ		...	...	...	...	DSQ_CR_Chevilles	6831EI06	DX	2
DSQ		...	...	...	...	DSQ_CR_Pied	6831EI07	DX	3
DSQ		...	...	...	...	DSQ_CR_Abdomen	6831AB01	CR	3
DSQ		...	...	...	...	DSQ_CR_Avant-bras	6831ES08	DX	4
DSQ		...	...	...	587444	DSQ_CR_Humérus	6831ES06	DX	4

Lorsque le patient est connu de l'établissement, le numéro de dossier de l'examen externe sera remplacé par le numéro de dossier de votre établissement.

Lorsque le statut indiqué est Finalized ou Dictated, le rapport de l'examen est visualisable dans le PowerJacket.

L'utilisateur devra fermer cette page Web lorsqu'il aura terminé sa recherche.

Pour aide, support et formation, vous pouvez contacter la coordonnatrice PACS de votre établissement.