

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- APPAREIL À BIOFEEDBACK

MATÉRIEL REQUIS

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS

Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres


Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :

1. L'appareil au complet
2. Les fils de l'appareil
3. L'émetteur

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE

En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL

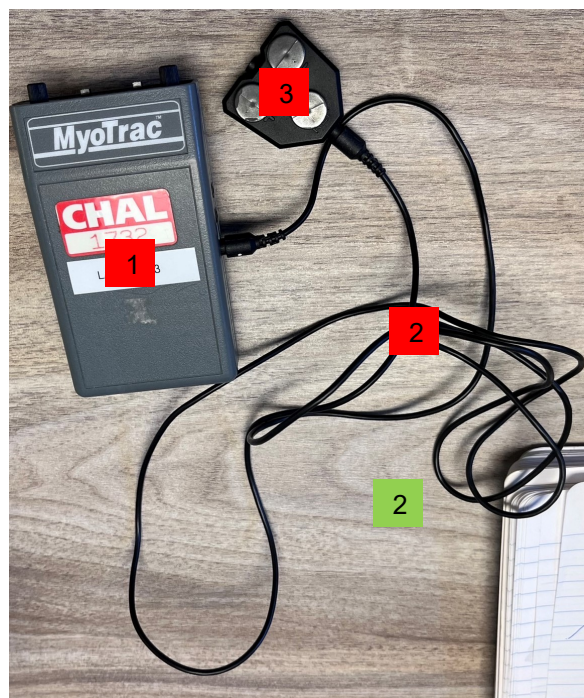

FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ

FRÉQUENCE :

- Entre les différents usagers
- Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch

RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION :

- L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.)
- Les personnes désignées par le gestionnaire et/ou service d'hygiène et salubrité



HIGH TOUCH



LOW TOUCH