

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION-

APPAREIL D'ÉVALUATION DU VOLUME VÉSICAL (BLADDER SCAN)

MATÉRIEL REQUIS

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS

Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres

Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :

1. Le plateau
2. Le boîtier de l'appareil
3. La poignée de transport
4. Le cordon de la sonde ainsi que la sonde
5. La bouteille de gel

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE


Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres

Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :

1. Le plateau et l'espace de rangement
2. Le boîtier de l'appareil et l'assécher immédiatement
3. La poignée de transport
4. Le cordon de la sonde ainsi que la sonde
5. La bouteille de gel
6. Le dessous du plateau
7. La tige (du haut vers le bas)
8. Le support à lingettes
9. Les pattes et les roues

En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL

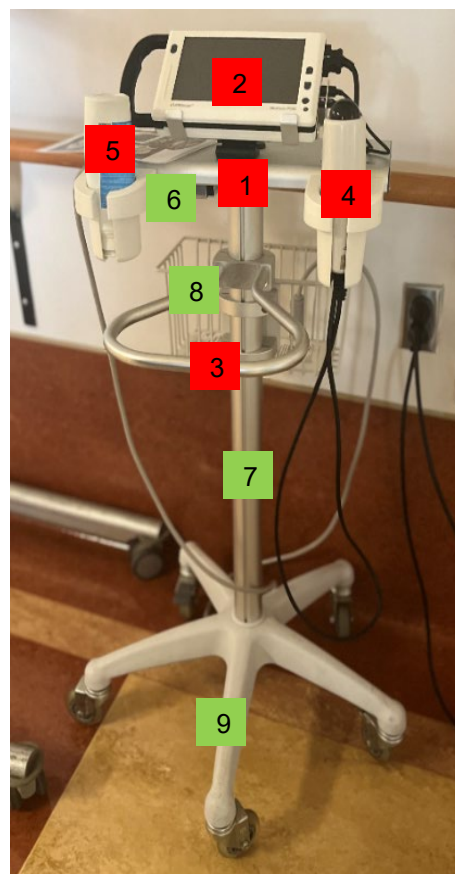

FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ

FRÉQUENCE :

- Entre les différents usagers
- Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch

RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION :

- L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.)
- Les personnes désignées par le gestionnaire et/ou service d'hygiène et salubrité



HIGH TOUCH



LOW TOUCH