

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- APPAREIL DE MUSCULATION ET ACCESSOIRES

MATÉRIEL REQUIS

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS

Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres

Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :

1. Le sélecteur de charges
2. Les accessoires utilisés
3. La barre de traction
4. Les poignées de l'appareil

VISUEL

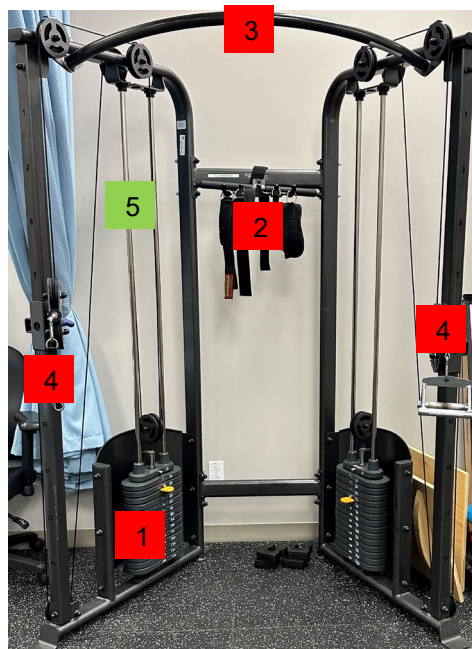

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE

Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres

Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :

1. Le sélecteur de charges
2. Les accessoires utilisés
3. La barre de traction
4. Les poignées de l'appareil
5. Les cordes
6. Tous les accessoires

En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ

FRÉQUENCE :

- Entre les différents usagers
- Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch

RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION :

- L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.)
- Les personnes désignées par le gestionnaire et/ou service d'hygiène et salubrité



HIGH TOUCH



LOW TOUCH