


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- APPAREIL DE ULTRASONOTHÉRAPIE

MATÉRIEL REQUIS			
Entre usagers	- Gants à usage unique - Lingette de détergent-désinfectant	Après usage auprès d'un usager sous précautions additionnelles ou périodique	- Gants à usage unique - Linge en microfibre - Solution de détergent-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS
Mettre des gants propres Désinfectez les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Les boutons et l'écran 2. La tête de l'appareil et son fil 3. Les poignées du chariot et la tablette

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE
Mettre des gants propres Désinfectez les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Les boutons et l'écran 2. La tête de l'appareil et son fil 3. Les poignées du chariot et la tablette 4. Le fil électrique 5. Le chariot et les roues.

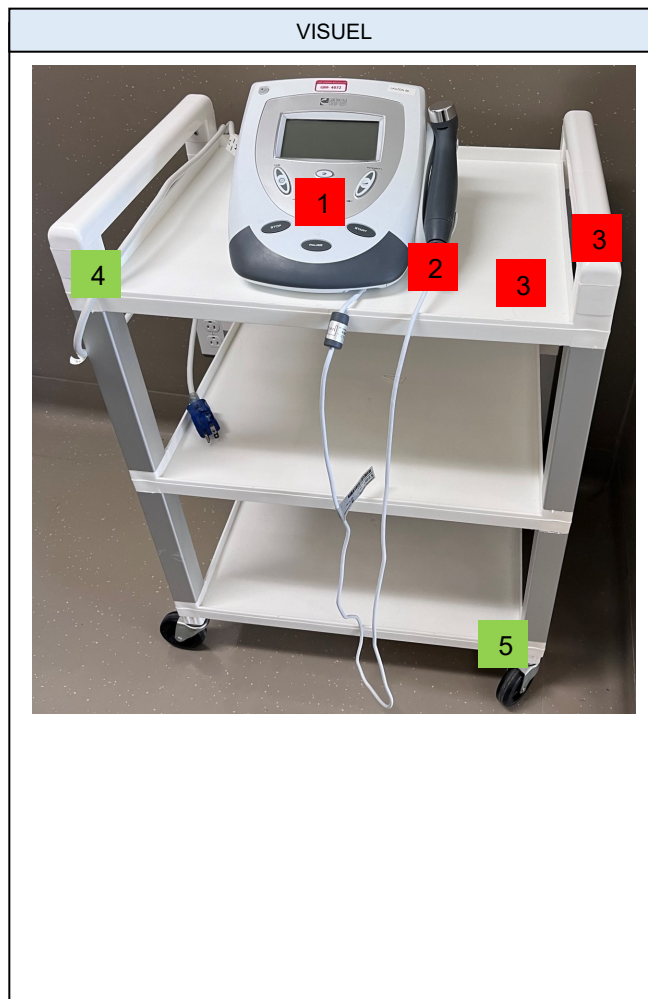

FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
PAR L'UTILISATEUR (Travailleur) - Entre les usagers - Désinfection sous précautions additionnelles (sauf contact + et contact double). LA PERSONNE DÉSIGNÉE PAR LE GESTIONNAIRE : - Désinfection quotidienne : High touch & low touch; - Désinfection sous précautions additionnelles Contact + et contact double seulement

HIGH TOUCH	LOW TOUCH