

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- ARC POUR AMPLITUDE ARTICULAIRE MEMBRE SUPÉRIEUR (ROLYAN)

MATÉRIEL REQUIS	
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS S'assurer de l'intégrité du bois, s'il y a lieu, aviser le gestionnaire si l'équipement n'est plus intact. Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. La base de l'arc 2. Les tubulures blanches 3. Les anneaux de couleurs	VISUEL 
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.	FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire et/ou service d'hygiène et salubrité



HIGH TOUCH



LOW TOUCH