


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- BAGUETTES DE RÉÉDUCATION SENSORIELLE (DIFFÉRENTES TEXTURES)

MATÉRIEL REQUIS	
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS S'assurer de l'intégrité du matériel, s'il y a lieu, aviser le gestionnaire si l'équipement n'est plus intact. Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Les pièces texturées 2. Les poignées	VISUEL 
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Les pièces texturées 2. Les poignées 3. La base de l'équipement En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.	FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire et/ou service d'hygiène et salubrité

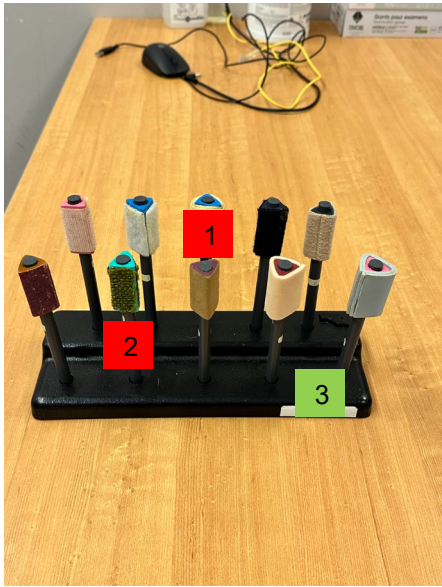

HIGH TOUCH



LOW TOUCH