

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- BALANCE PÉDIATRIQUE

MATÉRIEL REQUIS
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : <i>La balance :</i> 1. Le plateau 2. Les boutons et l'écran 3. La poignée du chariot (selon le cas) <i>Le chariot :</i> 4. Le dessus du chariot (selon le cas) 5. Les côtés du chariot (selon le cas)

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : <i>La balance :</i> 1. Le plateau 2. Les boutons et l'écran 3. La poignée du chariot <i>Le chariot :</i> 4. Le dessus du chariot 5. Les côtés du chariot 6. La base et les roulettes 7. Le derrière de l'appareil En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL

FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire et/ou service d'hygiène et salubrité

HIGH TOUCH	LOW TOUCH