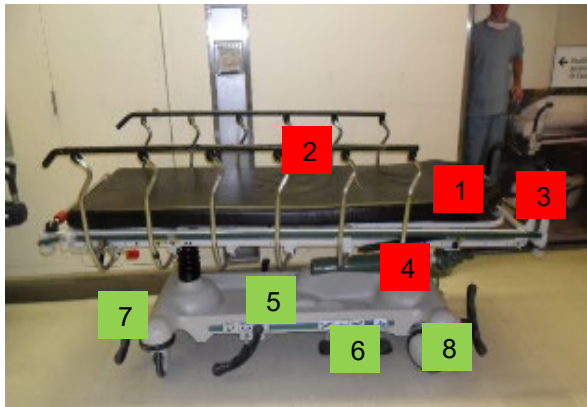


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- CIVIÈRE

MATÉRIEL REQUIS
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Le matelas (2 côtés) et le dessus de la civière 2. Les ridelles 3. La poignée et la tige à soluté (si présente) 4. Les manettes d'ajustement de la civière

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Le matelas (2 côtés) et le dessus de la civière 2. Les ridelles 3. La poignée et la tige à soluté (si présente) 4. Les manettes d'ajustement de la civière 5. La base de la civière 6. Le caoutchouc des pieds pneumatiques 7. Les différentes pédales 8. Les quatre roues En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL


FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire et/ou service d'hygiène et salubrité

	
HIGH TOUCH	LOW TOUCH