

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- SIÈGE DE DOUCHE (AVEC OU SANS APPUIE-BRAS)

MATÉRIEL REQUIS

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS

S'assurer de l'intégrité de l'équipement, s'il y a lieu, aviser le gestionnaire si l'équipement n'est plus intact.

Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres

Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :

1. Le dossier
2. Le dessus du siège
3. Le dessous du siège
4. Les pieds

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE

Démonter la chaise selon les consignes du fabricant.
Procéder à l'hygiène des mains.
Mettre des gants propres

Désinfectez les surfaces selon l'ordre suivant :

Mettre des gants propres

Désinfectez les surfaces selon l'ordre suivant :

1. Le dossier
2. Le dessus du siège
3. Le dessous du siège
4. Les pieds

Note : Désinfection en 2 étapes. Oxivir TB (complet) + Rescue (High touch)

En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL



FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ

FRÉQUENCE :

- Entre les différents usagers
- Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch

RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION :

- L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.)
- Les personnes désignées par le gestionnaire et/ou service d'hygiène et salubrité



HIGH TOUCH



LOW TOUCH