

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- TEST DE BOÎTE ET DE BLOCS

MATÉRIEL REQUIS

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS

S'assurer de l'intégrité de l'équipement, s'il y a lieu, aviser le gestionnaire si l'équipement n'est plus intact.

Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres

Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :

1. Les blocs
2. L'intérieur du boîtier
3. L'obstacle central
4. L'entièreté du chronomètre
5. La poignée et le loquet

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE


Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres

Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :

1. Les blocs
2. L'intérieur du boîtier
3. L'obstacle central
4. L'entièreté du chronomètre
5. La poignée et le loquet
6. Le coffret extérieur

En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL

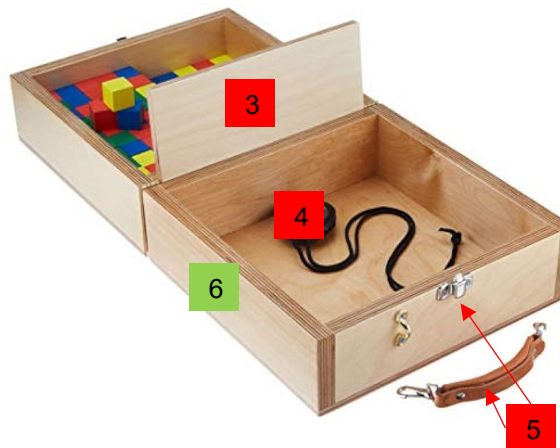

FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ

FRÉQUENCE :

- Entre les différents usagers
- Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch

RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION :

- L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.)
- Les personnes désignées par le gestionnaire et/ou service d'hygiène et salubrité



HIGH TOUCH



LOW TOUCH