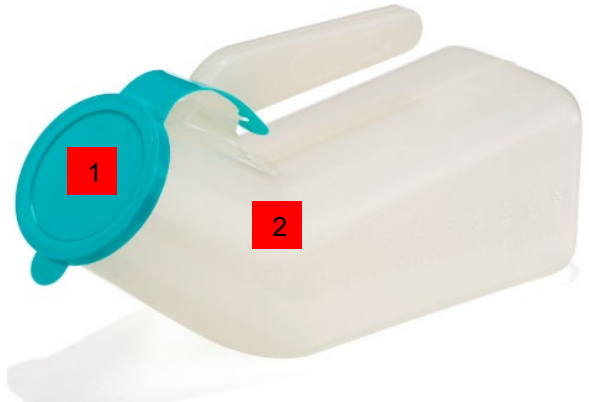


MATÉRIEL REQUIS	
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante	

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS	VISUEL
Selon les procédures relatives aux liquides biologiques de l'installation, procéder au nettoyage et à la désinfection à l'aide du laveur-décontamineur. Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres <i>Entre les utilisations pour un même usager</i> Désinfectez les surfaces selon l'ordre suivant : 1. L'extérieur de l'équipement	

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE	FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection approprié.	FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch; RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire et/ou service d'hygiène et salubrité

HIGH TOUCH LOW TOUCH
--