
DESTINATAIRES : Aux gestionnaires cliniques, à l'ensemble du personnel en soins infirmiers, aux inhalothérapeutes et anesthésistes de l'hôpital Anna-Laberge et de l'hôpital du Suroît

EXPÉDITEURS : **Fayez Aidibe**, Chef de service du génie biomédical, DL
Marie-Soleil Lafranchise, conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers, DSIEU
Roxane Forgues, conseillère en soins infirmiers, DSIEU

DATE : Le 2 décembre 2025

OBJET : **Modification de la programmation de la pompe à perfusion Infusomat space 2^e génération de BBraun concernant l'alarme pour le volume à perfuser (VAP) et le maintenir veine ouverte (MVO)**

Dans le but d'améliorer la sécurité et de mieux répondre aux besoins des équipes qui manipulent la pompe à perfusion, une mise à jour sera apportée à la programmation des pompes à perfusion Infusomat Space 2e génération de B. Braun.

Cette modification aura lieu **le mercredi 3 décembre 2025** et sera effectuée manuellement sur chaque pompe par l'équipe du GBM.

Changements apportés

- Une alarme avec voyant jaune et signal sonore aux 30 secondes se déclenchera **cinq (5) minutes avant** l'atteinte du volume à perfuser (VAP), sans entraîner de modification du débit.
- À la suite de ces cinq (5) minutes d'alarme, le débit du soluté tombera automatiquement à 0 mL/h. À ce moment, une alarme au voyant rouge se déclenchera, accompagnée d'un signal sonore environ toutes les 5 secondes. Celle-ci se poursuivra jusqu'à ce qu'une intervention soit effectuée par un membre de l'équipe clinique.

Rappel important – Bonnes pratiques cliniques

Veuillez noter que l'alarme de la pompe constitue uniquement un filet de sécurité concernant la quantité restante dans le sac de soluté.

La bonne pratique clinique demeure de :

- **Surveiller activement le volume restant dans le sac de soluté ;**
- **Anticiper et planifier le changement du sac avant l'atteinte du volume à perfuser.**

Cette vigilance demeure essentielle pour assurer la continuité et la sécurité des soins.

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec l'équipe de soutien de la DSIEU.

Merci de votre collaboration !

FA/MSL/RX