


# Glucomètre Accu-Chek Inform II

## Actions rapides lorsque la recertification doit être réalisée:

- Pour être éligible au processus « court » vous devez réaliser les étapes dans les 45 jours tel qu'indiqué sur l'appareil.
- Assurez-vous que toutes les étapes requises (examen ENA, CQ, test patient) sont complétées. Cela permettra une validation et recertification automatiques.
- Après 45 jours, il sera trop tard et vous devrez refaire la formation initiale du glucomètre sur ENA.
- Vérifiez les indications à l'écran et suivez les messages pour finaliser votre recertification.

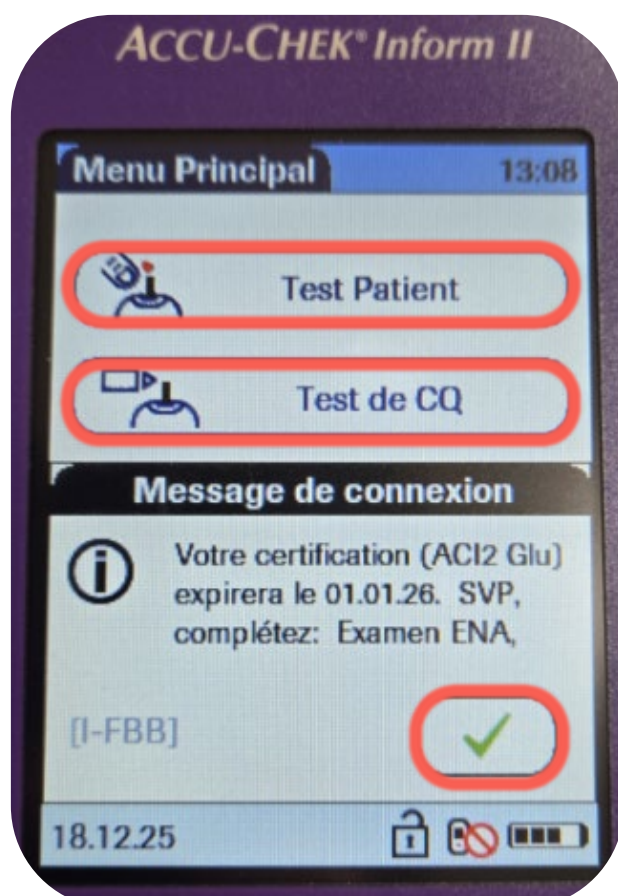

## Certification initiale vs recertification Accu-chek Inform II

Nouvel employé ou employé dont la certification a expiré  
Indice :  
Test de glucose  
n'est pas accessible

### CERTIFICATION INITIALE

- Formation théorique et examen ENA : Glucomètre Accu-chek Inform II
- Effectuer les contrôles de qualité
- Évaluation pratique (OTS)

Employé dont la certification expirera dans les 45 prochains jours  
Indice : Message du glucomètre lors de l'identification de l'utilisateur

### RECERTIFICATION (annuelle)

- Examen théorique ENA : Recertification glucomètre Accu-chek Inform II
- Effectuer les contrôles de qualité
- Évaluation pratique (test patient)

**NE PAS** faire la recertification incluant l'examen **AVANT** de recevoir le message de glucomètre sinon celle-ci ne sera pas prise en compte par le système de gestion des glucomètres.

## Liens utiles

[ECHO-labo EBMD](#)

[Procédure – Utilisation des glucomètres Accu-Check Inform II | PRO-DRL-BMD018-V1](#)

[Encadrement des EBMD - volet certification/recertification | CAR-DRL-BMD013-V1](#)