

## GUIDE DE CONSERVATION ET DÉLAI D'ACHEMINEMENT DES ÉCHANTILLONS

**CE GUIDE EST POUR LES ANALYSES LES PLUS FRÉQUENTES ET NE REMPLACE AUCUNEMENT LE RÉPERTOIRE DES ANALYSES DU SERVICE DE BIOLOGIE MÉDICALE. IL FAUT TOUJOURS RESPECTER LES CRITÈRES D'ENVOIS TEL QUE STIPULÉ DANS LA FICHE TECHNIQUE « EMBALLAGE DES MARCHANDISES DANGEREUSES » POUR LE DÉLAI D'ACHEMINEMENT, VEUILLEZ TOUJOURS CONSULTER LE RÉPERTOIRE DES ANALYSES**

| CONSERVATION ET TRANSPORT À T° PIÈCE<br>(18 à 25 °C)                                                                                                                                                         | DÉLAI D'ACHEMINEMENT             | CONSERVATION ET TRANSPORT À 4°C  Garder au réfrigérateur<br>NE PAS CONGELER | DÉLAI<br>D'ACHEMINEMENT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae TAAN<br>(L'échantillon peut être également mis à 4°C)                                                                                                            | 24 h                             | Analyse - culture d'urine et urine 24h – HCG urinaire                                                                                                          | 3 h                     |
| Écouvillon culture gonocoque (Écouvillon Stuart)                                                                                                                                                             | < 6h                             | Calprotectine fécale et Toxine C. difficile                                                                                                                    | 16 h                    |
| Écouvillon pour culture                                                                                                                                                                                      | 16 h                             | Expectoration (culture)                                                                                                                                        | 16 h                    |
| RSOSi ou Fit-test<br>(Recherche de sang occulte dans les selles)                                                                                                                                             | 12 h                             | Milieu de transport viral/UTM<br>(Ex. Influenza)                                                                                                               | 3 h                     |
| Recherche de parasites (Selles)<br>(Contenant avec un milieu de transport)<br>Les spécimens sont valides même si les contenants ont été<br>mis dans le réfrigérateur par l'utilisateur après le prélèvement. | 48 h                             | Selles (Culture)<br>(Contenant avec un milieu de transport)                                                                                                    | 24 h                    |
| Tubes bleus (coagulation)<br>PT – PTT – FIB – D-DIM                                                                                                                                                          | 3 h                              | Tubes jaunes avec gel <b>CENTRIFUGÉ SÉROLOGIE</b>                                                                                                              | 3 h                     |
| Tubes avec gel <b>NON CENTRIFUGÉ (vert menthe et jaune)</b>                                                                                                                                                  | 1 h 30                           |                                                                                                                                                                |                         |
| Tubes avec gel <b>CENTRIFUGÉ (vert menthe et jaune)</b>                                                                                                                                                      | 3 h                              |                                                                                                                                                                |                         |
| Tubes lavande, noir et rose - Hématologie<br>(FSC, sédimentation, banque de sang)                                                                                                                            | 3 h                              |                                                                                                                                                                |                         |
| Tubes lavande Hémoglobine glyquée (HBA1c)                                                                                                                                                                    | 3 h                              |                                                                                                                                                                |                         |
| Cytologie urinaire et expectoration<br>dans un contenant avec préservatif (alcool éthylique)                                                                                                                 | 72 h                             |                                                                                                                                                                |                         |
| Osmolalité urinaire                                                                                                                                                                                          | <b>Non disponible en externe</b> |                                                                                                                                                                |                         |

**NOTES IMPORTANTES :** CENTRIFUGER UNE SEULE FOIS, LE FAIRE DEUX FOIS PEUT FAUSSER LES RÉSULTATS