

Note de service

DESTINATAIRES : À tous les utilisateurs du service de biologie médicale

EXPÉDITEUR : Dominique Savard, Julie Pagé
Chefs du service de biologie médicale
Direction régionale des laboratoires
Laboratoire de l'Hôpital du Suroît, l'Hôpital Barrie Memorial et
l'Hôpital Anna Laberge

DATE : Le 28 mai 2020

OBJET : **IMPORTANT Arrêt de l'utilisation des milieux de transport
UTM pour le dépistage du SARS-CoV2 par PCR**

Jusqu'à nouvel ordre **les milieux commerciaux, UTM, ne devraient plus être utilisés à moins de situation exceptionnelle** puisqu'ils sont compatibles sur une seule plateforme analytique à faible volume.

Dans le but d'augmenter la capacité analytique et d'améliorer les délais nous vous demandons **d'utiliser uniquement les milieux de transport maison, eau moléculaire** puisque ces milieux nous permettent d'analyser les échantillons de dépistages sur l'ensemble des plateformes analytique en place.

La stabilité des milieux maison, eau osmosée, est **de 5 jours à température pièce**.
Pour vous procurer l'eau moléculaire, veuillez contacter le service de l'entreposage et de la distribution.

Il est important de **bien visser les tubes d'eau moléculaire et les acheminer au laboratoire dans le sac habituel en position verticale sur un portoir, avec un bloc réfrigérant, afin d'éviter que l'échantillon ne coule**.

Veuillez vous référer à la fiche technique « Milieux de transport fabriqué maison pour les SARS-CoV2 (COVID) Saline ou eau moléculaire pour l'utilisation ».

Pièce jointe : Milieux de transport fabriqué maison pour les SARS-CoV2 (COVID) - Saline ou eau moléculaire.