
DESTINATAIRES :	Tout le personnel de l'Hôpital du Suroît et de l'Hôpital Barrie Memorial, tout le personnel en CHSLD
EXPÉDITEUR :	Fayez Aidibe, chef de service du génie biomédical Guillaume Lahaise, coordonnateur technique en génie biomédical Jasmine Breil, conseillère en soins infirmiers, DQEPE Jessica Despons, conseillère en soins infirmiers, DQEPE Joanie Carrier, conseillère cadre PCI, secteur Suroît et Vaudreuil-Soulanges Lucie Verret, chef adjointe aux projets spéciaux et harmonisation, DSPEM Marie-Soleil Lafranchise, conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers, DSIEU
DATE :	Le 29 décembre 2025
OBJET :	Mise en œuvre de mesures immédiates – Gestion de risques liés aux chariots à médicaments AVALO (CAPSA)

À la suite de l'incendie survenu à l'hôpital de Rouyn-Noranda, Santé Québec demande à l'ensemble des établissements de mettre en œuvre des mesures immédiates afin de réduire les risques associés aux chariots à médicaments AVALO (marque CAPSA).

L'origine probable de l'incident serait liée à l'un de ces chariots. Une analyse provinciale est présentement en cours.

Les mesures suivantes doivent être appliquées sans délai afin d'assurer la sécurité de tous.

Mesures immédiates pour les équipes cliniques

1. Interdiction d'utiliser les poubelles intégrées

- Les poubelles intégrées aux chariots AVALO doivent être vidées, scellées et interdites d'usage. En attendant la solution permanente du GBM, une affiche plastifiée sera fournie pour bloquer l'accès à ces compartiments. (Voir annexe 1)
- Les déchets doivent être déposés dans des contenants externes appropriés (régulier, biorisque, piquant/tranchant, etc.).

2. Limiter la manipulation de liquides sur le chariot

- Évitez de manipuler ou transporter tout liquide dans des contenants non scellés sur le chariot. (Ex.: Pichet d'eau ouvert , verre d'eau, café etc – Interdis)
- N'utilisez pas le chariot à proximité de l'eau.
- Si un chariot est mouillé :
 - Débrancher immédiatement;
 - Essuyer l'excédent d'eau;
 - Laisser sécher complètement avant toute utilisation.

3. Pratiques sécuritaires complémentaires

- Ne pas utiliser de multiprises, rallonges électriques ou prises endommagées.
- Ne pas déposer de matières inflammables sur ou autour du chariot.

Note importante

Veuillez noter qu'il y aura des mesures supplémentaires mises en place par le GBM afin d'inspecter les chariots AVALO et de sceller de façon permanente l'accès aux poubelles intégrées.

Nous vous remercions de votre collaboration.

FA, JB, JD, GL, JC, LV, MSL

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ
IL EST INTERDIT D'UTILISER CETTE POUBELLE

MERCI D'UTILISER UNE AUTRE POUBELLE.
NOUS TRAVAILLONS SUR UNE SOLUTION DE REMPLACEMENT
PERMANENTE.

NE PAS LAISSER DE LIQUIDES DANS DES CONTENANTS NON
SCELLÉS SUR CE CHARIOT.

MERCI