

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES BAINS/DOUCHES/CIVIERES ET BAINS TOURBILLONS

DESTINATAIRES : ÉQUIPE DES SOINS INFIRMIERS, ÉQUIPES DE RÉADAPTATION

**DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS, GESTION DES RISQUES
ET DE LA QUALITÉ ET SANTÉ PHYSIQUE**

DATE D'ADOPTION : 09-2008
DATE DE RÉVISION : 22 AOÛT 2013
DATE DE RÉVISION PRÉVUE: SEPTEMBRE 2016

REMPLECE : 404.07.PROC.02 PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES BAINS/DOUCHES, CIVIÈRES

1. PRÉAMBULE

La transmission des infections se fait principalement par contact direct mais aussi peut se faire par contact indirect.

2. BUT

Éviter la transmission des infections.

3. OBJECTIFS

Assurer le nettoyage et désinfection des douches et baignoires.

4. ÉTAPES D'EXÉCUTION

BAIN/DOUCHES/CIVIÈRE

Après chaque bain

Nettoyage

- Appliquer sur une débarbouillette le nettoyant de routine pour le bain, frotter toutes les surfaces, incluant la chaise de bain (dessus et dessous) et bien rincer

Désinfection

- Éviter l'accumulation d'eau (utiliser un « squeegee » ou une serviette au besoin)
- Utiliser « Accel prévention® » qui est déjà dilué¹
- Imbiber la débarbouillette du produit, frotter avec la débarbouillette toutes les surfaces incluant la chaise de bain.
- Laisser agir pendant 5 minutes
- Rincer

Résident porteur d'ERV

Dernier bain de la journée

- NE PAS DONNER DE BAIN ET DOUCHE AU PORTEUR DE **SARV** INCONTINENT SELON LA PROVENANCE DE LA BACTÉRIE (DONNER UN BAIN AU LIT)
- NE PAS DONNER DE BAIN ET DOUCHE AU PORTEUR D'ERV INCONTINENT SELON LA PROVENANCE DE LA BACTÉRIE (DONNER UN BAIN AU LIT)
- POUR LES PERSONNES INCONTINENTES, FAVORISER LA DOUCHE
- POUR LES PERSONNES AVEC BRIS CUTANÉ (PLAIE), FAVORISER LA DOUCHE ET/OU NE PAS IMMERGER LA PLAIE DANS L'EAU DU BAIN

¹ 1 partie de Accel prévention pour 40 partie d'eau

BAINS TOURBILLONS (DÉPARTEMENT DE LA RÉADAPTATION)

Après chaque bain

Nettoyage

- Appliquer sur une débarbouillette le nettoyant de routine pour le bain, frotter toutes les surfaces, incluant la chaise de bain (dessus et dessous) et bien rincer

Désinfection

- Utiliser un récipient et déposer la turbine dans le fond du récipient
- Ajouter 10 ml d'antimousse
- Couvrir la turbine de « Accel prévention® » avec le dilueur²
- Faire fonctionner la turbine pendant 5 minutes
- Frotter le reste du bain au complet incluant les accessoires (ex. siège) avec le Accel® et laisser agir 5 minutes
- Vider le récipient dans le bain et vous assurer de frotter la section qui était en dessous du récipient
- Rincer la turbine jusqu'au retour d'eau claire à l'aide du pistolet ou mettre la turbine dans un récipient avec de l'eau
- Rincer abondamment toutes les surfaces du bain et les accessoires

À la fin de la journée

- Essuyer le bain et le siège avec une serviette propre
- Couvrir le bain

CLIENTELE AVEC BRIS CUTANE (PLAIE)

- Afin d'éliminer les particules accumulées entre les utilisations et prévenir les infections, nettoyer et désinfecter le bain avant et après le traitement de cette clientèle.

NE PAS DONNER DE BAIN ET DE DOUCHE AU PORTEUR DE SARV INCONTINENT SELON LA PROVENANCE DE LA BACTÉRIE

NE PAS DONNER DE BAIN ET DE DOUCHE AU PORTEUR D'ERV INCONTINENT SELON LA PROVENANCE DE LA BACTÉRIE

5. RÉFÉRENCES

MSSS, 2003. *Recommandations sur le nettoyage et la désinfection des équipements d'hydrothérapie des établissements de soins au Québec*

² 1 partie de Accel prévention® pour 40 partie d'eau