

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Utilisation des appareils		No
Méthode : Nettoyage et désinfection des baignoires et civières douches		Page 1 de 4
Préparé par : Chantal Bélisle, conseillère en prévention et contrôle des infections	Approuvé par :	Date : 10 novembre 2011
		Révision :

1. Définition

Les baignoires incluant les accessoires (chaise de bain ou banc d'appoint) et les civières douches sont des équipements partagés, de type non-critique à semi-critique. À cet égard, ils doivent être soumis à une méthode rigoureuse de nettoyage et de désinfection entre chaque utilisateur.

2. Buts

- Prévenir la transmission d'infection d'un usager à un autre;
- Prévenir la contamination croisée;
- Assurer l'intégrité de l'équipement;
- Prodiger des soins de qualité.

3. Matériels requis

- Équipement de protection personnelle individuelle (blouse, gants, masque, protection oculaire);
- Eau;
- Peroxyde d'hydrogène à 7 % (Virox, dilution 1 :16) dilution automatique ou solution préparée (Accel TB, 0,5%);
- Chiffons.

Contre-indication d'utilisation de la baignoire ou civière douche pour la clientèle présentant une infection active à *C.Difficile*, gastro-entérite ou diarrhée d'origine inconnue.

PROCÉDÉS**NETTOYAGE**

**Parois internes du bain ou de la
civière douche et des accessoires**

Entre chaque utilisateur

1. Procéder à l'hygiène des mains.
2. Revêtir l'équipement de protection personnelle (ÉPP).
3. Vider le bain.
4. Rincer toutes les surfaces du bain ou de la civière douche incluant les accessoires.
5. Appliquer le produit nettoyant-désinfectant (peroxyde d'hydrogène) sur toute la surface interne du bain ou de la civière douche et les accessoires.
6. Frotter les parois internes du bain ou de la civière douche ainsi que les accessoires avec un chiffon.
7. Jeter le chiffon.
8. Rincer à l'eau le bain ou la civière douche et les accessoires.

PRINCIPES

Appliquer les pratiques de base.

Créer une barrière de protection pour le personnel contre les éclaboussures (pratique de base).

Enlever les débris de saleté et les matières organiques (préparation du bain ou de la civière douche et les accessoires pour le nettoyage et la désinfection).

Éliminer les matières organiques, les souillures ou autres matières étrangères pouvant abriter des microorganismes.

Favoriser l'action optimale du produit nettoyant-désinfectant en réduisant la charge microbienne.

Éviter la contamination croisée.

Enlever le produit nettoyant-désinfectant sur les différentes surfaces.

PROCÉDÉS**DÉSINFECTION**

**Parois internes du bain ou de la
civière douche et des accessoires**

Entre chaque utilisateur

1. Appliquer le produit nettoyant-désinfectant (peroxyde d'hydrogène) sur la surface interne du bain ou de la civière douche et sur les accessoires avec un chiffon propre.
2. Laisser agir 5 minutes.
3. Rincer abondamment l'intérieur du bain ou de la civière douche et des accessoires avant la réutilisation.
4. Assécher les surfaces avec un linge propre et sec.
5. Jeter le linge après usage.
6. Retirer l'équipement de protection personnelle.
7. Procéder à l'hygiène des mains.

PRINCIPES

Assurer une désinfection de niveau intermédiaire de toutes les surfaces.

Respecter le temps de contact nécessaire à la destruction des microorganismes (effet bactéricide, virucide, fongicide).

Enlever les résidus de produit nettoyant-désinfectant.

Éviter la croissance de microorganismes (réduire le risque de contamination résiduelle) et la corrosion des parties métalliques.

Éviter la contamination croisée.

Appliquer les pratiques de base.

Appliquer les pratiques de base.

Références

MSSS(2003). Recommandations sur le nettoyage et la désinfection des équipements d'hydrothérapie des établissements de soins de santé au Québec.

MSSS(2009). Désinfectant et désinfection en hygiène et salubrité : principes fondamentaux.

Virox 5 (concentrate): fiche signalétique 2011.

Virox, Accel TB. Directions for Use : Recommended procedures for cleaning and disinfecting of surfaces an equipment.

Consultation

Renée Gauthier, conseillère cadre, service de prévention et contrôle des infections

Lucie Morison

Directrice des soins infirmiers et de la qualité

10 novembre 2011

date