

|                                                                                                                                                                                            |                                         |                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <p>Centre de santé et de services sociaux<br/>du Suroît</p>                                               | <h1>PROCÉDURE CLINIQUE</h1>             |                    |                                     |
| <b>NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES COUSSINS ROHO<br/>OU EHOB ET DES MATELAS EHOB</b>                                                                                                         |                                         |                    |                                     |
| <b>Référence à :</b><br><input type="checkbox"/> OIPE #<br><input type="checkbox"/> Ordonnance collective<br><input type="checkbox"/> Protocole<br><input type="checkbox"/> Règle de soins | <b>En vigueur le :</b><br><br>Août 2015 | <b>Révisé le :</b> | <b>Numéro</b><br><br>PC 1200-15-002 |

## OBJET DE LA MÉTHODE

Ces équipements utilisés pour diminuer les points de pression sont considérés hautement à risque de contamination. Il est important de mettre en place des mesures de nettoyage/désinfection pour éviter la transmission d'infections auprès de notre clientèle et éviter la transmission croisée.

## DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les services qui utilisent ces coussins et ces matelas.

## INTERVENANTS CONCERNÉS

- Préposés aux bénéficiaires;
- Préposés à l'entretien ménager;
- Aide de service.

## OBJECTIF(S)

- Offrir un environnement sécuritaire pour les usagers et le personnel;
- Diminuer les risques de transmission des infections.

## DÉFINITION(S)

**Désinfection** : traitement qui permet d'éliminer la plupart des agents pathogènes présents sur un objet ou une surface mais qui détruit rarement toutes les spores.

**Nettoyage** : opération qui consiste à enlever les saletés, poussières et autres substances pouvant héberger des microorganismes.

## INDICATION(S)

Le nettoyage et la désinfection des coussins et matelas doivent se faire à la fin de l'utilisation par le patient.

## MATÉRIEL REQUIS

- Équipement de protection : gants de nitrile, blouse et protection oculaire au besoin;
- Contenant de nettoyage ou évier (propre);
- Solution désinfectante à base de peroxyde d'hydrogène (Accel);
- Linges en microfibres.

## ÉTAPES DE NETTOYAGE / DÉSINFECTION

### Coussin ROHO :

- Effectuer l'hygiène des mains;
- Mettre des gants et l'équipement de protection au besoin;
- Immerger le coussin dans une solution de peroxyde d'hydrogène (Accel) dans un contenant ou évier (propre);

- Nettoyer en frottant toutes les parties du coussin et les intercalaires avec le linge en microfibres imbibé;
- Assurer un temps de contact de 5 minutes;
- Retirer l'équipement de protection et faire l'hygiène des mains;
- Rincer à l'eau claire;
- Assécher avec un linge propre;
- S'assurer que toutes les parties soient sèches avant le remisage;
- Nettoyer et désinfecter le contenant ou l'évier.

#### Coussin EHOB :

- Effectuer l'hygiène des mains;
- Mettre des gants et l'équipement de protection au besoin;
- Nettoyer en frottant toutes les parties coussin avec un linge en microfibres imbibé de solution de peroxyde d'hydrogène (Accel);
- Assurer un temps de contact de 5 minutes;
- Retirer l'équipement de protection et faire l'hygiène des mains;
- Rincer à l'eau claire;
- Assécher avec un linge sec le coussin;
- S'assurer que toutes les parties soient sèches avant le remisage.



**Pour les COUSSINS : suivre les procédures de nettoyage et de désinfection selon le germe en cause.**

**Si *Clostridium difficile* suspecté, nettoyer et désinfecter selon la procédure :**

- 3 étapes : laver avec un détergent, rincer à l'eau claire et désinfecter avec une solution d'eau de javel 1 : 10 (100 cc d'eau de javel dans 900 cc d'eau tiède)
- ou
- 1 étape : Ali-Flex RTU

#### Matelas EHOB :

- Effectuer l'hygiène des mains;
- Mettre des gants et l'équipement de protection au besoin;
- Nettoyer en frottant toutes les parties du matelas avec un linge en microfibres imbibé de solution de peroxyde d'hydrogène (Accel);
- Assurer un temps de contact de 5 minutes;
- Retirer l'équipement de protection et faire l'hygiène des mains;
- Rincer à l'eau claire;
- Assécher avec un linge sec le coussin;
- S'assurer que toutes les parties soient sèches avant le remisage.

**N.B. : Considérant la complexité de structure de ce matelas, il a été convenu de le jeter si le patient est en isolement et/ou s'il est visiblement souillé.**

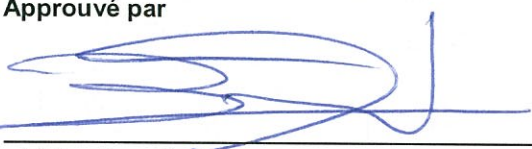
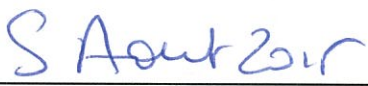
#### SOURCE(S) / RÉFÉRENCE(S)

*Dry Floatation Wheelchair Cushions, Operation Manual. The ROHO Group. 2012.*

*Waffle Mattress Overlay. EHOB.*

|                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                    |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>Centre de santé et de services sociaux<br/>du Suroît</p>                                               | <h1>PROCÉDURE CLINIQUE</h1>                                                |                    |                                                                        |
| <b>NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES COUSSINS ROHO<br/>OU EHOB ET DES MATELAS EHOB</b>                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                                        |
| <b>Référence à :</b><br><input type="checkbox"/> OIPE #<br><input type="checkbox"/> Ordonnance collective<br><input type="checkbox"/> Protocole<br><input type="checkbox"/> Règle de soins | <b>En vigueur le :</b><br><br><p style="text-align: center;">Août 2015</p> | <b>Révisé le :</b> | <b>Numéro</b><br><br><p style="text-align: center;">PC 1200-15-002</p> |

|                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PROCESSUS D'ÉLABORATION / RÉVISION</b>                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Rédigé par</b><br>Lisanne Roy, infirmière clinicienne conseillère en prévention et contrôle des infections<br>France St-Yves, infirmière clinicienne conseillère en prévention et contrôle des infections |                                   |
| <b>Révisé par</b><br>Ghislaine Leroux, Infirmière clinicienne conseillère en soins de plaies                                                                                                                 | Novembre 2014<br><br>Juillet 2015 |
| <b>Personnes consultées</b><br>Sylvie Latreille, conseillère cadre prévention et contrôle des infections<br>Anne Perreault, coordonnatrice service de salubrité                                              |                                   |
| Juillet 2015<br>Juillet 2015                                                                                                                                                                                 | Juillet 2015<br>Juillet 2015      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PROCESSUS D'APPROBATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Approuvé par</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="175 976 808 1190" style="width: 45%;"> <br/> <hr/> <p>Philippe Besombes<br/>Directeur des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire (S.I.)</p> </div> <div data-bbox="917 976 1372 1190" style="width: 45%; text-align: center;"> <br/> <hr/> <p>Date</p> </div> </div> |  |