

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Québec Hôpital du Suroît	PROCÉDURE CLINIQUE		
	NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX : EXERCISEUR GENOU		
Référence à : ☐ OIPE # ☐ Ordonnance collective ☐ Protocole ☐ Règle de soins	En vigueur le : Novembre 2015	Révisé le :	Numéro PC 1200-15-007

1. OBJET DE LA PROCÉDURE CLINIQUE

Il est reconnu que les équipements médicaux constituent des réservoirs pour les micro-organismes pathogènes. Afin de réduire le risque de contamination auprès de la clientèle, il est important de mettre en place des mesures pour un nettoyage/désinfection de ces équipements considérant qu'ils représentent un risque potentiel de contamination.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les services utilisant cet appareil.

3. INTERVENANTS CONCERNÉS

- Physiothérapeutes et techniciens en réadaptation physique;
- Préposé en physiothérapie;
- Personnel soignant.

4. DÉFINITIONS

Exerciseur de genou : Matériel d'exercice pour le genou utilisé en post-opératoire.

Nettoyage : Opération qui consiste à enlever les saletés, poussières et autres substances pouvant héberger des micro-organismes.

Désinfection : Traitement qui permet d'éliminer la plupart des agents pathogènes présents sur un objet ou une surface mais qui détruit rarement toutes les spores.

5. OBJECTIFS

- Offrir à notre clientèle et à notre personnel du matériel sécuritaire;
- Diminuer les risques de contamination croisée.

6. MATÉRIEL REQUIS

- Housses (type : peau de mouton);
- Lingettes désinfectantes;
- Piqué ou serviette (selon la morphologie de l'utilisateur);
- Sac de plastique;
- Savon détergent;
- Registre de nettoyage/désinfection.

7. PROCÉDURE

Il est de la responsabilité des utilisateurs de s'assurer que cet appareil soit nettoyé/désinfecté conformément à cette procédure.

Lors de l'utilisation :

- 1- Nettoyer/désinfecter les parties externes de l'appareil avec des lingettes désinfectantes;
- 2- Mettre un piqué ou une serviette sur les housses;
- 3- Utiliser un bandage en coton non stérile pour maintenir la glace et le jeter après utilisation;

- 4- Utiliser l'exerciseur selon les indications;
- 5- Après le traitement, enlever le piqué ou la serviette et en disposer;
- 6- Nettoyer/désinfecter à nouveau les parties externes de l'appareil avec les lingettes désinfectantes;
- 7- Remiser l'appareil dans un endroit propre.

Une fois par semaine (le vendredi) :

Le physiothérapeute ou le technicien en réadaptation physique :

- 1- Enlève les housses (type : peau de mouton) de chaque exerciceur;
- 2- Achemine les housses souillées dans un sac en plastique au local de physiothérapie (complexe modulaire);
- 3- Nettoie/désinfecte les parties externes des appareils avec des lingettes désinfectantes;
- 4- Remet les housses propres.

Le préposé en physiothérapie :

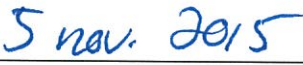
- 1- Nettoie les housses en utilisant un lave-linge;
- 2- Met les housses dans un sac de plastique propre et le range à l'endroit désigné;
- 3- Inscrit dans un registre la date de nettoyage/désinfection des housses (Annexe 1).

**REGISTRE DU NETTOYAGE/DÉSINFECTION (N/D)
DE HOUSSE EN MOUTON DE L'EXERCISEUR DE GENOU**

[illegible]

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Québec Hôpital du Suroît	PROCÉDURE CLINIQUE		
	NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX : EXERCISEUR GENOU		
Référence à : ☐ OIPE # ☐ Ordonnance collective ☐ Protocole ☐ Règle de soins	En vigueur le : Novembre 2015	Révisé le :	Numéro PC 1200-15-007

PROCESSUS D'ÉLABORATION/RÉVISION	
Rédigé par : Lianne Roy, conseillère en prévention et contrôle des infections,	Septembre 2015
Personnes consultées : Sylvie Latreille, conseillère cadre en prévention et contrôle des infections Catherine Houle, chef d'unités soins infirmiers (gériatrie active, médecine et réadaptation) Manon Rousse, coordonnatrice des ressources professionnelles et centres d'enseignement	Septembre 2015 Septembre 2015 Septembre 2015

PROCESSUS D'APPROBATION	
Approuvé par :  Chantal Careau Directrice adjointe des soins infirmiers à la qualité et à l'évolution de la pratique  Date	