

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Utilisation des appareils		No
Méthode : Nettoyage et désinfection des perfuseurs IVMed 20		Page 1 de 5
Préparé par : Chantal Bélisle Conseillère, service de prévention et contrôle des infections	Approuvé par : Directrice des soins infirmiers et de la qualité	Date : 2013-03-12
		Révision :

1. Définition

Les perfuseurs IVMed20 sont des appareils partagés de type non critique. Selon les pratiques de bases, ceux-ci doivent être soumis à des méthodes de nettoyage et de désinfection entre chaque patient.

2. Buts

- Éviter la transmission de microorganismes pathogènes d'un usager à un autre par contact indirect;
- Respecter l'application des pratiques de base;
- Assurer l'intégrité de l'appareil;
- Prodiguier des soins de qualité ;
- Procéder au nettoyage et à la désinfection de façon sécuritaire (pour les utilisateurs).

3. Matériel requis

- Eau
- Savon doux
- Chiffon doux à usage unique
- Lingette de peroxyde d'hydrogène à 0,5% (ex. : Accel TB) nettoyage et désinfection sans précautions additionnelles
- Lingettes pré-imbibées d'eau de javel Chlorox 0,55% (dilution d'hypochlorite de sodium 1 :10) nettoyage et désinfection avec précautions additionnelles
- Équipement de protection individuelle (EPI)
 - gants non stériles à usage unique
 - blouse jaune à manches longues
 - masque
 - protection oculaire

PROCÉDÉS**Nettoyage et désinfection du perfuseur IVMed 20
entre chaque patient sans précautions
additionnelles**

1. Procéder à l'hygiène des mains et enfiler des gants non stériles.
2. Retirer la seringue et la tubulure du perfuseur.
3. Si souillures visibles sur le perfuseur : nettoyer avec de l'eau et un savon doux. Utiliser un linge bien essoré.
4. Rincer avec de l'eau (utiliser un linge essoré).
5. Sécher avec une serviette propre.
6. Nettoyer et désinfecter l'extérieur et l'intérieur du perfuseur IVMed20 (amorcer le perfuseur en remontant le baril externe et en le tournant dans le sens antihoraire) **avec une lingette pré-imbibée de peroxyde d'hydrogène 0,5%** (annexe 1).
7. Laisser sécher l'appareil 5 minutes à l'air libre.
8. Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains.

PRINCIPES

Appliquer les pratiques de base.
Manipuler les lingettes désinfectantes de manière sécuritaire.

Jeter conformément à la politique de gestion des déchets en vigueur dans l'établissement.

Enlever les matières organiques sur les pièces de l'équipement.
Éviter la dispersion de liquide à l'intérieur du perfuseur (préserver l'intégrité de l'appareil).
Ne jamais immerger l'appareil dans des liquides.

Éliminer les résidus de savon et éviter la dispersion de liquide à l'intérieur du perfuseur.

Respecter les recommandations du fabricant.
Préserver l'intégrité de l'appareil.

Respecter le temps de séchage nécessaire à la destruction des microorganismes.

Respecter les pratiques de base.

PROCÉDÉS	PRINCIPES
Nettoyage et désinfection du perfuseur IVMed 20 entre chaque patient avec précautions additionnelles 9. Procéder à l'hygiène des mains. 10. Revêtir l'équipement de protection individuelle (blouse, gants, masque et protection oculaire). 11. Retirer la seringue et la tubulure du perfuseur. 12. Si souillures visibles sur le perfuseur : nettoyer avec de l'eau et un savon doux. Utiliser un linge bien essoré. 13. Rincer avec de l'eau (utiliser un linge essoré). 14. Nettoyer et désinfecter l'extérieur et l'intérieur (amorcer le perfuseur en remontant le baril externe et en le tournant dans le sens antihoraire) du perfuseur IVMed20 avec une lingette pré-imbibée d'eau de javel Chlorox 0,55% (annexe 1). 15. Laisser sécher l'appareil à l'air libre pendant 5 minutes. 16. Retirer l'équipement de protection et procéder à l'hygiène des mains.	Appliquer les pratiques de base. Protéger le personnel contre les éclaboussures et assurer la manipulation des lingettes de chlore de façon sécuritaire. Jeter conformément à la politique de gestion des déchets en vigueur dans l'établissement. Enlever les matières organiques sur les pièces de l'équipement. Éviter la dispersion de liquide à l'intérieur du perfuseur (préserver l'intégrité de l'appareil). Ne jamais immerger l'appareil dans des liquides. Éliminer les résidus de savon et éviter la dispersion de liquide à l'intérieur du perfuseur. Respecter les recommandations du fabricant. Préserver l'intégrité de l'appareil. Respecter le temps de séchage nécessaire à la destruction des microorganismes. Appliquer les pratiques de base.

Références

MedXL, manuel de l'opérateur, perfuseur IVMed20

Consultation

Renée Gauthier, conseillère cadre, service de prévention et contrôle des infections

Lucie Moisan
Directrice des soins infirmiers et de la qualité

12 mars 2013
date

ANNEXE 1



Nettoyage intérieur : amorcer le perfuseur en remontant le baril externe et en le tournant dans le sens antihoraire.



Nettoyage extérieur