

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Utilisation des appareils		No
Méthode : Nettoyage et désinfection des pompes volumétriques Hospira PLUM A+		Page 1 de 4
Préparé par : Chantal Bélisle, Conseillère, service de prévention et contrôle des infections	Approuvé par : Directrice des soins infirmiers et de la qualité	Date : 6 septembre 2012
		Révision :

1. Définition

Les pompes volumétriques Hospira sont des appareils partagés de type non-critique. Selon les pratiques de base, ceux-ci doivent être soumis à des méthodes de nettoyage et de désinfection entre chaque patient.

2. Buts

- Éviter la transmission de microorganismes pathogènes d'un usager à un autre par contact indirect;
- Respecter l'application des pratiques de base;
- Assurer l'intégrité de l'appareil;
- Prodiguer des soins de qualité;
- Procéder au nettoyage et à la désinfection de façon sécuritaire (pour les utilisateurs).

3. Matériel requis

- Eau
- Savon doux
- Linge non pelucheux
- Lingettes pré-imbibées d'eau de javel Chlorox 0,55% (dilution d'hypochlorite de sodium 1 :10)
- Équipement de protection individuelle (EPI)
 - gants non stériles à usage unique
 - blouse jaune à manches longues
 - masque
 - protection oculaire

PROCÉDÉS**Nettoyage et désinfection de la pompe volumétrique entre chaque patient.**

1. Éteindre la pompe volumétrique à l'aide de l'interrupteur (MARCHE/ARRÊT) et la débrancher du circuit d'alimentation électrique.
2. Si souillures visibles sur le boîtier : nettoyer avec de l'eau et un savon doux. Utiliser un linge non pelucheux bien essoré.
3. Rincer avec de l'eau (utiliser un linge bien essoré).
4. Revêtir l'équipement de protection individuelle (blouse, gants, masque, protection oculaire).
5. Nettoyer et désinfecter le boîtier, la porte de la cassette, le réceptacle de la cassette (en appuyant sur la patte de dégagement) ainsi que les éléments se trouvant derrière la porte de la cassette avec une lingette pré-imbibée d'eau de javel Chlorox 0,55% (éliminer l'excès de solution désinfectante à l'aide d'une serviette de papier). (Annexe 1)
6. Laisser sécher.
7. Retirer l'équipement de protection et procéder à l'hygiène des mains.

PRINCIPES

Éviter les accidents de type électrique.

Respecter les pratiques de base.
Éviter la dispersion de liquide à l'intérieur de l'appareil (préserver l'intégrité de l'appareil).

Éviter la dispersion de liquide à l'intérieur de l'appareil (préserver l'intégrité de l'appareil).

Protéger l'utilisateur contre les éclaboussures et assurer la manipulation de produit Chlorox de façon sécuritaire.

Respecter les recommandations du fabricant.
Préserver l'intégrité de l'appareil.

Respecter le temps de séchage nécessaire à la destruction des microorganismes approx. 10 min.

Respecter les pratiques de base.

Références

Hospira, manuel d'utilisation du système PLUM A+, système de perfusion quatrième édition

Consultations

Renée Gauthier, conseillère cadre, service de prévention et contrôle des infections

Lucie Moisan
Directrice des soins infirmiers et de la qualité

6 septembre 2012
date

ANNEXE 1



Patte de dégagement



Éléments se trouvant
derrière la porte de la
cassette