

Direction des soins infirmiers et de la qualité

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Utilisation des appareils		No
Méthode : Nettoyage et désinfection du bilirubinomètre «Dräger»		Page 1 de 3
Préparé par : Caroline Martel, conseillère au service de prévention des infections	Approuvé par : Direction des soins infirmiers et de la qualité	Date : 5 octobre 2012
		Révision :
1. Définition Le bilirubinomètre de Dräger est un type d'équipement employé pour plusieurs usagers. Les pratiques de base, au volet de la prévention et du contrôle des infections, recommandent que tous les appareils partagés doivent être soumis à des méthodes rigoureuses de nettoyage et désinfection entre chaque utilisation. De plus, l'appareil, son unité de base et ses accessoires doivent aussi être nettoyés et désinfectés périodiquement. 2. Buts ▪ Éviter la transmission de microorganismes pathogènes d'un usager à un autre par contact indirect; ▪ Respecter l'application des pratiques de base; ▪ Assurer l'intégrité de l'appareil; ▪ Prodiquer des soins de qualité; ▪ Procéder au nettoyage et à la désinfection de manière sécuritaire (pour les utilisateurs). 3. Matériel requis Selon le type de nettoyage et de désinfection (précautions additionnelles ou non), différents produits sont utilisés pour l'appareil, l'unité de base et les accessoires : ▪ Eau ▪ Savon doux ▪ Alcool 70%		

PROCÉDÉS**Nettoyage et désinfection du bilirubinomètre entre chaque usager et quotidiennement**

1. Procéder à l'hygiène des mains.
2. Si souillures visibles : nettoyer à l'eau et savon doux avec un linge doux bien essoré (ne jamais immerger l'appareil dans un liquide ou le placer sous l'eau courante).
3. Rincer avec de l'eau en utilisant un linge bien essoré (ne jamais immerger l'appareil dans un liquide ou le placer sous l'eau courante).
4. Sécher.
5. Désinfecter l'appareil avec un tampon d'alcool 70% pré-humidifié.
6. Laisser sécher.
7. S'assurer de l'absence de solution dans la prise ou le port de l'appareil avant de le replacer sur l'unité de base.
8. Éliminer les traces du désinfectant à l'écran avec un chiffon doux.

Avant chaque utilisation, nettoyez le capteur à l'aide d'un tampon pré-humidifié d'alcool.

Nettoyage et désinfection hebdomadaire du bilirubinomètre et de l'unité de base

1. Procéder à l'hygiène des mains.
2. Retirer le bilirubinomètre de l'unité de base.
3. Débrancher l'unité de base.
4. Désinfecter le bilirubinomètre et l'unité de base avec un tampon d'alcool pré-humidifié.
5. Laisser sécher.
6. Vérifier l'absence de solution sur l'appareil et l'unité de base avant de rebrancher celle-ci.

PRINCIPES

Respecter les pratiques de base.

Suivre les recommandations du fabricant.
Éviter la dispersion de liquide à l'intérieur de l'appareil et préserver l'intégrité de l'appareil.

Suivre les recommandations du fabricant.
Éviter la dispersion de liquide à l'intérieur de l'appareil et préserver l'intégrité de l'appareil.

Suivre les recommandations du fabricant.

Respecter le temps de séchage nécessaire à la destruction des microorganismes.
Éviter les accidents de type électrique ainsi que la dispersion de liquide à l'intérieur de l'appareil.

Préserver l'intégrité de l'écran.

Diminuer le risque d'infection pour l'usager.

Respecter les pratiques de base.

Suivre les recommandations du fabricant.

Protéger le personnel contre les accidents de type électrique.

Suivre les recommandations du fabricant.
Éviter la dispersion de liquide à l'intérieur de l'équipement et préserver l'intégrité de l'appareil.

Respecter le temps de séchage nécessaire à la destruction des microorganismes.

Éviter les accidents de type électrique lors du branchement de l'unité de base.

Références

Dräger medical (2009) Bilirubinomètre modèle JM-103 : manuel d'instruction.

Consultation

Renée Gauthier, conseillère cadre, service de prévention et contrôle des infections

Lucie Moisan

Directrice des soins infirmiers et de la qualité

5 octobre 2012

date