

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Utilisation des appareils		No
Méthode : Nettoyage et désinfection du macérateur Vernacare Vortex et Vernacare 2000		Page 1 de 3
Préparé par : Chantal Bélisle conseillère du service de prévention et contrôle des infections Annie Marceau coordonnatrice service prévention et contrôle des infections	Approuvé par : Cadre supérieure intérimaire de la direction des soins infirmiers et de la qualité	Date : 2011-03-08
		Révision : 2015-09-01

1. Définition

Le macérateur Vernacare est un type d'équipement non-critique servant à éliminer les liquides biologiques provenant des patients. Il est composé d'une unité de destruction et d'une gamme d'articles jetables (bassin, urinal, haricot).

2. Buts

- Prévenir la transmission croisée entre le personnel soignant et le patient;
- Prévenir la transmission de microorganismes pathogènes par contact direct ou indirect avec du matériel contaminé;
- Assurer l'intégrité de l'équipement;
- Prodiger des soins de qualité.

3. Matériels requis

- Eau;
- Solution nettoyante / désinfectante en vigueur dans notre installation;
- Produit nettoyant Vernacare V38-260;
- Lingette d'hypochlorite de sodium (ex. Clorox).

Ne jamais mettre ses bras, ses mains à l'intérieur de l'appareil.

PROCÉDÉS**NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
INTÉRIEUR DE L'APPAREIL
(1 fois par semaine)¹**

- Débrancher l'appareil avant de procéder au nettoyage.
- Procéder à l'hygiène des mains.
- Mettre une blouse et des lunettes de protection et des gants non stériles.
- Ouvrir le bouchon du réservoir de remplissage situé sur le dessus du macérateur (Vortex) ou à l'intérieur du macérateur (Vernacare 2000).
- Vérifier la quantité de produit nettoyant/désinfectant requis pour l'appareil, dans le réservoir. Remplir au besoin et replacer le bouchon.
- Nettoyer l'intérieur du couvercle en utilisant des lingettes d'hypochlorite de sodium.
- Laisser sécher.
- Retirer les gants non stériles et la blouse et les jeter dans la poubelle.
- Procéder à l'hygiène des mains.

PRINCIPES

Éviter les accidents de type électrique.

Appliquer les pratiques de base.

Protéger le personnel contre les éclaboussures de produits chimiques et de souillures.

Permettre le remplissage du réservoir.

Assurer le nettoyage et la désinfection de l'appareil tel que recommandé par le fabricant (maintenir une quantité suffisante dans le réservoir pour une désinfection adéquate à chacun des cycles).

Éliminer les matières organiques et les souillures.

Respecter le temps de séchage à l'air ambiant (temps nécessaire pour une destruction adéquate des microorganismes).

Appliquer les pratiques de base.

¹ Ou plus souvent au besoin lors d'odeurs et de débris à l'intérieur de l'appareil Vernacare.

PROCÉDÉS	PRINCIPES
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (quotidien) Par le service d'hygiène et salubrité ▪ Porter la blouse et des gants non stériles. ▪ Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec la solution nettoyante/désinfectante en vigueur dans l'hôpital (utiliser un linge bien essoré pour le panneau indicateur). ▪ Laisser sécher. ▪ Retirer l'équipement de protection et en disposer dans les sacs prévus à cet effet. ▪ Procéder à l'hygiène des mains.	Protéger le personnel contre les éclaboussures de produits chimiques et de souillures. Éliminer les matières organiques et les souillures. Éviter la dispersion de liquide à l'intérieur du panneau indicateur (préservation de l'intégrité de l'appareil). Respecter le temps de séchage à l'air ambiant (temps nécessaire pour une destruction des microorganismes). Appliquer les pratiques de base.

Références

Manuel d'entretien Vernacare 2000

Manuel technique Vernacare Vortex (2008)

Procédure de nettoyage macérateur Vernacare, Prévention des infections juillet 2010

MSSS (2008). Mesures d'hygiène et de salubrité au regard du *Clostridium difficile*. Lignes directrices.



Cadre supérieure intérimaire à la direction des soins infirmiers
et de la qualité

2015-09-01

Date