

Destinataires : Chefs des unités de soins et coordonnateurs des activités de soins infirmiers JR

Expéditeur : Annie Marceau, ICASI, responsable prévention et contrôle des infections – Secteur JR

Date : 2017-09-21

Secteur ciblé : ☐ CISSS de la Montérégie-Ouest ☒ Jardins-Roussillon ☐ Suroît
☐ Haut Saint-Laurent ☐ Vaudreuil-Soulanges

Objet : **Nettoyage et désinfection du saturomètre Masimo**

Mise en contexte

Le saturomètre est un équipement de soin fréquemment manipulé par les mains du personnel et requis dans l'environnement de l'usager et pouvant ainsi contribuer à la contamination croisée et à la transmission d'infections nosocomiales, ce qui justifie l'importance des mesures de nettoyage et de désinfection rigoureuses.

Compte tenu que

Le saturomètre est inclus dans les équipements de soins non critiques de la classification de Spaulding. (CDC, 2008 et Santé Canada, 1998) il nécessite une désinfection de bas niveau avec une lingette désinfectante compatible avec l'appareil.

Recommandations

- Utiliser la lingette de Chlore stabilisé (exemple : Clorox) après avoir utilisé le saturomètre;
- Frotter vigoureusement toute la surface de l'appareil;
- Porter une attention particulière afin de ne pas laisser du liquide s'infiltrer dans le micro à l'avant de l'appareil;
- Laisser sécher le produit, ne pas essuyer, le temps de contact est de 1 minute pour les agents pathogènes autre que le *Clostridium difficile* qui lui nécessite 3 minutes de temps de contact;
- Essuyer l'écran au besoin avec un linge humidifié d'eau (essoré) lors de dépôt de produit de chlore;
- Retirer la gaine protectrice minimalement 1 fois par semaine;
- Faire tremper la gaine dans de l'eau avec savon doux puisque l'intérieur de celle-ci est compartimenté ce qui retiendra des particules de saletés, s'assurer de rincer et assécher par la suite;
- Désinfecter avec la lingette de chlore stabilisé.

Références

Clorox (2013). *Lingette désinfectante à l'eau de Javel*. Fiche produit.
CDC (2008). *Guideline for disinfection and sterilization in Healthcare facilities*. Repéré à http://www.cdc.gov/hicpac/Disinfection_sterilization/2_approach.html
Groupe d'approvisionnement en commun de l'Ouest du Québec, (2016). *Documents d'information Masimo*.
Santé Canada (1998). *Guide de prévention des infections*. Lavage des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation dans les établissements de santé.

Personnes consultées

Isabelle Laperrière, adjointe au directeur – prévention et contrôle des infections
Joanie Carrier, conseillère à la prévention et contrôle des infections
Chantal Belisle, conseillère à la prévention et contrôle des infections