

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Nettoyage et désinfection des appareils		No
Méthode : Nettoyage et désinfection du tonomètre Goldman		Page 1 de 5
Préparé par : Chantal Bélisle, conseillère, service de prévention des infections	Approuvé par : Direction des soins infirmiers et de la qualité	Date : 2013-11-11
		Révision :

1. Définition

Le tonomètre Goldman est un type d'équipement employé en ophtalmologie pour mesurer la pression intraoculaire. L'appareil étant utilisé pour plusieurs usagers, il doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

2. Buts

- ❖ Éviter la transmission de microorganismes pathogènes d'un usager à l'autre par contact direct et indirect;
- ❖ Respecter l'application des pratiques de base;
- ❖ Assurer l'intégrité de l'appareil;
- ❖ Prodiguer des soins de qualité;
- ❖ Procéder au nettoyage et à la désinfection de manière sécuritaire (pour les utilisateurs).

3. Matériel requis

- ❖ Prismes de dédoublement jetables Tonosafe;
- ❖ Gants non stériles à usage unique;
- ❖ Eau et savon doux (vaisselle);
- ❖ Chiffons non pelucheux.

PROCÉDÉS**Installation du prisme jetable Tonosafe sur le tonomètre Goldman**

1. Procéder à l'hygiène des mains.
2. Lors de la première utilisation du plateau, retirer la pellicule de protection le long de la perforation afin de dégager le support (B) (annexe 1).
3. Sortir le support de la cavité.
4. Retirer la pellicule protectrice couvrant l'un des prismes jetables et utiliser le support (B) verticalement pour retirer le prisme (A) attention de bien aligner l'indexation moulée (C) du prisme avec la fente du support (D) (annexe 1).
5. Vérifier que le prisme est entièrement poussé dans le support (lors du maniement du prisme, ne tenir que la bague et non la zone d'aplanation).
6. Insérer l'ensemble du support et le prisme dans le tonomètre. Le tonomètre est prêt à l'emploi.

Changement du prisme jetable et nettoyage du tonomètre entre chaque usager

1. Procéder à l'hygiène des mains.
2. Mettre des gants non stériles à usage unique.
3. Retirer le prisme jetable (Tonosafe) du tonomètre et le jeter.
4. Nettoyer le boîtier du tonomètre avec un linge doux légèrement imbibé d'eau savonneuse.
5. Enlever les gants jetables et procéder à l'hygiène des mains.
6. Retirer le support (B) du tonomètre et remettre un autre prisme jetable Tonosafe (A). À la fin de la journée, retirer le support du tonomètre et le conserver dans la cavité du plateau (E).

Lorsque les vingt prismes Tonosafe (A) ont été utilisés, jeter le support (B) et recommencer avec un nouveau plateau.

PRINCIPES

Respecter les pratiques de base.

Suivre les recommandations du fabricant.
Préserver l'intégrité des pièces d'équipement.

Suivre les recommandations du fabricant;

Respecter les pratiques de base.

Respecter les pratiques de base.

Suivre les recommandations du fabricant.

Suivre les recommandations du fabricant.
Procéder délicatement afin d'éviter la dispersion de liquide dans la sonde.

Respecter les pratiques de base.

Suivre les recommandations du fabricant.

Suivre les recommandations du fabricant.

References

Guide d'emploi du Tonosafe édition 2012/10 de Haag-Streit international
Goldman tonomètre à aplanation pour lampe à fente, mode d'emploi, Haag-Streit,

Consultation


Renée Gauthier, conseillère cadre, service de prévention et contrôle des infections

Lucie Moisan
Directrice des soins infirmiers et de la qualité

11 nov 2013
date

ANNEXE 1

TONOMÈTRE GOLDMAN

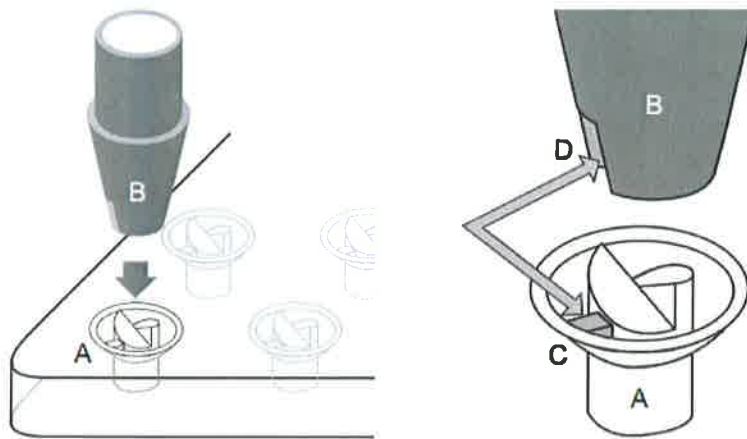


Prismes de dédoublement
jetables Tonosafe

Support du prisme de
dédoublement

Zone d'aplanation



ANNEXE 1 (SUITE)

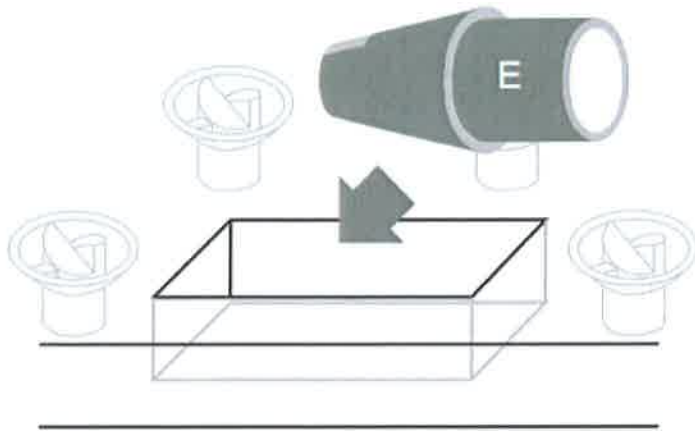

Boitier
du tonomètre
Goldman